



marimer

Baby

Spray d'Eau de mer Lavage du nez



FR **MARIMER Baby Isotonique** est un spray d'eau de mer 100% naturelle puisée dans le Parc naturel marin d'Iroise riche en sels minéraux et oligo-éléments marins. Il peut être utilisé au quotidien grâce à sa concentration physiologique (isotonique - 9‰). Sa micro-diffusion permet une application douce et homogène sur la muqueuse. Son large embout de sécurité conçu pour les nourrissons (hors prématurés) et les jeunes enfants assure une administration facile et en toute sécurité.

Sa valve anti-retour est conçue pour éviter tout risque de contamination extérieure et assure la protection de la solution.

COMPOSITION

Eau de mer isotonique, eau purifiée (équivalent à 9 g/L en sels).

INDICATIONS

Le spray **MARIMER Baby Isotonique** est conseillé chez les adultes, enfants et nourrissons dès la naissance (hors prématurés) :

- Pour une hygiène nasale quotidienne
- Facilite l'évacuation des sécrétions nasale
- Recommandé en cas de rhinite allergique

POSOLOGIE

1 à 2 pulvérisations par narine, 1 à 3 fois par jour selon les besoins. **MARIMER Baby Isotonique** peut être utilisé quotidiennement sur une période prolongée.

MODE D'EMPLOI

- Incliner la tête sur le côté.
- Introduire délicatement l'embout dans la narine supérieure et pulvériser **MARIMER Baby Isotonique**.
- Répéter l'opération avec l'autre narine.
- Redresser la tête pour laisser s'écouler les mucosités, puis essuyer l'excédent ou se moucher.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Laver l'embout à l'eau chaude savonneuse après chaque utilisation. Rincer et essuyer.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les prématurés. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'eau de mer.

MISES EN GARDE

Si les symptômes persistent ou s'accroissent, consultez votre médecin. Veuillez rapporter tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif aux Laboratoires Gilbert - site internet : www.labogilbert.fr et/ou à l'Autorité Compétente nationale. **TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

CONDITIONS DE CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'étui/le flacon. Attention. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

 Laboratoires Gilbert,
928, Avenue du Général de Gaulle
F-14200 Hérouville Saint-Clair

 Distribué en Belgique et
Luxembourg par :
In België en Luxemburg verdeeld door:
Vertrieb in Belgien und Luxemburg durch:
Laboratoires Gilbert Benelux
Zoning Ovest 16, B-7860 Lessines
Vertrieb in Deutschland durch: Glenmark
Arzneimittel GmbH, Industriestraße 31,
D-82194 Gröbenzell

MD

CE 0459

Année / Jahr / Jaar / Anno : 2001.

LOGO	FR
	Fabricant
	Distributeur
MD	Dispositif médical
CE 0459	Logo de conformité CE avec numéro d'identification de l'organisme notifié
	Lire attentivement les instructions d'utilisation
	Date limite d'utilisation
LOT	Numéro de lot
	Dès 0 mois
3	Conformité à la Directive relative aux générateurs d'aérosols
175	Contenance du récipient