

Biberons pour lait maternel

Idéal pour recueillir, conserver et congeler le lait maternel

Pour la sécurité et la santé de votre enfant **AVERTISSEMENT!**

- | Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- | Garder tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants.
- | Éviter de toucher l'intérieur des flacons et des bagues.
- | La tétée continue et prolongées de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.
- | Toujours vérifier la température de l'aliment avant de faire boire l'enfant.

Nettoyage et hygiène

Important

- | Utiliser de l'eau potable pour toutes les procédures de nettoyage ci-après.
- | Nettoyer chaque pièce du set d'accessoires juste avant et après utilisation pour éviter que des résidus de lait ne séchent et pour empêcher la prolifération de bactéries.
- | Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

Avant et après la première utilisation, et une fois par jour

Démonter, laver et rincer toutes les pièces. Placer les pièces dans un récipient suffisamment grand. Le remplir d'eau froide jusqu'à recouvrir les pièces. En option, une cuillère à café d'acide citrique peut être ajoutée pour éviter des dépôts calcaires. Chauffer et laisser bouillir 5 minutes. Il est possible de nettoyer les différentes pièces désassemblées avec les sachets pour micro-ondes Quick Clean, ou à l'étage supérieur du lave vaisselle ou dans un stérilisateur vapeur.

Après chaque utilisation

Démonter et laver toutes les pièces à l'eau chaude et au savon. Rincer à l'eau claire et faire sécher à l'air sur un linge propre.

Conservation / décongélation du lait maternel

Règles de conservation pour le lait maternel fraîchement exprimé (pour les bébés en bonne santé nés à terme)

Température ambiante	4 – 6 heures de 19 à 26 °C (66 à 78 °F)
Réfrigérateur	3 – 8 jours à 4 °C (39 °F) ou moins
Congélateur	6 – 12 mois -18 à -20 °C (0 à 4 °F)
Lait maternel décongelé	Au réfrigérateur pendant au max. 10h. Ne pas recongeler !

| Ne conservez pas le lait maternel dans la porte du réfrigérateur. Choisissez plutôt la partie la plus froide du réfrigérateur (à l'arrière de la clayette au-dessus du bac à légumes).

| Vous pouvez congeler le lait maternel exprimé dans des biberons ou des sachets « Pump & Save ». Ne remplissez pas les biberons ou sachets à plus de $\frac{3}{4}$ afin de laisser de l'espace pour la solidification du lait.

| Indiquez la date d'expression sur les biberons ou sachets « Pump & Save ».

Avertissement

Ne décongelez pas et ne réchauffez pas le lait maternel au four à micro-ondes ni dans une casserole d'eau bouillante afin d'éviter toute perte de vitamines, de minéraux et d'autres nutriments essentiels, ainsi que tout risque de brûlure.

| Pour préserver les composants du lait maternel, décongelez le lait dans le réfrigérateur la veille de son utilisation. Vous pouvez également tenir le biberon ou le sachet « Pump & Save » sous l'eau chaude (max. 37 °C).

| Secouez délicatement le biberon ou le sachet « Pump & Save » afin d'homogénéiser les corps gras. Évitez de secouer vigoureusement ou d'agiter le lait.

Matériaux: Polypropylène

Recyclage: Conformément aux prescriptions locales

Ne contient pas de bisphénol A, DEHP (Phthalate) ou latex.

Conforme à la norme EN 14350.