

Harmony™



Handmilchpumpe/
Harmony Essentials Pack
Gebrauchsanweisung

Tire-lait manuel/
Harmony Essentials Pack
Mode d'emploi

Tiralatte manuale/
Harmony Essentials Pack
Istruzioni per l'uso

Handkolf/
Harmony Essentials Pack
Gebruiksaanwijzing

Χειροκίνητο
θήλαστρο/Συσκευασία
Harmony Essentials Pack
Οδηγίες χρήσης

DE

DEUTSCH

3 – 15

FR

FRANÇAIS

17 – 29

IT

ITALIANO

31 – 43

NL






NEDERLANDS

45 – 57

EL

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

59 – 71

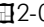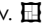- DE** Illustrierte Elemente oder Anweisungsschritte sind mit der Abbildungs- und der Detailnummer gekennzeichnet (z. B. 2-01).
- FR** Les articles ou les étapes du mode d'emploi qui sont illustrés s'accompagnent d'une référence (par ex. 2-01).
- IT** Gli articoli illustrati o i passaggi delle istruzioni sono marcati con la figura e il relativo numero (ad es. 2-01).
- NL** Afgebeelde artikelen of instructiestappen zijn gemarkeerd met het afbeeldings- en detailnummer (bv. 2-01).
- EL** Τα είδη ή τα βήματα οδηγιών που απεικονίζονται συνοδεύονται από τον αριθμό εικόνας και λεπτομέρειας (π.χ. 2-01).













DE Diese Seite ausklappen.

FR Dépliez ce rabat.

IT Aprire questa pagina.

NL Vouw deze pagina uit.

EL Ξεδιπλώστε αυτή τη σελίδα.

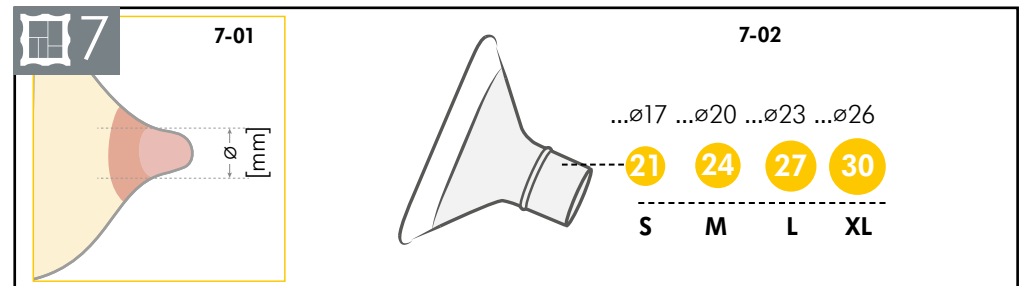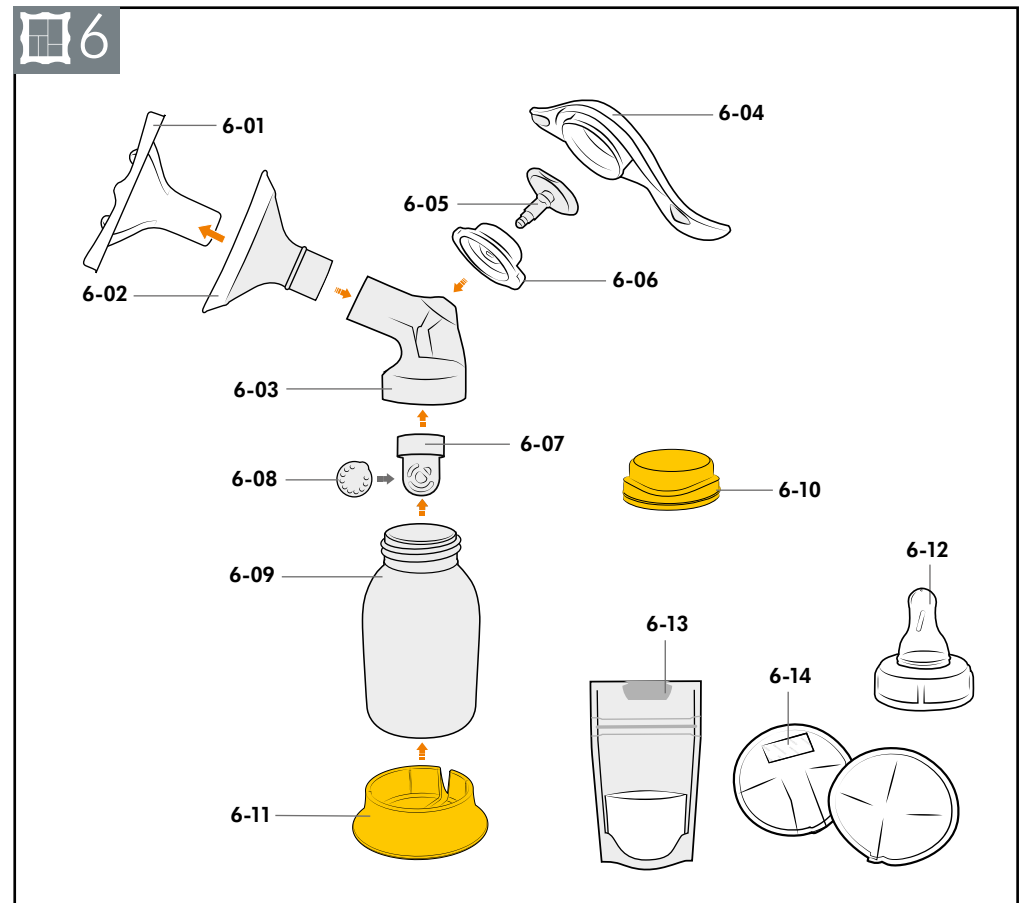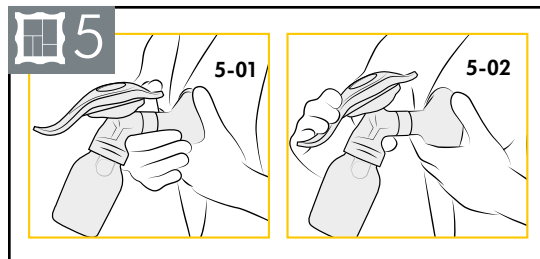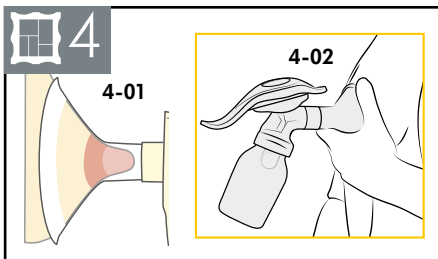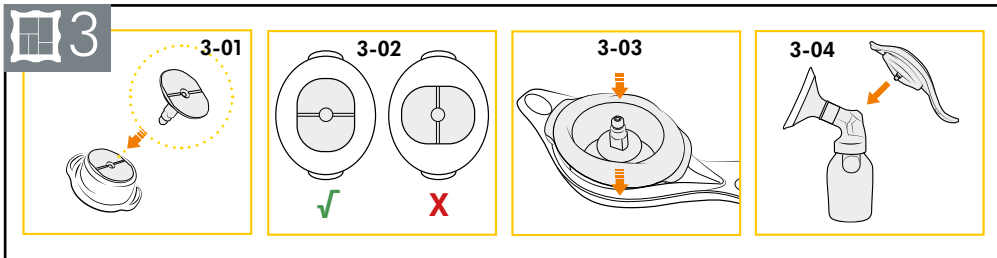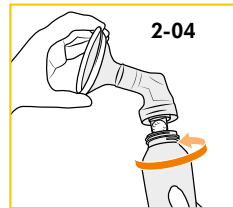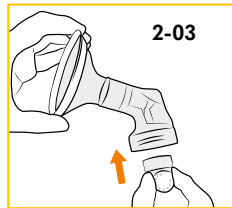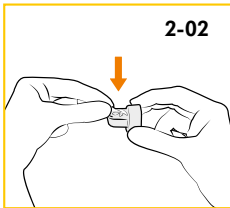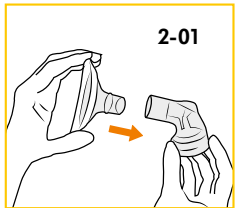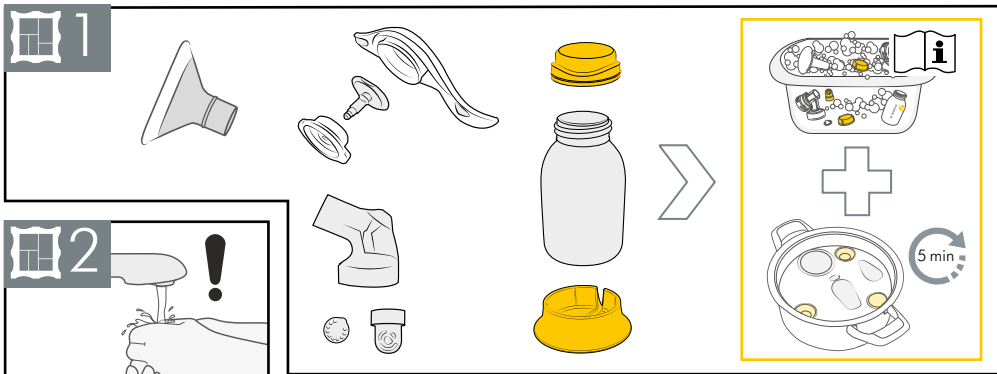

1. Recommandations importantes en matière de sécurité



Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

Conservez ces instructions pour les consulter ultérieurement.

Les avertissements renvoient à des instructions importantes en matière de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures corporelles ou endommager le produit. Les symboles et mots-indicateurs suivants montrent l'importance des avertissements :



AVERTISSEMENT

Peut provoquer des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Peut provoquer des blessures légères.

AVIS

Peut endommager le matériel
(pas des blessures corporelles).

i Informations

Informations utiles ou importantes
non relatives à la sécurité.



AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques pour la santé et réduire les risques de blessures graves :

- L'expression de votre lait peut déclencher des contractions. N'exprimez pas votre lait avant d'avoir accouché. Si vous tombez enceinte et que vous allaitez ou exprimez toujours votre lait, consultez un professionnel de santé avant de continuer.
- Pour les mères atteintes de l'hépatite B, de l'hépatite C ou du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), il faut savoir qu'exprimer le lait maternel ne réduit pas et n'élimine pas le risque de transmission du virus au bébé par le lait maternel.
- Lavez toutes les pièces qui entrent en contact avec le sein et le lait maternel après chaque utilisation.
- Présence de petites pièces pouvant être avalées par les enfants. Une surveillance étroite s'impose lorsque le tire-lait ou les accessoires sont utilisés à proximité d'enfants.

ATTENTION

Pour éviter les risques pour la santé et réduire les risques de blessures :

- Ce produit est destiné à être utilisé par une seule personne. L'utilisation du même produit par plusieurs personnes présente un risque pour la santé.
- Le dispositif et ses accessoires ne sont pas thermorésistants, maintenez-les à distance des surfaces chaudes et des flammes nues.
- N'exposez pas le dispositif à la lumière directe du soleil.
- Avant chaque utilisation, vérifiez visuellement que chaque pièce composant le dispositif ne présente aucun signe de détérioration ou d'usure. N'utilisez jamais un produit défectueux. Jetez les pièces aux premiers signes de détérioration ou d'usure.
- Ne réparez pas vous-même le dispositif. Ne modifiez pas l'appareil.
- Utilisez le dispositif uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce mode d'emploi.
- Ne réchauffez pas le lait maternel au four à micro-ondes et ne le faites pas bouillir. L'utilisation d'un four à micro-ondes génère des zones brûlantes dans le lait qui risquent de provoquer de graves brûlures dans la bouche du bébé (le passage au four à micro-ondes modifie également la composition du lait maternel).
- Nettoyez et désinfectez toutes les pièces qui entrent en contact avec vos seins et avec le lait maternel avant la première utilisation.
- Utilisez seulement les pièces recommandées par Medela avec ce dispositif.
- Bien qu'un certain inconfort puisse être ressenti la première fois, l'utilisation d'un tire-lait ne doit pas être douloureuse. Si vous n'êtes pas certaine de la taille de tétée adéquate, consultez le site www.medela.fr ou contactez une consultante en lactation ou une spécialiste en allaitement qui vous aidera à identifier la taille idéale.

AVIS

- Manipulez les biberons et les pièces avec prudence :
- Les biberons de recueil en plastique ainsi que ses différentes pièces peuvent être fragilisés par la congélation et risquent de casser en cas de chute.
- Les biberons de recueil et les pièces peuvent être endommagés à la suite d'une mauvaise manipulation, par exemple en cas de chute, de serrage excessif ou de renversement.
- N'utilisez pas de lait maternel si les biberons ou les pièces présentent des signes d'endommagement.

Sommaire

1. Recommandations importantes en matière de sécurité	17
2. Usage prévu	20
3. Description du produit	20
3.1 Variantes du produit	20
3.2 Le tire-lait Harmony comprend	20
4. Comment débiter	20
5. Nettoyage	21
5.1 Lavage et désinfection du tire-lait	21
6. Préparation à la séance d'expression	23
6.1 Choix de la taille de téterelle	23
6.2 Assemblage du connecteur et de la téterelle	23
6.3 Assemblage de la poignée	24
6.4 Positionnement de la téterelle	24
7. Fonctionnement de votre tire-lait	24
7.1 Imiter le rythme de bébé (2-Phase Expression)	24
7.2 Expression du lait maternel	25
7.3 Après l'expression	25
8. Manipulation du lait maternel	26
8.1 Instructions de conservation	26
8.2 Congélation	26
8.3 Décongélation	27
9. Dépannage	27
10. Accessoires	28
11. Garantie	28
12. Mise au rebut	28
13. Signification des symboles	28
14. Réglementation internationale	29
14.1 Articles pour l'alimentation liquide des enfants	29
15. Caractéristiques techniques	29

2. Usage prévu

Le tire-lait Harmony est un tire-lait manuel destiné aux femmes allaitantes pour exprimer et recueillir leur lait. Le tire-lait Harmony est destiné à être utilisé par une seule personne.

3. Description du produit

Le tire-lait Harmony à usage personnel fonctionne manuellement avec une téterelle PersonalFit Flex et une poignée ergonomique 2-Phase.

Il vous permet d'alterner entre des aspirations brèves pour stimuler l'écoulement de lait, et des aspirations amples pour exprimer votre lait de manière optimale, comme le fait votre bébé au sein.

Caractéristiques du tire-lait Harmony :

- Facile à manipuler et à nettoyer.
- Expression silencieuse et discrète de votre lait.
- La téterelle PersonalFit Flex 24 mm améliore votre confort et l'expression du lait.

3.1 Variantes du produit









Le tire-lait Harmony existe en deux versions :




- Tire-lait Harmony : comprend uniquement le tire-lait.
- Harmony Essentials Pack : comprend le tire-lait, une tétine en silicone compatible avec le biberon Harmony, quatre sachets de conservation pour lait maternel et quatre coussinets d'allaitement Safe&Dry ultra fins.

Veillez également lire le mode d'emploi fourni avec ces articles supplémentaires.




3.2 Le tire-lait Harmony comprend

Voir la figure  6 sur les rabats.

-  6-01 Enveloppe de protection (jetable)
-  6-02 Téterelle PersonalFit Flex 24 mm
-  6-03 Connecteur
-  6-04 Poignée
-  6-05 Tige avec joint torique
-  6-06 Diaphragme
-  6-07 Valve
-  6-08 Membrane de la valve (2 pièces)

-  6-09 Biberon
-  6-10 Couvreclac
-  6-11 Support de biberon

Les articles suivants figurent uniquement dans Harmony Essentials Pack :

-  6-12 Tétine
-  6-13 Sachet de conservation pour lait maternel (4 pièces)
-  6-14 Coussinets d'allaitement Safe & Dry (4 pièces)

4. Comment débiter

Pour vous préparer à exprimer votre lait la première fois, séparez, lavez et désinfectez les pièces du tire-lait ; voir la **section 5.1**.

5. Nettoyage

5.1 Lavage et désinfection du tire-lait

Le lavage et la désinfection sont deux procédés différents. Ils doivent être réalisés séparément pour vous protéger ainsi que votre bébé, et pour assurer la performance du dispositif.

Lavage – Nettoyer les surfaces des pièces en éliminant physiquement les contaminants.

Désinfection – Tuer les microorganismes, tels que les champignons, bactéries ou virus, qui peuvent être présents sur les surfaces des pièces.

ATTENTION

- Démontez et lavez toutes les pièces exposées au lait maternel immédiatement après usage. Ce procédé aidera à enlever les résidus de lait maternel et évitera la prolifération de bactéries.
- Lavez-vous soigneusement les mains au savon et à l'eau.
- Utilisez uniquement de l'eau du robinet potable ou en bouteille pour le nettoyage.
- Ne placez pas les pièces directement dans l'évier pour les rincer ou les laver. Utilisez une cuvette propre servant uniquement à la vaisselle de bébé.
- N'utilisez pas un torchon à vaisselle pour essuyer ses affaires.
- N'utilisez pas de désinfectants pour nettoyer.

AVIS


Attention :

- Veillez à ne pas endommager les pièces du tire-lait lors du nettoyage. N'utilisez aucun objet pointu (comme un cure-dent) pour le nettoyage.
- Certaines pièces du tire-lait Harmony sont très petites (par ex. la membrane de la valve ou le joint torique). Vérifiez qu'aucune pièce ne manque lorsque vous assemblez le tire-lait après nettoyage.
- Rangez les pièces sèches du tire-lait dans un sac ou un récipient propre jusqu'à la prochaine utilisation.
- Ne rangez pas les pièces lorsqu'elles sont mouillées ou humides, car cela favorise le développement de moisissures.
- Si vous remarquez un résidu blanc sur les pièces après les avoir fait bouillir, il se peut que votre eau ait une forte teneur en minéraux. Enlevez les résidus en essuyant les pièces avec un linge propre et laissez sécher à l'air.
- Il est recommandé d'utiliser de l'eau oxygénée pour faire bouillir les pièces afin d'empêcher la formation de calcaire au fil du temps, qui peut abîmer vos pièces.

Informations

Si vous utilisez un lave-vaisselle, les pièces peuvent se décolorer. Ce phénomène n'a aucune conséquence sur le fonctionnement des pièces.

Procédure : voir les instructions détaillées sur la page suivante.

Avant la première utilisation, retirez et jetez l'enveloppe de protection de la tétérelle ( 6-01). Lavez et désinfectez les pièces du tire-lait et les biberons en respectant les étapes 1 à 4 ci-dessous. Lavez les pièces de votre tire-lait et les biberons **après chaque utilisation** et désinfectez les pièces **une fois par jour** après les avoir lavées.


1. Démontage

Voir la figure  1 sur le rabat.

- i. Démontez le tire-lait en pièces distinctes (tétérelle, connecteur, poignée, valve et biberon).
- ii. Retirez le diaphragme de la poignée et sortez la tige.
- iii. Retirez la membrane de la valve.
- iv. Séparez le biberon, le couvercle et le support de biberon.

2. Lavage

Rincez et lavez à la main

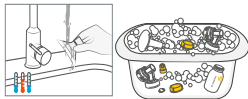

- i. Rincez les pièces démontées à l'eau froide (environ 20 °C).
- ii. Nettoyez abondamment ces pièces à l'eau savonneuse et chaude (environ 30 °C). Utilisez un liquide vaisselle dégraissant classique.
- iii. Rincez les pièces à l'eau froide pendant 10 à 15 secondes (env. 20 °C).

ou

Lavez au lave-vaisselle



Placez les pièces démontées dans le panier supérieur ou dans le bac à couverts. Utilisez des pastilles pour lave-vaisselle classiques.

3. Désinfection (avant la première utilisation, puis une fois par jour)

Désinfection à la casserole



Recouvrez d'eau toutes les pièces démontées et lavées, puis portez à ébullition pendant au moins 5 minutes.

ou

Désinfection au four à micro-ondes



(sauf pour la poignée)

Utilisez les sachets Quick Clean* dans le four à micro-ondes conformément aux instructions présentes sur les sachets.

*Consultez le site Internet ou les revendeurs Medela pour connaître la disponibilité du produit dans votre pays.

4. Séchage

Laissez sécher à l'air libre sur un linge propre ou sur un essuie-tout. Rangez les pièces sèches dans un espace propre. Ne stockez pas de pièces humides dans une boîte ou un sac hermétique. Il est important que toute l'humidité résiduelle sèche.

6. Préparation à la séance d'expression

Utilisez uniquement des pièces propres et sèches pour l'assemblage. Consultez le **chapitre 5** pour le nettoyage.

ATTENTION

Pour éviter toute contamination de votre lait :

- Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher les pièces du tire-lait et vos seins.
- Séchez-vous les mains à l'aide d'une serviette parfaitement propre ou d'un essuie-tout à usage unique.
- Évitez de toucher l'intérieur des biberons et des couvercles.

Pour vous assurer que le dispositif fonctionne correctement en toute sécurité :

- Avant utilisation, vérifiez que les composants du tire-lait ne présentent aucun signe d'usure ou d'endommagement. Remplacez-les si nécessaire.
- Vérifiez toujours la propreté de toutes les pièces avant usage. Si le tire-lait est sale, nettoyez-le conformément au **chapitre 5**.

AVIS




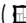
Joint torique
Tige

Le joint torique assure l'étanchéité de la connexion entre la poignée et le connecteur. Cela est nécessaire pour créer un vide. Vérifiez que le joint torique blanc est bien inséré dans sa rainure sur la tige.

S'il est absent ou défectueux, contactez le service client de Medela.


6.1 Choix de la taille de téterelle





Voir la figure  sur les rabats.

1. Pour choisir la bonne taille, mesurez le diamètre de vos mamelons ().
2. Choisissez la taille de téterelle légèrement supérieure au diamètre de votre mamelon ().


Pour en savoir plus sur la taille de téterelle, consultez le site www.medela.fr.





6.2 Assemblage du connecteur et de la téterelle

Voir la figure  sur les rabats.

1.  Insérez doucement la téterelle dans l'ouverture supérieure du connecteur.
→ Choisissez la taille de téterelle qui correspond le mieux à vos besoins.
2.  Placez la membrane de la valve à l'horizontale sur la valve. Appuyez fermement sur la partie saillante de la membrane afin de l'enclencher dans le plus petit orifice de la valve.
→ La membrane doit être positionnée bien à plat sur la valve.
3.  Insérez la valve sur la partie inférieure du connecteur.
→ La valve doit être positionnée latéralement, comme illustré.
4.  Vissez le biberon sur le connecteur.



6.3 Assemblage de la poignée

Voir la figure  3 sur les rabats.

1.  3-01 Insérez la tige (avec le joint torique) dans l'orifice situé sur la face supérieure du diaphragme.
2.  3-02 Assurez-vous que la base ovale de la tige est correctement positionnée dans le diaphragme.
3.  3-03 Positionnez le diaphragme sur la poignée du tire-lait. Prenez garde au sens (la rainure du diaphragme s'engage sur la languette de la poignée) et appuyez fermement tout autour pour assurer l'étanchéité.
4.  3-04 Insérez la tige de la poignée dans l'orifice situé au-dessus du connecteur. Poussez jusqu'à ce que la tige soit bien enclenchée.

6.4 Positionnement de la tétérèlle

Voir la figure  4 sur les rabats.

1. Vous pouvez faire pivoter (360°) la tétérèlle ovale afin de la placer dans la position la plus confortable pour vous.
2.  4-01 Placez la tétérèlle sur le sein de sorte que le mamelon soit correctement centré dans l'embout.
3.  4-02 Maintenez la tétérèlle sur le sein à l'aide de votre pouce et de votre index. Soutenez votre sein avec la paume de votre main.
4. Commencez à exprimer votre lait comme indiqué à la **section 7.2**.

7. Fonctionnement de votre tire-lait

7.1 Imiter le rythme de bébé (2-Phase Expression)


Les bébés adoptent une succion à « deux vitesses ». Ils commencent par téter rapidement, puis ils adoptent un rythme de succion plus lent et profond lorsque le lait commence à s'écouler. La succion rapide stimule le réflexe d'éjection du lait et déclenche son écoulement ; la succion lente exprime le lait pour la phase d'alimentation.



La technologie 2-Phase Expression est une technologie d'expression à « deux vitesses » qui imite les rythmes naturels de succion du bébé. Le design de la poignée du tire-lait vous permet de commencer avec un rythme d'aspiration rapide : la **phase de stimulation**. Pour cela, actionnez rapidement la partie courte de la poignée. Lorsque vous voyez perler des gouttes de lait ou que vous sentez le lait arriver, vous pouvez passer en **phase d'expression** en actionnant lentement la partie la plus longue de la poignée.

7.2 Expression du lait maternel

ATTENTION

- Ne tenez pas le tire-lait par le biberon. Cela peut provoquer un engorgement et le blocage des canaux galactophores.
- Ne remplissez le biberon que jusqu'au marquage 150 ml.
- Contactez votre professionnel de santé ou une spécialiste en allaitement si vous n'exprimez que très peu de lait, voire pas du tout, ou si l'expression se révèle douloureuse.

Voir la figure  5 sur les rabats.

1.  5-01 Démarrez l'expression par la phase de stimulation : pressez la partie courte de la poignée. Des gouttes de lait y sont gravées. Appuyez et relâchez rapidement plusieurs fois jusqu'à ce que le lait commence à s'écouler.
2.  5-02 Lorsque le lait commence à s'écouler, passer en phase d'expression : appuyez ensuite sur la partie longue de la poignée. Vous créez ainsi un vide d'air qui va faciliter l'écoulement de lait. Vous contrôlez le niveau de vide par la vitesse des mouvements et la pression exercée sur la poignée. À vous de décider du rythme d'expression qui vous convient.
3. Arrêtez l'expression lorsque vous sentez que le lait ne s'écoule plus ou lorsque le biberon est plein.

7.3 Après l'expression

Conservez votre lait comme suit :

1. Dévissez le biberon du connecteur.
2. Utilisez le support de biberon pour éviter que celui-ci ne se renverse.
3. Fermez le biberon avec un couvercle.

8. Manipulation du lait maternel

8.1 Instructions de conservation

Instructions de conservation pour le lait maternel fraîchement exprimé
(pour les bébés en bonne santé nés à terme)

Température ambiante 16 à 25 °C (60 à 77 °F)	Réfrigérateur 4 °C (39 °F) ou plus froid	Congélateur -18 °C (0 °F) ou plus froid	Lait maternel décongelé dans le réfrigérateur
Bon pendant 4 heures	Bon pendant 3 jours	Bon pendant 6 mois	À température ambiante : bon pendant 2 heures
*Jusqu'à 6 heures pour du lait exprimé dans des conditions hygiéniques optimales	*Jusqu'à 5 jours pour du lait exprimé dans des conditions hygiéniques optimales	*Jusqu'à 9 mois pour du lait exprimé dans des conditions hygiéniques optimales	Réfrigérateur : pendant max. 24 heures Ne pas recongeler !

*Instructions pour exprimer le lait maternel dans des conditions hygiéniques optimales : Avant d'exprimer du lait maternel, se laver les mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Les pièces du tire-lait, les biberons, ainsi que la zone d'expression doivent être propres. Les seins et mamelons n'ont pas besoin d'être lavés avant l'expression.

- Ces règles de conservation et de décongelation du lait maternel sont des recommandations. Contactez votre consultante en lactation ou spécialiste en allaitement pour obtenir plus d'informations.
- Conservez le lait maternel dans la partie la plus froide du réfrigérateur (idéalement au fond du frigo au-dessus du bac à légumes).

8.2 Congélation

AVIS

- La répétition de cycles de congélation/décongelation détruit la composition du lait. Ne recongelez donc jamais votre lait maternel.
- Congelez le lait maternel exprimé dans des biberons en plastique ou des sachets de conservation pour le lait maternel. Ne remplissez pas les biberons ou sachets à plus de 3/4 de leur capacité de façon à laisser de l'espace pour l'expansion éventuelle du lait.
- Inscrivez la date d'expression et le volume de lait exprimé sur les biberons ou sachets.
- Les biberons de recueil en plastique ainsi que ses différentes pièces peuvent être fragilisés par la congélation et risquent de casser en cas de chute.
- N'utilisez pas de lait maternel si les biberons ou les pièces présentent des signes d'endommagement.

8.3 Décongélation

ATTENTION

Ne décongelez pas et ne réchauffez pas le lait maternel au four à micro-ondes ou dans une casserole d'eau bouillante. Cela aide à préserver les composants importants et à prévenir les brûlures.

- Pour préserver les composants du lait maternel, laissez-le décongeler dans le réfrigérateur toute la nuit.
- Vous pouvez également passer le biberon ou le sachet sous l'eau tiède (37 °C/98,6 °F max.).

AVIS

Secouez délicatement le biberon ou le sachet afin d'homogénéiser les corps gras. Évitez de secouer vigoureusement ou d'agiter le lait.

9. Dépannage

En cas de dysfonctionnement de votre tire-lait, le tableau de dépannage vous permettra d'identifier son origine grâce à sa colonne « Problème », et ses instructions de résolution dans la colonne « Solution ».

Tableau de dépannage

Problème	Solution
L'aspiration est faible ou inexistante	Vérifiez la présence et le bon état du joint torique sur la tige. S'il est absent ou défectueux, contactez le service client de Medela. Assurez-vous que la tétérèlle est positionnée de façon hermétique sur le sein. Assurez-vous que la valve jaune et la membrane blanche soient propres et ne soient pas endommagées. Vérifiez que la membrane soit positionnée à plat sur la valve. Assurez-vous que la valve soit positionnée latéralement sur le connecteur. Vérifiez que les composants de la poignée soient assemblés correctement. Vérifiez toutes les connexions. Si le problème d'aspiration persiste, contactez le service client de Medela.
Le lait ne s'écoule pas	Assurez-vous que votre tire-lait soit correctement assemblé et que vous constatiez un vide d'air. Détendez-vous et faites 10-15 minutes de pause si l'expression n'est pas terminée après deux tentatives d'expressions consécutives. Contactez une consultante en lactation ou un spécialiste en allaitement si vous n'arrivez pas à exprimer votre lait.

Si le problème de votre tire-lait persiste ou si vous avez d'autres questions, contactez le service client de Medela. Pour en savoir plus, consultez le site www.medela.fr. Choisissez votre pays dans l'onglet « Contact ».

10. Accessoires

Les articles suivants sont vendus séparément :

- Tailles de tétérnelle PersonalFit Flex : S (21 mm), M (24 mm), L (27 mm), XL (30 mm)
- Biberon pour lait maternel, 150 ml, 250 ml
- Sachets de conservation pour lait maternel

Selon votre région, consultez les points de vente proches de chez vous ou les sites internet pour connaître la disponibilité produit.

11. Garantie

Consultez la Garantie internationale des articles Medela disponible sur le site www.medela.com pour en savoir davantage sur la portée de la garantie dont bénéficie cet article.

12. Mise au rebut

À la fin de sa vie utile, séparez les pièces de votre tire-lait et jetez-les selon la réglementation locale.

Téterelles, connecteur et accessoires

Les pièces sont en plastique respectueux de l'environnement que vous pouvez jeter avec les déchets ménagers. Recyclez-les ou jetez-les conformément à la réglementation locale.

13. Signification des symboles

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi














Symbole d'alerte générale de sécurité, souligne des informations relatives à la sécurité.



Lire et respecter le mode d'emploi.

Symboles figurant sur les pièces des articles et sur leur emballage.

	Identifie le fabricant.		Indique la date de fabrication.
	Indique le numéro de pièce de l'appareil.		Indique le numéro de lot/paquet.
	Lire et respecter le mode d'emploi.		L'emballage contient des produits destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément au règlement CE N°1935/2004.
	Conserver à l'abri de la pluie. Conserver au sec.		Indique que le matériau peut être recyclé selon les réglementations en vigueur.
	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil.		Indique que l'emballage est fabriqué en carton.
	Contient des produits fragiles. Manipuler avec soin.		

14. Réglementation internationale

14.1 Articles pour l'alimentation liquide des enfants

Les tétines et biberons destinés à l'alimentation de nourrissons respectent la norme européenne EN 14350.

15. Caractéristiques techniques

Matériaux en contact avec la peau ou le lait

- Téterelle : polypropylène, élastomère thermoplastique
- Connecteur, valve : polypropylène
- Diaphragme, membrane de la valve : silicone
- Biberon : polypropylène
- Couvercle : polypropylène

Toutes les pièces qui entrent en contact avec le lait maternel sont exemptes de BPA (bisphénol A).