

FRANÇAIS

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

Remarque : Reportez-vous également au visuel d'utilisation situé sur le sac de transport.

Utilisation prévue

Le sachet de conservation pour lait maternel de Medela est conçu pour conserver, transporter et réchauffer le lait maternel pour alimenter le nourrisson.

Recommandations importantes en matière de sécurité

- Le sachet de conservation pour lait maternel est un produit à usage unique. Il ne doit servir qu'une seule fois. Dans le cas contraire, il pourrait perdre ses propriétés mécaniques, chimiques et/ou biologiques. En outre, une contamination croisée pourrait survenir.
- Ne décongelez pas et ne réchauffez pas le lait maternel au four à micro-ondes ou dans une casserole d'eau bouillante afin d'éviter toute perte de vitamines, de minéraux et d'autres composants essentiels, et afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Ne remplissez pas le sachet au-delà de la graduation de 180 ml dans la mesure où le lait maternel prend du volume lors de la congélation

Hygiène

- Se laver soigneusement les mains au savon et à l'eau avant de toucher le sachet de conservation. Se sécher les mains à l'aide d'une serviette parfaitement propre ou d'un essuie-tout à usage unique.
- Évitez de toucher l'intérieur du sachet de conservation.

Matériau : PEBD (polyéthylène basse densité)/
PET (polytéréphtalate d'éthylène).

Recyclage : conformément aux prescriptions locales.