

# CANNABIS TEST URINAIRE

## Généralités

Le cannabis est un agent hallucinogène modifiant les perceptions sensorielles, la coordination des fonctions motrices et la mémoire. Toute action nécessitant l'attention devient donc à risques, en particulier la conduite d'un véhicule. Des études ont montré que les conducteurs ayant consommé du cannabis, dans les trois heures précédentes, avaient un risque d'accident plus élevé de type collision. Le Cannabis Test Urinaire de Medisur est un test rapide détectant la consommation de cannabis en 5 minutes et permettant de s'autocontrôler avant de prendre le volant d'un véhicule par exemple ou d'adapter son comportement de consommation.

Lorsqu'une personne consomme du cannabis, ses dérivés chimiques sont éliminés dans les urines. Ce sont ces dérivés que le Cannabis Test Urinaire de Medisur détecte.

Le Cannabis Test Urinaire de Medisur permet de tester les consommateurs occasionnels aussi bien que les consommateurs réguliers. Les premiers sont détectables sur une période de 3 à 10 jours. Les seconds le sont sur une période pouvant s'étendre à plusieurs semaines (jusqu'à 10 semaines). Cette possibilité de détecter la consommation de cannabis sur une période très étendue est l'avantage du test urinaire.

## Contenu de la boîte

La boîte contient une notice que vous devez lire et suivre attentivement pour obtenir un résultat fiable et deux sachets hermétiquement fermés, à n'ouvrir qu'au moment du test, et contenant : une cassette test, une pipette plastique à usage unique, une notice, un sachet desséchant. Ne pas ouvrir le sachet desséchant.

## Précautions d'emploi

**Veillez lire toutes les informations contenues dans cette notice avant d'effectuer le test.**

1. Ce test est destiné à un usage externe exclusivement. NE PAS AVALER.
2. Le test n'est interprétable que si le mode d'emploi est scrupuleusement respecté. Bien respecter les temps indiqués.
3. À conserver entre +2 °C et +30 °C. NE PAS CONGELER.
4. Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur l'étiquette et sur le sachet protecteur, ou si celui-ci est endommagé.
5. Ne pas réutiliser ce test.
6. Tenir hors de la portée des enfants.
7. Après usage, jeter tous les composants à la poubelle.

## Mode d'emploi

1. Prélever un peu d'urine dans un récipient propre (comme un gobelet en plastique par exemple), éviter le premier jet.
2. Déchirer le sachet aluminium (à l'endroit de l'encoche), sortir uniquement la cassette test, la poser sur une surface plane et jeter le sachet desséchant.
3. À l'aide de la pipette, prélever puis déposer 3 gouttes d'urine dans le puits échantillon en tenant la pipette à la verticale.
4. Lire le résultat 5 minutes après le dépôt d'urine dans la fenêtre de lecture. Ne pas interpréter au-delà de 10 minutes.

## QUESTIONS & RÉPONSES

### Comment fonctionne le Cannabis Test Urinaire de Medisur ?

Suite à la consommation de cannabis, le corps élimine certains de ses dérivés dans les urines. En utilisant des anticorps aptes à reconnaître ces dérivés, le Cannabis Test Urinaire de Medisur révèle leur présence. Si la concentration de ces dérivés est supérieure à 50ng/ml, le test est positif.

**Quand peut-on réaliser le test ?** Le test peut être réalisé sur un échantillon d'urine obtenu à tout moment de la journée.

**Dois-je observer un régime alimentaire particulier ?** L'ingestion d'une quantité non normale de liquide peut fausser le test. Si le sujet boit trop la veille du test, le test sera faussement négatif. Si le sujet ne boit pas assez la veille du test, le test sera faussement positif.

### Quelle est la durée de détection du cannabis dans les urines ?

Les urines d'un consommateur occasionnel seront positives 30 minutes après consommation pour une durée de 3 à 10 jours en général. L'urine d'un consommateur régulier peut, quant à elle, conserver les traces de la consommation de cannabis pendant plusieurs semaines.

**Peut-on obtenir des résultats erronés ?** Pour que le test soit fiable, les indications de la notice doivent être respectées scrupuleusement. La quantité et la qualité de l'urine prélevée seront décisives pour obtenir un résultat correct. En effet, le résultat peut être faussé si la cassette est mouillée avant le test ou si la quantité d'urine déposée dans le puits échantillon de la cassette n'est pas suffisante. La pipette en plastique fournie dans la boîte permet de s'assurer que le volume d'urine prélevé est correct.

**J'ai mis plus de 3 gouttes dans le puits. Obtiendrai-je un résultat précis ?** Oui, mais il est conseillé de respecter le volume recommandé (3 gouttes).

**J'ai mis moins de 3 gouttes dans le puits. Obtiendrai-je un résultat précis ?** Non. Si le volume d'urine est inférieur à 3 gouttes, le test peut être invalide.

**J'ai lu le résultat après 10 minutes. Obtiendrai-je un résultat**

**fiable ?** Non. Le résultat doit être lu 5 minutes après le dépôt des 3 gouttes d'urine dans le puits de la cassette du test, conformément aux indications d'utilisation du test données dans la notice. Au-delà de 10 minutes, l'interprétation du résultat du test n'est plus fiable.

**Comment interpréter le test si l'intensité des lignes T et C sont différentes ?** L'intensité des lignes n'a aucune importance pour la lecture du résultat. Les lignes doivent seulement être homogènes et continues.

**À quoi sert la ligne qui apparaît sous le repère C (Contrôle) ?**

Si la ligne sous le repère C apparaît, cela signifie que le test a fonctionné. Si la ligne sous le repère C n'apparaît pas, cela signifie que le test n'a pas fonctionné.

Il faut alors recommencer avec un nouveau test.

**Que faut-il faire si le résultat est positif ?** Si le résultat est positif, cela signifie que le test a détecté plus de 50 ng/ml de THC dans votre urine et donc que vous avez récemment consommé du cannabis. Vous ne devriez pas entreprendre une action nécessitant toute votre attention ou concentration comme la conduite d'un véhicule. Cessez de consommer et refaites un nouveau test plusieurs jours après. En cas de consommation régulière, le test peut rester positif pendant plusieurs semaines.

**Que faut-il faire si le résultat est négatif ?** Si le résultat est négatif, il n'y a aucune précaution particulière à prendre.

**Quelle est la fiabilité du Test Urinaire Cannabis de Medisur ?**


Le taux de fiabilité varie selon le seuil de détection.

Seuil de détection 11-nor- $\Delta^9$ -THC-9 COOH (ng/ml)	Fiabilité
50	>99%
62.5	>99%
75	>99%

## INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS


### POSITIF

Le test est positif lorsqu'une seule bande apparaît dans la fenêtre de lecture sous le repère C (Contrôle). Ce résultat signifie que l'urine contient des dérivés du cannabis en concentration supérieure au seuil au-dessus duquel l'attention nécessaire aux activités à risque est entravée. Vous ne devriez pas entreprendre une action nécessitant toute votre attention ou concentration comme la conduite d'un véhicule.

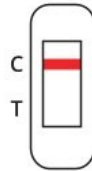


### NÉGATIF

Le test est négatif lorsque deux bandes apparaissent dans la fenêtre de lecture sous les repères T (Test) et C (Contrôle). Cela signifie que les urines ne contiennent pas de produits dérivés du cannabis, ou qu'elles en contiennent un niveau inférieur au seuil de 50 ng/ml. L'intensité de la ligne T peut être inférieure à l'intensité de la ligne C. Ceci ne modifie pas le résultat obtenu.

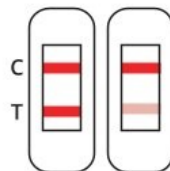

### INVALIDE

Le test est invalide si aucune bande n'apparaît ou lorsqu'une seule bande apparaît dans la fenêtre de lecture sous le repère T (Test). Le plus souvent, cela se produit lorsque les indications de la notice ne sont pas bien suivies. Lire attentivement le mode d'emploi et recommencer avec un nouveau Cannabis Test Urinaire de Medisur.

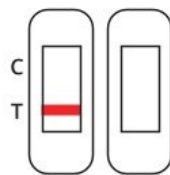

## INDEX DES SYMBOLES

Symboles	Signification	Symboles	Signification
	Test par sachet		Conserver au sec Ne pas congeler
	Ne pas réutiliser		Lire attentivement le mode d'emploi
	Numéro de lot		Utiliser avant le
REF	Numéro de référence		

### MEDISUR

Pôle Morandat  
1480 avenue d'Arménie  
13120 Gardanne

contact@medisur.fr  
+33 4 42 96 09 68  
www.medisur.fr

REF. CANNA\_URI02  
REV. 10/2023