

Melicare

miel médical • maman et bébé

Gel cicatrisant Notice d'utilisation tubes de 30g et de 5g

COMPOSITION

Le Gel cicatrisant Melicare est une composition brevetée contenant 100% de miels monofloraux de qualité médicale. De par ses ingrédients naturels, chaque lot peut varier en couleur et viscosité, et contenir de petits cristaux de sucre visibles. Ces variations n'affectent pas l'efficacité ni l'usage du produit.

MODE DE STÉRILISATION

La stérilisation par rayonnement gamma préserve les propriétés du miel et élimine tous les germes potentiels, permettant ainsi un usage en toute innocuité sur les plaies et une utilisation en toute sécurité pour le nourrisson.

PROPRIÉTÉS

La forte concentration en sucre dans le miel (près de 80% m/v) permet de limiter la colonisation bactérienne par effet osmotique, ce qui renforce la barrière protectrice générée par la forte viscosité du miel. Associé à un pansement occlusif, il génère un environnement humide, propice à la réparation tissulaire et favorisant une bonne cicatrisation. Il évite l'adhésion des pansements à la plaie et favorise leur remplacement sans traumatisme. Il diminue également les mauvaises odeurs.

INDICATIONS

Le Gel cicatrisant Melicare est destiné au traitement des plaies chirurgicales et du quotidien comme :

- Les crevasses du mamelon dues à l'allaitement
- Les plaies du périnée (épisiotomies et déchirures)
- Les sutures de césarienne
- Les plaies du quotidien de toute la famille.

CONSEILS D'UTILISATION

Le Gel cicatrisant Melicare est composé à 100% de miel stérile, il s'utilise en très fine couche pour une efficacité optimale et pour éviter une gêne liée à un potentiel effet collant. Le miel peut être retiré par simple rinçage à l'eau ou au sérum physiologique.

Pour le traitement des crevasses : Après chaque tétée, appliquer l'équivalent d'un volume de grain de riz de Gel cicatrisant Melicare sur le mamelon. Pour faciliter l'application du produit, mélanger avec une goutte de lait de fin de tétée. Protéger avec un support adapté (coque d'allaitement) pour maintenir le contact du produit sur la crevasse. Il est inutile d'enlever le produit avant la tétée suivante. Renouveler l'application jusqu'à cicatrisation de la crevasse.

Pour le traitement des césariennes : Appliquer une fine couche de Gel cicatrisant Melicare sur la suture de la césarienne. Réaliser un pansement occlusif. Renouveler l'application tous les 2 ou 3 jours. L'application de Gel cicatrisant Melicare peut être réalisée en présence d'agrafes ou de fil de suture.

Pour le traitement des épisiotomies ou déchirures : Appliquer une fine couche de Gel cicatrisant Melicare sur la plaie du périnée (épisiotomie ou déchirure), après chaque toilette, sur zone propre. Utiliser une serviette hygiénique en protection. Renouveler l'application 2 à 3 fois par jour.

En cas de réalisation d'un pansement, la fréquence de renouvellement du pansement doit être adaptée à chaque plaie par le patient ou par l'équipe médicale en charge du patient.

CONTRE INDICATION

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue au miel.

EFFETS INDÉSIRABLES

Dans certains cas, l'application sur la plaie peut provoquer une irritation, une sensation de picotement ou de brûlure. Ces sensations peuvent être temporaires ou permanentes. Si cela se produit, il est conseillé de renouveler le pansement en utilisant une compresse humide et, plus spécifiquement sur les crevasses, de diluer le produit avec une goutte de lait maternel. En cas de persistance des symptômes, consulter sa sage-femme ou son médecin.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Le Gel cicatrisant Melicare est destiné à un patient unique.
- Conserver précieusement la notice.
- Ne pas restériliser.
- Avant utilisation, vérifier la date de péremption qui se trouve sur l'étui cartonné et sur la soudure du tube sous la forme AAAA-MM, au-delà la stérilité du tube ne pourrait plus être assurée.
- Une fois ouvert, le tube 30g peut être utilisé pendant 90 jours et le tube 5g pendant 30 jours. Il est conseillé de noter la date d'ouverture sur le tube. Au-delà, la non-contamination bactérienne ne peut être assurée.
- En cas de salissure, nettoyer l'embout du tube et/ou le bouchon à l'aide d'une compresse et de sérum physiologique. Éliminer une petite quantité de produit avant réutilisation.
- Une petite quantité de miel peut s'écouler à l'ouverture du tube. Ce phénomène est normal : il n'indique en aucun cas sa détérioration. Afin d'éviter ce désagrément, il est conseillé de stocker le produit bouchon en haut.

LE GEL CICATRISANT MELICARE EST STÉRILE, PERMETTANT AINSI UN USAGE EN TOUTE SÉCURITÉ SUR LES PLAIES, ET UNE UTILISATION EN TOUTE INNOCUITÉ POUR LE NOURRISSON. EN AUCUN CAS, UN MIEL ALIMENTAIRE TRADITIONNEL DU COMMERCE NE PEUT ÊTRE UTILISÉ DE LA MÊME FAÇON.

STOCKAGE / MANIPULATION / ÉLIMINATION

- Conserver le produit à température ambiante.
- Conserver le produit à l'écart de produits chimiques.
- Ne pas utiliser en cas de détérioration du tube, sa stérilité ne pourrait plus être assurée.
- Le tube, l'opercule, la notice et l'étui en carton peuvent être placés après usage dans les bacs de tri.

DÉCLARATION D'INCIDENT

Toute anomalie constatée lors de l'utilisation du dispositif médical doit être signalée au fabricant. Vous avez également la possibilité de rapporter tout événement auprès des autorités de santé sur le site dédié : <https://ansm.sante.fr/>