

Melicare

silicone médical • maman et bébé

Patch médical siliconé

Enrichi en Vitamine E

TRAITEMENT DE LA CICATRICE DE CÉSARIENNE

Le Patch médical siliconé Melicare est un pansement siliconé auto-adhésif composé d'un film polyuréthane et d'une fine couche de gel de silicone. Ces composants ont été sélectionnés suivant leur biocompatibilité.

INGRÉDIENTS : Polydimethylsiloxane, tocapheryl acetate.

INDICATIONS

L'action mécanique du pansement siliconé auto-adhésif aplanit, atténue et améliore l'aspect de la cicatrice tout en limitant son évolution :

- En curatif pour les cicatrices hypertrophiques et chéloïdes anciennes ou récentes,
- En préventif pour les plaies fermées pour prévenir la formation de cicatrices chéloïdes et hypertrophiques.

Invisible et confortable, il est conçu pour bouger avec vous et se faire oublier jusqu'à 7 jours. Peut également être appliqué dès l'âge de 6 mois, sur toute cicatrice ancienne ou récente, de toute zone du corps hors muqueuse.

CONTRE-INDICATIONS

Le Patch médical siliconé Melicare ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Plaie ouverte
- Macération
- Brûlure
- Muqueuse.

En cas de réaction cutanée, interrompre le traitement et consulter votre médecin.

EFFETS SECONDAIRES

Aucun effet secondaire n'est connu à ce jour.

MODE D'APPLICATION

À appliquer dès fermeture complète de la cicatrice. Nettoyer et sécher quotidiennement la cicatrice. Patch repositionnable jusqu'à 7 jours max.



1 Si nécessaire, découper le pansement pour l'adapter à la taille de la cicatrice.



2 Retirer la protection bleue doucement en déroulant le patch au fur et à mesure sur la cicatrice.



3 À porter 24h/24, même sous la douche.

N'appliquer aucune crème ou gel sous le patch pour permettre sa parfaite adhésion.

SYMBÔLE	SIGNIFICATION	SYMBÔLE	SIGNIFICATION	SYMBÔLE	SIGNIFICATION
	Fabricant / Manufacturer		Distributeur / Distributor	CE	Marquage de conformité CE / Marking of european conformity
REF	Référence catalogue / Catalog number		Consulter les instructions d'emploi / Consult instructions for use	UDI	Identifiant unique du dispositif / Unique device identification
	Limitation de température / Temperature limitation	MD	Dispositif Médical / Medical device	02-2011	Date de première commercialisation / Date of first release
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Do not use if packaging is damaged	LOT	Numéro de lot / Lot number		Info-tri dév. notice, sachets, patchs à éliminer dans le bac de tri / Sort Locker, France ONLY
	Un seul patient, utilisation multiple / Single patient, multiple use		Date d'expiration / Expiry date		