


PROLONGATEURS SECUR-LOK™ MIC-KEY® ENFit™ UTILISATION

Recommandations concernant les manipulations du **prolongateur Secur-Lok™ MIC-KEY® ENFit™**.


1 BRANCHEMENT DU PROLONGATEUR SECUR-LOK™ ENFit™ SUR LE BOUTON MIC-KEY®

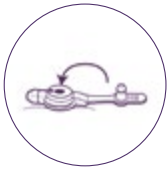

Ouvrir le capuchon.




Aligner les repères noirs.

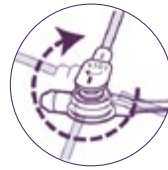

Faire une rotation de 3/4 de tour dans le sens horaire.

Remplacer le prolongateur toutes les semaines*.

2a ADMINISTRATION VIA LA SERINGUE ENFit™

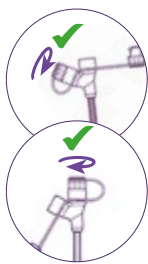

Veiller à bien fermer le site de connexion non utilisé du prolongateur.
Pour cela, visser le capuchon à l'intérieur du site non utilisé en effectuant une rotation de celui-ci afin de le verrouiller.



Connecter la seringue ENFit™ sur le site de connexion du prolongateur en vissant celle-ci dans le sens horaire.



Commencer l'administration.


2b ADMINISTRATION VIA LA TUBULURE DE NUTRITION ENFit™



Veiller à bien fermer le site de connexion latéral du prolongateur.
Pour cela, visser le capuchon à l'intérieur du site latéral en effectuant une rotation de celui-ci afin de le verrouiller.




Connecter la tubulure de nutrition ENFit™ sur le site droit du prolongateur en vissant celle-ci dans le sens horaire.

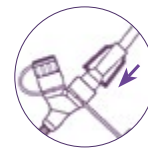

Commencer l'administration.


3 DÉBRANCHEMENT DU PROLONGATEUR SECUR-LOK™ ENFit™ SUR LE BOUTON MIC-KEY®

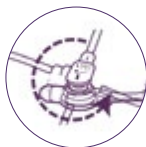


Une fois l'administration terminée, effectuer une rotation de 3/4 de tour.



Déconnecter le prolongateur.

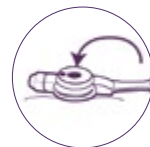

Refermer le capuchon du site de connexion du bouton.

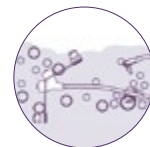

Après chaque utilisation, nettoyer le prolongateur à l'eau et au savon. Rincer et laisser-le sécher.

*Conformément aux recommandations de la SFNCM et à l'Arrêté du Journal Officiel du 17/11/09



Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

9, Avenue Mercure
31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00
+33 (0)5 62 57 69 01

aseptinmed.fr
SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE

