

INFORMATIONS PRATIQUES

Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.
Veuillez la lire attentivement.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'un MOUCHE BEBE et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Comment utiliser le MOUCHE BEBE ?
3. Comment entretenir et conserver le MOUCHE BEBE ?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'UN MOUCHE BÉBÉ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le MOUCHE BEBE est un produit qui permet de moucher et de nettoyer le nez du bébé par aspiration, avec efficacité et douceur. C'est un geste utile pour prévenir d'éventuelles infections ORL. Il se compose d'une poire souple de 30CC environ et d'un embout, sans BPA (bisphénol A) et sans phtalate pour le respect de la santé du bébé.

2. COMMENT UTILISER LE MOUCHE BÉBÉ ?

- A. En fonction de l'âge du bébé, l'allonger sur un lit ou l'asseoir sur un fauteuil.
- B. Si recommandé par un Professionnel de santé, pulvériser du sérum physiologique dans chaque narine avant d'utiliser le MOUCHE-BEBE, afin de ramollir les sécrétions.
- C. Presser la poire du MOUCHE-BEBE.
- D. Introduire l'embout dans la narine puis relâcher la pression de la poire.

3. COMMENT ENTREtenir ET CONSERVER LE MOUCHE BÉBÉ ?

Le produit doit être lavé avant la première utilisation.

Le produit doit être nettoyé après chaque emploi.

- A. Laver la Poire et l'embout séparément à l'eau tiède et savonneuse « entre 20° et 25° »,
- B. Laisser le produit sécher totalement à l'air libre, avec la tête de la poire vers le bas.

Le produit doit être stocké après chaque nettoyage.

- A. Remettre le produit dans sa boîte.
- B. Ranger le produit dans un endroit propre et sec, à température ambiante.

4. MISES EN GARDE

- Ne pas utiliser de solution désinfectante pour le nettoyage.
- Ne pas mettre aux micro-ondes.
- Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants sans supervision.
- Ne pas utiliser dans un autre emploi que celui pour lequel il est généralement destiné.
- Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries.
- La conduite d'un véhicule peut ne pas être appropriée avec l'utilisation de ce produit.
- Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, ni sur la voie publique. Ce produit est recyclable.

5. DURÉE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

En cas de non utilisation prolongée après une première utilisation, consulter votre Pharmacien.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018.

POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS

Pour toute question sur ce produit, contactez :
Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France
Service.conso@marvel.fr
02 38 86 04 64

MARVEL

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être