

OLIVAFIX[®]

GOLD

FR CRÈME ADHÉSIVE DENTAIRE
Mode d'emploi

Contient 30% d'huile d'olive biologique. Approche révolutionnaire et saine. Pas d'huiles minérales. *Tenue jusqu'à 24 heures pour prothèse supérieure complète et maintien extra-ferme pour les prothèses dentaires inférieures. L'application d'une crème adhésive dentaire implique son absorption dans l'organisme, par voie buccale. C'est pourquoi nous avons décidé de remplacer les huiles dérivées de produits pétrochimiques (pétrolatum, huile minérale et vaseline) couramment utilisées dans l'élaboration de crèmes adhésives dentaires commercialisées par une alternative plus saine : l'huile d'olive biologique. 0% d'huile minérale, 0% de silicone, 0% de colorant, 0% de conservateur, 0% de zinc, 0% de vaseline.

1. Nettoyez votre prothèse dentaire comme d'habitude avant d'appliquer la crème.

2. Retirez l'opercule métallique de l'embout du tube.

3. Appliquez la crème sur une **prothèse dentaire sèche** comme montré sur la photo. L'huile d'olive donne à la crème une consistance unique en comparaison avec les crèmes dentaires à base de pétrolatum. L'adaptation à la crème dentaire OlivaFix[®] Gold peut prendre jusqu'à une semaine voire plus si vous avez auparavant utilisé régulièrement une crème dentaire à base de pétrolatum.

IMPORTANT: N'hésitez pas à ajuster la quantité de crème afin d'obtenir un temps de maintien idéal. Les prothèses dentaires inférieures peuvent s'avérer plus difficiles à maintenir en place. Dans ce cas, appliquez de nouveau de la crème en fonction de vos besoins individuels.

4. Humidifiez soigneusement votre prothèse avec de l'eau **avant** de la mettre en bouche. Si votre bouche est sèche, buvez une gorgée d'eau pour humidifier vos gencives. L'humidité dans votre bouche et sur votre prothèse activera la crème.

Important : Appliquez de la crème sur une prothèse dentaire sèche et humidifiez la prothèse après l'application de crème.

5. Placez la prothèse dans votre bouche et serrez doucement les dents pendant quelques secondes. Attendez 5 minutes avant de boire ou de manger.

NB: Ne vous inquiétez pas si vous remarquez la présence de résidus huileux en pressant la crème hors du tube, ce phénomène est normal avec une crème à base d'huile naturelle. Refermez immédiatement le tube et malaxez-le pendant 10 à 30 secondes avant de le réutiliser.



Upper denture/Prothèse dentaire supérieure/Bovenprothese



Lower denture/Prothèse dentaire inférieure/Onderprothesen



Consult instructions for use/Consulter le mode d'emploi/De gebruiksaanwijzing raadplegen/Die Gebrauchsanweisung konsultieren/Consultare le istruzioni per l'uso/詳細使用說明



Keep dry/Garder au sec/Droog bewaren/Trocken lagern/Tenere asciutto/保持乾燥



Caution/Avertissement/Opgepas/Warnhinweise/Cautione/警告



Keep out of reach of children/Tenir hors de portée des enfants/Buiten bereik van kinderen bewaren/Für Kinder unzugänglich aufbewahren/Tenere fuori dalla portata dei bambini/存放於小孩碰觸不到的地方

Ingredients: Cellulose Gum, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Olea Europaea (Olive Fruit) Oil**, Hydrogenated Soybean Oil, Silica, Trihydroxystearin, Menthol, Lecithin, Citrus Limon Peel Oil, Menthyl Lactate. **Extra Virgin Organic Olive Oil

pH: 4-10

 **bonyf AG**
Heiligkreuz 16, FL-9490 Vaduz
Liechtenstein, EUROPE
www.bonyf.com



Swiss Made

44.700.09.T.O.0.109 - R25052021D-PT



Bon à savoir

Quand il est temps d'enlever votre appareil dentaire, la crème adhésive commencera à se desserrer naturellement et vous pourrez facilement retirer votre appareil. Cependant si vous rencontrez des difficultés pour retirer votre appareil, il est possible que les propriétés d'adhérence de la crème soient encore actives. Si c'est le cas, diminuez la quantité de crème que vous appliquez afin de réduire la durée d'adhérence. Si vous rencontrez encore ce problème pour retirer votre appareil, rincez-vous la bouche à l'eau tiède pendant 1 à 2 minutes en vérifiant que l'eau passe entre votre appareil et vos gencives. Pour éliminer les résidus de crème de votre appareil, brossez-le avec une brosse pour prothèse dentaire ou une brosse à dents avec de l'eau tiède. Pour éliminer les restants de crème de vos gencives, utilisez une serviette en papier sèche pour essuyer et éliminer les résidus.

CONSERVATION: Ne pas exposer le tube à une source de chaleur ni aux rayons directs du soleil. En raison de la formule naturelle de l'huile d'olive biologique, le produit peut être sensible à toute conservation incorrecte. Votre crème peut durcir dans le tube en cas d'exposition occasionnelle à des sources de chaleur. Si tel est le cas, mettez le tube dans un verre d'eau chaude et laissez-le tremper pendant environ 1 minute. Veillez à immerger entièrement le tube sans immerger l'embout. Retirez le tube et malaxez-le pendant environ 30 secondes, puis malaxez-le sous eau froide pendant 30 secondes. Ce procédé permet de ramollir la crème.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser si l'embout du tube est endommagé. Utiliser le produit suivant les instructions de la notice. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à un des ingrédients contenu dans ce produit. Si vous êtes sous traitement pouvant affecter votre gencive ou cavité buccale consultez votre dentiste avant d'utiliser le produit. En cas d'irritation de la gencive ou de douleurs, cesser l'utilisation et consultez votre dentiste si nécessaire. Douleur et inconfort peuvent provenir d'un appareil mal adapté ou cassé c'est pourquoi il est important de voir son dentiste régulièrement. Stocker dans un lieu sec et à température ambiante.

Le produit est disponible en boîte de 15g, 40g et 75g. Le poids de ce produit est inscrit sur la boîte.