

Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Entretien

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



Dispositif médical de classe I

Fabricant et/ou distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT_Kids_Memostab_160908_V0

ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana
Apdo. de correos 49 - C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona
Valencia - España (Spain)

LB-I-SME / LB52 - Édition : 12/2016.



Memostab®

L'attelle de cheville ergonomique.



Contenu/Description

Une attelle de cheville Memostab® :

- 1 coque latérale externe amovible (marquée "E").
- 1 coque latérale interne amovible (marquée "I").

Une notice du produit, à lire attentivement.

Indications

Traumatisme et entorse récente,
Entorse tibio-tarsienne grave, Laxité chronique.

Propriétés

- Traitement anti-bactérien (Thermy-Tex®).
- Sans latex.

Taillat

TAILLE	POINTURE
0	30 - 35



PLUS D'INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.smeurope.fr

Mise en place

A (figure 1)

- Disposez les 2 coques latérales amovibles dans les emplacements prévus à cet effet de chaque côté de l'attelle de cheville Memostab®, en prenant bien soin de placer la coque externe (marquée "E") vers l'extérieur du pied et la coque interne (marquée "I") vers l'intérieur du pied.
- Enfiler la chevillère en prenant soin de placer correctement les coques latérales sur les malléoles (interne et externe).
- Fixer la sangle élastique bleue afin de faciliter le maintien de l'attelle en position durant l'ajustement.

B (figure 2)

- Ajuster et fixer la sangle de contention située au niveau de la cheville **1**.
- Répéter la même opération pour la sangle de contention située au niveau du mollet **2**.

C (figure 3)

- Ajuster la sangle de talon afin qu'elle ne crée pas de gêne dans la chaussure.
- Puis, tirer et fixer simultanément, sur chaque côté de la chevillère, les deux sangles latérales.



Figure 1



Figure 2



Figure 3