



## **Ouvre-Bouteilles et Bocaux**



**VM992AA**

## **Notice d'Utilisation et d'Entretien**

## **INTRODUCTION**

Nous vous remercions d'avoir acheté cet ouvre-bouteilles et bouchons chez Aidapt. Celui-ci est fabriqué avec les meilleurs matériaux disponibles. Si vous l'utilisez correctement, il vous rendra service pendant de nombreuses années.

## **AVANT UTILISATION**

Retirez parfaitement l'emballage. Évitez d'utiliser un couteau ou tout instrument coupant qui pourrait endommager la surface du produit.

Vérifiez votre produit pour tout dommage visible. En cas de dommage ou de défaut suspect, veuillez ne pas utiliser votre produit et contactez votre fournisseur.

## **UTILISATION RECOMMANDÉE**

Cet accessoire est fabriqué à partir d'un matériau anti-dérapant. Il est très souple et peut être utilisé avec de nombreux types de bouchons de bouteilles aux dimensions variées.

## **CONSEILS D'UTILISATION**

Positionnez cet accessoire en forme de dôme sur le bouchon de la bouteille ou du flacon et tournez pour ouvrir ou serrer.

**Veuillez noter : Cet accessoire n'est pas efficace quand il est mouillé. Ne pas le soumettre à des températures excédant 50 degrés Celsius.**

## **NETTOYAGE**

Lorsqu'il est sale et poussiéreux, lavez-le avec de l'eau savonneuse tiède et laissez-le sécher.

## **ENTRETIEN**

Vérifiez régulièrement l'état de votre produit.

## **INFORMATIONS IMPORTANTES**

Les informations données dans cette notice d'utilisation ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un quelconque contrat ou engagement par Aidapt Bathrooms Limited Aidapt Wales ni ses agents ou filiales et aucune garantie n'est donnée concernant ces informations.

Nous vous remercions de faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit.

**Altai France (Altai Europe Ltd)**

**Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France**

**Tél: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: [altaieurope@orange.fr](mailto:altaieurope@orange.fr)**