

## Verrues

40 % d'acide salicylique

**Dispositif médical. Lire les conseils d'utilisation.  
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT TOUTE UTILISATION.**

### À quoi servent les patchs anti-verrue ?

Fortement concentrés en acide, les patchs anti-verrue sont des dispositifs médicaux conçus pour traiter les verrues vulgaires (*verruca vulgaris*) et plantaires (*verruca plantaris*). En provoquant un peeling chimique, l'acide salicylique stimule la régénération cellulaire et le renouvellement de la peau, révélant une nouvelle couche de peau saine tandis que la verrue va peu à peu disparaître.

- **NE PAS UTILISER** sur une peau sensible, sur le visage ou les parties génitales.
- **NE PAS UTILISER** en association avec d'autres traitements anti-verrues.
- **NE PAS UTILISER** sur une peau irritée, des coupures ou une peau saine sans verrue.
- **NE PAS UTILISER** chez l'enfant de moins de 4 ans.

### Conseils d'utilisation :

Retirer le patch du film transparent et l'appliquer directement sur la verrue. Si besoin, il peut être facilement redécoupé pour ne recouvrir que la verrue. Nous conseillons de laisser le patch toute la journée ou toute la nuit (entre 8 et 12 heures), puis de l'enlever et le jeter. Répéter le traitement avec un nouveau patch tous les jours ou toutes les nuits jusqu'à disparition complète de la verrue.

Durée de traitement recommandée : de 7 à 14 jours ou nuits ;

### Avant le traitement :

Les verrues forment généralement un noyau de tissu conjonctif et de vaisseaux sanguins recouvert de tissu épithélial.

### Pendant le traitement :

En se renouvelant, la peau peut s'épaissir et brunir à cause du sang présent sous la verrue. Cette réaction naturelle de la peau provoquée par l'acide salicylique signifie que la verrue est en train de guérir. Elle va disparaître et les couches supérieures de la peau laissent progressivement place à une peau saine.

Ce processus de renouvellement cutané peut prendre plusieurs semaines.

# Patchs

1. Traite et protège
2. Masque la verrue
3. Limite la contamination


### Précautions d'emploi :

- Si le patch est plus grand que la verrue, il peut être facilement redécoupé pour ne recouvrir que la verrue.
- Si la peau recouverte par le disque commence à s'irriter, ou devient rouge ou douloureuse, la nettoyer avec de l'eau et du savon et arrêter le traitement.
- En cas de rougeur ou d'irritation après une ou deux applications, arrêter le traitement.
- Sur les zones de peau fine ou sèche, appliquer le disque avec précaution.
- Pour les enfants, il est conseillé d'effectuer ce traitement sous le contrôle d'un adulte.
- La durée du traitement ne doit pas excéder 12 semaines. Si la verrue n'a pas disparu, nous recommandons d'interrompre le traitement et de consulter un médecin pour qu'il prescrive un traitement alternatif.
- En cas de doute sur le diagnostic, consulter un médecin.
- Ne pas réutiliser les patchs anti-verrue.
- Consulter un médecin avant d'utiliser ce produit en cas de grossesse, d'allaitement, de diabète ou de mauvaise circulation sanguine.
- Ne pas utiliser ce produit en cas d'allergie à l'acide salicylique.

### Composition :

15 disques 100 % coton contenant 40 % d'acide salicylique.

**Dernière révision de cette notice : février 2019**

 **Fabricant :** PHARMA SOURCE B.V.  
Reduitlaan 33 - 4814 DC Breda, the Netherlands.

**Distributeur :**  
Laboratoires NOVODEX PHARMA  
66, Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - FRANCE  
tél : 04. 73. 83. 80. 80

CE 0051

REF  
TF406

1900908v1 • 2000639\_1  
NOT exp verr patch 15/1902/19FV1