



NOUVEAU

Plaies aigües - Brûlures



Tulle au miel médical

Pour une cicatrisation rapide

Revamil®



**Évite les complications post-opératoires,
le retard de cicatrisation
et la formation de cicatrices pathologiques**



Accélère la cicatrisation

en stimulant l'activité fibroblastique et la captation des radicaux libres oxygénés

Protège contre les risques d'infections

par son activité antibactérienne puissante et à large spectre

**Apaise la douleur
et réduit l'inflammation**

par son activité antiradicalaire et antinociceptive

21 nœuds par pouce

- Compresses en polyacétate de cellulose à mailles serrées imprégnées de miel médical cicatrisant et stérilisées
- Pansement atraumatique à fort pouvoir absorbant non adhésif qui maintient l'humidité et installe un pH acide sur la plaie

Une efficacité démontrée dans le soin des plaies aiguës et brûlures

Pour quelles indications

Plaies chirurgicales



Dermabrasions sévères



Greffes



Brûlures du 2nd degré



Mode d'utilisation



1. Nettoyer la plaie à l'eau et du savon au sérum physiologique si besoin.



2. Appliquer la compresse directement sur la zone concernée.

Recouvrir d'une compresse de gaze ou non tissée.



3. Maintenir la compresse par une bande, un filet ou un jersey tubulure



4. Retirer la compresse et la remplacer tous les deux jours pendant 6 à 8 jours.