

SAUGELLA

Intilac - Rééquilibrant pH

GEL INTRAVAGINAL À BASE D'ACIDE LACTIQUE ET DE MALTODEXTRINES.

Quelle est l'importance de maintenir l'équilibre naturel du pH de l'écosystème vaginal ?

Dans des conditions normales, le pH vaginal est acide (entre 3,4 et 4,5). Ce pH acide facilite la présence et la multiplication de la flore vaginale normale (lactobacilles ou bacilles de Döderlein) et participe ainsi à la lutte de l'organisme contre les infections vaginales.

Pourtant, au quotidien, de nombreux facteurs peuvent perturber cet équilibre : par exemple la prise récente d'antibiotiques, une toilette intime avec des produits inadaptés ou une toilette trop agressive (pratique de douches vaginales...) mais également l'utilisation de tampons périodiques ou la prise de contraceptifs oraux. Dans d'autres situations, aucune cause n'est retrouvée.

Quels sont les signes d'un tel déséquilibre du pH vaginal ?

Un déséquilibre du pH vaginal, et par conséquent une altération de la flore vaginale, vont entraîner des pertes vaginales plus importantes, des mauvaises odeurs, des démangeaisons, des irritations et autres sensations désagréables.

Comment restaurer l'équilibre du pH vaginal ?

SAUGELLA Intilac - Rééquilibrant pH est un produit à base d'acide lactique, composant présent à l'état naturel dans le vagin et de maltodextrines, polysaccharides facilement assimilables par les lactobacilles de la flore vaginale. L'application du gel permet une correction immédiate du pH vaginal et facilite la multiplication naturelle des lactobacilles de la flore vaginale, contribuant ainsi à la restauration de la production physiologique d'acide lactique par ces bactéries.

Quand utiliser SAUGELLA Intilac - Rééquilibrant pH ?

L'utilisation de SAUGELLA Intilac - Rééquilibrant pH est recommandée en présence de signes d'un déséquilibre de la flore vaginale comme : des pertes vaginales plus abondantes, des odeurs désagréables, des démangeaisons, des irritations et autres sensations gênantes.

Comment utiliser SAUGELLA Intilac - Rééquilibrant pH ?

SAUGELLA Intilac - Rééquilibrant pH est un gel intravaginal qui se présente sous la forme d'un tube applicateur monodose.

1. Retirer l'embout de l'applicateur.
 2. En position allongée, introduire l'applicateur dans le vagin.
 3. Appuyer sur le tube pour administrer la totalité du produit.
- Appliquer 1 dose par jour pendant 7 jours, de préférence le soir au coucher.
En prévention : 1 dose par jour pendant 3 jours après les règles.
Le gel n'est pas gras et ne tache pas.

Composition : acide lactique ; maltodextrines ; glycérine ; eau purifiée ; hydroxypropylméthylcellulose ; sorbate de potassium ; méthylparahydroxybenzoate de sodium ; hydroxyde de sodium.


Mises en garde spéciales : Si les symptômes persistent après une utilisation de 7 jours ou si de nouveaux symptômes apparaissent, consulter votre médecin. Le gel contenu dans le tube unidose doit être utilisé à l'ouverture du tube. Ne pas réutiliser le produit restant éventuel une fois le tube ouvert ; réutiliser les produits unidoses peut provoquer des infections.

MAINTENIR LE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Effets indésirables : en début d'utilisation peuvent survenir quelques sensations passagères de brûlures légères.

Conserver le produit à une température ambiante.

LÉGENDE DES SYMBOLES

-  NON REUTILISABLE
-  UTILISER AVANT
-  N° DE LOT
-  FABRICANT
-  TEMPERATURE DE CONSERVATION
-  CONSULTER LA NOTICE AVANT UTILISATION

Date de révision : Janvier 2019



Meda Pharma S.p.A.
Via Valosa di Sopra, 9
20900 Monza - Italie