

# SAUGELLA

Ovules vaginaux  
contre la Vaginose bactérienne

**Des odeurs vaginales gênantes ?  
Des pertes anormales ?  
Un inconfort vaginal ?**

#### **Vous n'êtes pas seule ...**

Différents types de bactéries vivent naturellement dans le vagin; normalement, les bactéries présentes en plus grand nombre sont les bactéries lactiques. Les bactéries lactiques produisent de l'acide lactique qui maintient le pH normal du vagin à un niveau bas, protégeant contre les infections. Si le nombre de bactéries lactiques diminue et que le pH augmente, les « mauvaises » bactéries se développent. Cet état est connu sous le nom médical de vaginose bactérienne (VB). Les principaux symptômes associés à la VB sont des odeurs gênantes, des pertes anormales et un inconfort vaginal. La VB est une affection vaginale très courante. La VB peut être causée par de nombreux facteurs, notamment des règles prolongées, des douches vaginales fréquentes, l'utilisation de produits d'hygiène intime inappropriés et les rapports sexuels. La prise d'antibiotiques et l'utilisation d'un dispositif intra-utérin (DIU, communément appelé stérilet) peuvent également affecter l'équilibre du vagin. En cas d'altération des lactobacilles, une prolifération de bactéries pathogènes, notamment des bactéries anaérobies, prend le dessus, produisant des odeurs nauséabondes. Il est également important d'entretenir les sécrétions vaginales, afin de maintenir un microbiote vaginal normal et sain et de diminuer ainsi le risque d'infection à levures dans le vagin.

#### **Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne traite la VB de façon naturelle.**

Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne contient de l'acide lactique, qui neutralise efficacement les odeurs gênantes et restaure le pH normal du vagin. Il contient également du glycogène, qui apporte des nutriments aux bactéries lactiques. Avec un pH normal et des nutriments, les bactéries lactiques protectrices se développent et l'équilibre naturel du vagin est restauré, soulageant efficacement les pertes anormales et l'inconfort vaginal et empêchant le retour des odeurs gênantes. **Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne** imite ce que le corps fait naturellement et offre une alternative fiable aux antibiotiques. Les ovules pour le traitement de la VB ont fait la preuve de leur efficacité et vous permettent de prendre le contrôle de votre santé vaginale. Une femme sur trois souffre d'une vaginose bactérienne à un moment ou un autre de sa vie.

#### **Quand dois-je utiliser Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne ?**

**Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne** combat les odeurs gênantes, les pertes anormales et l'inconfort vaginal et restaure le pH à un niveau normal.

**Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne** peut également être utilisé pour restaurer et maintenir le pH naturel du vagin.


**Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne** convient particulièrement aux femmes qui se plaignent de manière récurrente de pertes malodorantes et d'irritations dans les voies génitales inférieures, car il n'entraîne pas la formation de bactéries résistantes. Si nécessaire, l'utilisation peut être prolongée et répétée.

#### **Posologie**

Pour le soulagement efficace des symptômes de la VB, pertes inhabituelles, odeurs gênantes et inconfort, utilisez 1 ovule par jour pendant 7 jours. Si vous constatez une réapparition des symptômes ou si vous suspectez que votre équilibre vaginal n'est pas ce qu'il devrait être, vous pouvez utiliser **Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne** pour aider à restaurer le pH normal et la flore vaginale. Répétez le traitement en utilisant 1 ovule par jour pendant 7 jours.

#### **Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne est facile à utiliser.**

Introduisez l'ovule au fond du vagin. Ne pas diviser l'ovule car celui-ci est à usage unique.

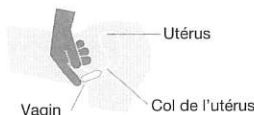

Il est préférable d'utiliser **Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne** au coucher.

#### **Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne est éprouvé et testé cliniquement.**

Les essais cliniques ont montré que la formulation de **Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne** est sûre et efficace pour restaurer et maintenir l'équilibre du pH vaginal.

#### **Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne peut être utilisé en toute sécurité.**

**Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne** est présenté sous forme d'ovules hygiéniques à usage unique. Il peut être utilisé pendant la grossesse et pendant les règles. Il vous est toutefois conseillé de consulter votre médecin si vous pensez avoir une infection vaginale au cours de votre grossesse.

**Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne** peut provoquer des picotements, une sensation de brûlure et des démangeaisons en cas de fissures dans le tissu vaginal. Ces symptômes sont temporaires. S'ils persistent, arrêtez l'utilisation et, si vous êtes inquiète, consultez un médecin.

#### **Quand devez-vous consulter votre médecin ?**

Contactez votre médecin si vos symptômes s'aggravent, si vous ressentez des douleurs, si l'inconfort ne cesse pas, si vos pertes sont teintées de sang ou si vos pertes surviennent pendant la ménopause. Il vous est conseillé de consulter votre médecin si vous pensez avoir une infection vaginale au cours de votre grossesse. Si vous ne constatez aucun soulagement des symptômes après avoir utilisé **Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne** selon les instructions, vous devez contacter votre médecin pour obtenir des conseils supplémentaires.

Veillez déclarer les incidents graves suspectés avec ce produit au fabricant et à l'Autorité Compétente de l'Etat Membre dans lequel l'utilisateur est établi car cela est très important pour la surveillance continue du rapport bénéfice/risque du produit.

#### **Quand ne faut-il pas utiliser Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne ?**

Évitez d'utiliser **Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne** si vous essayez de concevoir, car les ovules présentent un pH faible, ce qui peut rendre l'environnement moins favorable pour les spermatozoïdes.

Ingrédients : polyéthylène glycol (macrogols), acide lactique, hydroxyde de sodium, glycogène.

pH 3,6-4,2

Ne contient pas de conservateur. Formulé sans hormone.

Cette présentation contient 7 ovules à usage unique.

#### **Mises en garde**

Ne pas utiliser si les ovules sont endommagés.

Ne pas utiliser après la date de péremption des ovules.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des ingrédients.

Ne doit pas être utilisé par ou sur des enfants.

#### **Précautions d'emploi**

**Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne** peut être utilisé en toute sécurité pendant la grossesse ; il vous est toutefois conseillé de consulter votre médecin si vous pensez avoir une infection vaginale au cours de votre grossesse.

Évitez d'utiliser **Saugella Ovules vaginaux contre la Vaginose bactérienne** si vous essayez de concevoir, car les ovules présentent un pH faible, ce qui peut rendre l'environnement moins favorable pour les spermatozoïdes.

Ne pas utiliser comme contraceptif.

Fabricant:  
Rolf Kullgren AB,  
Ågatan 4, 646 30 Gnesta Suède

Distributeur:  
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE (COOPER),  
Place Lucien Auvert - 77020 Melun Cedex - France



25°C  
CE 0344

Séparez les éléments avant de trier