

Sensioptic®

Unidoses

Acide hyaluronique, Eau distillée de Bleuet, Eau distillée de Camomille

SENSIOPTIC® unidoses est une solution ophtalmique stérile, à base d'acide hyaluronique, au pH physiologique, indiquée en cas de sécheresse ou d'inconfort oculaire.

L'acide hyaluronique est utilisé pour son effet hydratant et lubrifiant, qui neutralise la sécheresse oculaire et crée un film qui protège l'endothélium cornéen des agents environnementaux. La formule contient également du chlorure de sodium et tampon phosphate, phosphate de sodium dibasique hepta-hydrate et phosphate de sodium monobasique di-hydrate pour garantir une solution physiologique, ainsi que des eaux distillées de camomille et de bleuet pour assurer l'action hydratante.

Indication :

SENSIOPTIC® unidoses est indiqué pour la sécheresse ou l'inconfort oculaire en cas de :

- facteurs environnementaux (climatisation, rayonnement solaire excessif, vent, fumée, pollution, eau de mer ou eau de piscine),
- sécheresse oculaire résultant d'une fatigue excessive due à une exposition prolongée aux écrans ou au syndrome de la sécheresse oculaire,
- utilisation prolongée des lentilles de contact.

Composition :

Hyaluronate de sodium 0,1%, eau distillée de bleuet, eau distillée de camomille, phosphate de sodium dibasique hepta-hydrate, phosphate de sodium monobasique di-hydrate, chlorure de sodium, eau pour les injections. Sans conservateur.

Mode d'emploi :

- Se laver et se sécher soigneusement les mains avant instillation.
- Ouvrir le sachet de protection en aluminium.
- Détacher l'unidose de la bandelette.
- Tourner le capuchon supérieur du récipient.
- Déposer le capuchon avec précaution sur une surface propre.
- Instiller 2 ou 3 gouttes dans chaque œil en pressant doucement le contenant.
- Après utilisation, fermer immédiatement l'unidose : le contenu restant doit être utilisé dans les 12 heures.
- Sensioptic® unidoses peut également être utilisé plusieurs fois par jour selon les besoins ou les conseils d'un médecin.
- Sensioptic® unidoses peut être utilisé avec les lentilles de contact.

Avertissement et précaution :

- Le produit est uniquement destiné à un usage ophtalmique.
- Le produit est destiné à un seul patient.
- Ne pas utiliser le produit si le contenant est endommagé ou n'est pas parfaitement fermé lorsque vous l'ouvrez pour la première fois.
- Ne pas utiliser si des particules sont visibles et/ou en cas de changement de couleur de la solution.
- Pendant l'instillation, ne pas toucher les yeux ou toute autre surface avec l'embout de l'unidose.
- Ne pas utiliser le produit après la date d'expiration indiquée sur l'emballage.
- Ne pas utiliser en cas d'incompatibilité connue avec l'un des ingrédients et/ou en cas d'allergie aux *Asteraceae*.
- Si vous souffrez de graves dommages de la cornée, les phosphates peuvent causer dans de très rares cas des taches nuageuses sur la cornée en raison de l'accumulation de calcium pendant le traitement.
- Aucune interaction avec des médicaments ou d'autres gouttes ophtalmiques n'est connue ; toutefois, laisser au moins 15 minutes entre les administrations de gouttes ophtalmiques.
- En cas d'effets secondaires pendant l'utilisation, interrompre le traitement et consulter un médecin.
- Éliminer le produit conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Garder hors de la portée et de la vue des enfants.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
- Pour usage externe, ne pas avaler.
- Il est nécessaire de signaler tout incident grave relatif au dispositif au fabricant et à l'autorité compétente (ANSM).

Effets Secondaires :

Aucun effet secondaire indésirable n'est connu jusqu'à présent.

Conditions de stockage :

Conserver à température ambiante (15 °C-25 °C).

L'unidose doit être utilisée dans les 12 heures suivant la première ouverture.

Conserver les unidoses inutilisées dans le sachet en aluminium à température ambiante.

Conditionnement :

10 unidoses rebouchables de 0,5 mL.


Validité :

Voir la date d'expiration indiquée sur la boîte et sur le récipient.

SENSIOPTIC is a trademark of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

© 2023 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates

Information médicale: +33 (0)4 67 12 30 30

 C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 – 40019
Sant'Agata Bolognese (BO) Italy



 0051

DT/01/DT/001

Révision : 02.01 - 10/2022
585E01-02.23 / P1FR01