

Soins et nutrition pour sonde de gastrostomie et de jéjunostomie



Veillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous concernant l'utilisation de ce dispositif médical. Si vous avez d'autres questions, consultez Asept InMed.

Cette notice s'applique pour les références Asept InMed suivantes : 202900 ; 202901 ; 202904 ; 202906 ; 202908

1. RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DU SET

1. Se laver les mains et respecter les règles d'hygiène.
2. Nettoyer la peau avec une compresse imprégnée de sérum.
3. Sécher la peau avec une compresse.
4. Tourner la sonde et effectuer une traction afin d'éviter toute adhérence.
5. Si besoin, positionner le pansement avec compresse absorbante.
6. Recouvrir la sonde avec du pansement film transparent si contact prolongé avec de l'eau.
7. Utiliser la seringue pour administrer des médicaments, hydrater le patient, ou rincer la sonde.

Utiliser une compresse pour toute manipulation.

Recommandations

- Administrer si possible les médicaments séparément de la nutrition.
- Avant et après chaque administration de nutriments ou de médicaments, rincer la sonde avec une seringue d'eau.
- Une fois la sonde rincée, refermer l'embout à l'aide du bouchon.
- Ne jamais laisser la stomie sans sonde ou bouton, l'orifice pourrait se refermer très vite.

2. MODALITÉ D'UTILISATION DU SERUM PHYSIOLOGIQUE Laboratoire GILBERT

Ne pas utiliser la même unidose pour les différentes

utilisations. A usage unique et individuel. Détacher une unidose et l'ouvrir en tournant la partie supérieure.

Composition :

Chlorure de sodium (NaCl) 0,9 g

Eau purifiée q.s.p. 100 ml

Pour le lavage des plaies :

Mode d'emploi :

Rincer la plaie en utilisant la dose complète et en prenant garde de ne pas mettre en contact l'unidose avec la plaie.

Précaution d'emploi :

Essuyer l'excédent de liquide uniquement sur la peau saine.

Conservation :

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Ne pas utiliser une unidose endommagée ou déjà ouverte au vu du risque de rapide contamination bactérienne.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'étui.

3. MODALITÉ D'UTILISATION DES COMPRESSES SYLAMED

Nettoyage et recouvrement des plaies.

Mode d'emploi :

1. Se laver les mains avec de l'eau et du savon.
2. Ouvrir le sachet selon le pictogramme sans déchirer.
3. Saisir une compresse avec une pince ou des gants.
4. Si nécessaire, l'imprégner de l'antiseptique choisi.
5. Nettoyer la plaie.
6. Si utilisé, rincer l'antiseptique avec une compresse neuve.

Précaution d'emploi :

1. A usage unique. Ne pas réutiliser
2. Vérifier l'intégrité du sachet avant usage
3. Protéger de l'humidité, de la lumière et de la chaleur
4. En cas de blessure majeure ou grave, demander un avis médical
5. Si la compresse provoque une irritation inattendue, demander un avis médical

4. MODALITÉ D'UTILISATION DES PANSEMENTS PHARMAPLAST

Protectfilm® est une gamme de pansements protecteurs transparents composés d'un film fin de polyuréthane résistant aux bactéries, aux virus et à l'eau, revêtu d'un adhésif hypoallergénique. Disponible avec système de pose sous la marque Protectfilm® Frame Style pour une manipulation plus facile.

Protectfilm® Adhesive border est un film protecteur transparent très respirant en polyuréthane avec un bord adhésif et une zone centrale sans adhésif afin d'éviter toute adhérence indésirable avec le lit de la plaie et permet de retirer le pansement sans douleur ni traumatisme

Précautions :

- La stérilité du pansement est garantie sauf si la pochette est endommagée ou a été ouverte avant utilisation.
- Réservé à un usage unique. La réutilisation est susceptible d'entraîner une contamination croisée.
- Ne doit pas être utilisé après la date d'expiration.
- Ne doit pas être utilisé chez les patients ayant une sensibilité à l'adhésif acrylique.
- Ne doit pas être utilisé sur les blessures infectées ou qui saignent sauf sous surveillance médicale.
- Une application répétée peut causer des dommages cutanés aux patients ayant une peau fine ou fragile.

Consignes d'utilisation :

1. Nettoyer la plaie et sécher soigneusement la peau avoisinante.
2. Retirer les protections du pansement.
3. Observer le site à travers le film et centrer le pansement sur la plaie, ne pas étirer pendant l'application.
4. Protectfilm® Frame Style ; retirer lentement le cadre tout en lissant les bords du pansement, puis lisser l'ensemble du pansement du centre vers les bords en exerçant une pression ferme pour améliorer l'adhérence.

5. MODALITÉ D'UTILISATION DES SERINGUES AVANOS

Indications :

La seringue entérale AVANOS* avec raccord compatible ENFit® est indiquée comme dispositif de distribution, de mesure et de transfert de liquides. Elle est utilisée pour le prélèvement ou l'administration de liquides de l'organisme par voie entérale. Elle est destinée à être utilisée dans un contexte clinique ou de soins à domicile par des cliniciens ou des profanes (sous la supervision d'un clinicien) de tout âge.

Mise en garde :

- Ne pas stériliser à l'autoclave la seringue entérale AVANOS* ni la réutiliser puisque cela augmente le risque de fuite ou d'infection biologique.
- Les capuchons des seringues (s'ils sont utilisés) présentent un risque d'étouffement. Garder hors de la portée des enfants.
- Ne pas modifier la seringue puisque cela peut entraîner un risque de fuite, de nutrition inadéquate ou de lésions au patient.
- Ne pas utiliser la seringue si l'embout est visiblement bloqué puisque cela peut entraîner une nutrition inadéquate ou une mauvaise administration des médicaments.
- Les seringues stériles sont stérilisées à l'aide d'oxyde d'éthylène. Ne pas stériliser de nouveau.
- Pour réduire au minimum le risque de blocage de l'embout, il est important de bien mélanger les suppléments et les additifs pour obtenir une texture homogène.

Contre-indications :

La seringue parentérale AVANOS® ne doit être raccordée qu'à des produits dotés d'un raccord mâle compatible ENFit™.

Ne pas utiliser ce dispositif avec des raccords de petit diamètre utilisés pour d'autres applications de soins de santé puisqu'il y a un risque que le branchement ne se fasse pas correctement.

Mode d'emploi :

1. Suivre les directives du médecin ou le protocole de l'hôpital pour ouvrir les emballages et en utiliser le contenu.

2. Toujours utiliser une technique qui réduit au minimum le risque d'infection. La seringue doit être branchée à un raccord compatible mâle ENFit™ au cours du remplissage et de l'élimination des bulles d'air pour réduire le risque d'inexactitude du volume de dosage.

3. Enfoncer complètement le piston avant de remplir la seringue. Aspirer le liquide (p. ex. la préparation pour nourrisson ou le médicament) dans la seringue. Pour assurer une mesure précise, utiliser le rebord du joint noir qui se trouve près de l'embout du piston. Ne pas remplir et tenter d'administrer lorsque le liquide dépasse le trait de graduation maximal.

4. Pour éliminer les bulles d'air, tenir la seringue, la pointe vers le haut. Tapoter le côté de la seringue pour faire remonter les bulles vers la pointe. Retirer légèrement le piston, puis pousser le piston pour expulser l'air dans le cylindre et l'embout. Répéter jusqu'à ce que toutes les bulles aient été éliminées, puis vérifier la dose une autre fois.

Remarque : L'utilisation d'un adaptateur de flacon ou d'une paille de prélèvement permet d'améliorer l'exactitude de la dose et de faciliter l'élimination des bulles d'air.

5. Avant l'administration, pour réduire au minimum le risque d'un blocage, il est important de bien mélanger les suppléments et les additifs pour obtenir une texture homogène.

6. Éliminer la seringue selon le protocole de l'hôpital et la réglementation locale ou nationale.

6. MODALITÉ D'UTILISATION DU SPARADRAP PHARMAPLAST

Contre-indications :

- Ne pas utiliser sur une plaie infectée sauf sous surveillance médicale
- Ne pas utiliser en cas de sensibilité au produit ou à l'adhésif

Précautions :

- Ne pas réutiliser la même pièce et l'éliminer comme produit contaminé
- En cas de gonflement, desserrer et refixer ou remplacer le ruban
- Ne pas utiliser sur les bébés ou la peau fragile

7. CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

Les sets doivent être conservés, stockés et transportés à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

8. ELIMINATION

Les composants usagés/contaminés doivent être éliminés dans le circuit des déchets médicaux.

9. CONDITIONNEMENT ET STÉRILISATION

Les composants sont conditionnés sous simple emballage à l'unité et stérilisés à l'oxyde d'éthylène ou avec des techniques aseptisées. Les composants ne peuvent être re-stérilisés.

Durée de péremption : reportée sur le conditionnement du set.

10. PICTOGRAMMES

	Fabricant
	Représentation autorisée dans la communauté Européenne
	Date de fabrication
	Date de péremption
	Numéro de lot
	Stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène
	Stérilisé avec des techniques aseptisées
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Conserver à l'abri de l'humidité
	Conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Limite de température
	A usage unique
	Consulter la notice d'utilisation
	Attention
	Référence catalogue
	Conforme aux exigences de la Directive 93 / 42 / CEE

11. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Date de création de la notice : 09/2020 (référence Notic-269 version 14).
Références 202900 ; 202901 ; 202904 ; 202906 ; 202908: Set de soins quotidiens de gastrostomie et jéjunostomie.

Si vous avez d'autres questions ou avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

 **ASEPT INMED**

9, Avenue Mercure 31130 Quint
Fonsegrives France

Tel : +33(0)5 62 57 69 00 Fax : +33(0)5
62 57 69 01

www.aseptinmed.fr