

# Les atouts de la gamme sigvaris

## ► Efficace :

- Pression dégressive tout au long de la jambe.
- Possibilité de couvrir toutes les morphologies\*.

## ► Confortable et facile à enfiler :

- Forme anatomique intégrée dès la conception du produit.
- Bande auto-fixante qui présente une bonne tolérance cutanée<sup>(1)</sup>.



BANDE AUTO-FIXANTE  
SENSINNOV<sup>®</sup>

## ► Un large choix de produits pour chaque situation de vie.

\*avec les gammes ESSENTIEL Semi-transparent et ESSENTIEL Microfibre

## LA COMPRESSION COMMENT ÇA MARCHE ?

La compression médicale est le traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques<sup>(2)</sup>.

Les produits de compression médicale (chaussettes, bas et collants) sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur.

► Les conditions d'utilisation et de renouvellement sont à demander à votre prescripteur (médecin, infirmier etc.)

<sup>(1)</sup> Bande auto-fixante : bonne tolérance cutanée chez 90% de volontaires. Étude CERT, CHU Saint-Jacques de Besançon auprès de 30 personnes - 2008

<sup>(2)</sup> HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel. Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010.

<sup>(3)</sup> Adaptation aux pieds déformés : Rapport Chaussette et pied sensible : étude d'adaptabilité - novembre 2024

<sup>(4)</sup> Adaptation au pied du patient diabétique : réduction des zones de surpression et frottement au niveau du pied : Construction zone pied en 3 zones / Pointe longue couvrant les zones sensibles / Absence de couture à la pointe pour protéger les orteils / Fil à faible de coefficient de frottement (fil de PTFE) dans pointe et talon.

## Chaussettes Pieds Sensibles

- Chaussette adaptée aux fragilités des pieds du patient diabétique<sup>(4)</sup> et aux particularités morphologiques des pieds ayant une déformation<sup>(3)</sup> type Hallux Valgus, Orteils en griffe et autres.



Facile à enfiler\*



Adaptation morphologique\*



Très doux\*

\*Facile à enfiler : Note satisfaction "facilité d'enfilage" = 100%

Essai au porter interne réalisé par Sigvaris, auprès de 22 femmes et 17 hommes - novembre 2024.

\*Adaptation morphologique : système de taillage avec 5 tailles et 3 hauteurs / 3 plages de pointures. Couverture de taillage chaussette Femme = 87% ; chaussette Homme = 91%. Corrélation tour de cheville / tour de mollet sur la base de l'analyse des données IFTH 2012.

\*Douceur : note 8/10 - Analyse sensorielle tactile réalisée par Sigvaris sur un panel interne de 12 experts - Juillet 2024.

## POUR ENTREtenir VOTRE PRODUIT



Lavez en machine,  
programme délicat  
à 30°C.



N'utilisez pas  
d'assouplissant.



Séchez loin  
de toute source  
de chaleur.

- Pour prolonger la vie de vos produits, utilisez un filet de lavage.


## Nos recommandations

- Lavez les produits avant la première utilisation et quotidiennement.
- N'utilisez pas les produits sur une peau lésée ou sur des plaies ouvertes.
- Une prise de mesures - à chaque délivrance - par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale.
- Les produits doivent être enfilés de préférence dès le matin sur une peau propre et sèche.
- Si vous utilisez une crème pour les pieds, attendez la pénétration complète de la crème avant la mise en place du produit.
- Privilégiez l'utilisation de crème hydratante avant le coucher plutôt que le matin avant l'enfilage des produits car elle peut les endommager.
- Utilisez des chaussures adaptées à vos pieds, demandez conseil à votre podologue.
- N'utilisez pas de sous couche non compressive qui pourrait générer des plis.
- Ne réalisez pas de modifications sur le produit.

## POUR ENFILER VOTRE PRODUIT




1 Introduisez la main à l'intérieur de votre produit et pincez le talon.

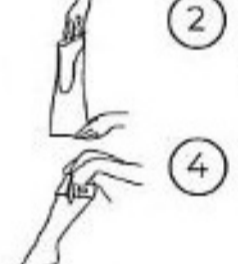

2 Retournez votre produit jusqu'à hauteur du talon.



3 Introduisez votre pied dans le produit en positionnant correctement le talon.

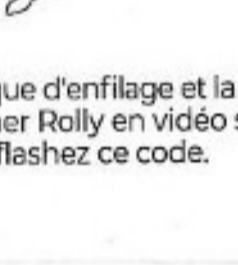

4 Déroulez le produit sur vos jambes.



Retrouvez notre technique d'enfilage et la présentation du produit Doff n'Donner Rolly en vidéo sur notre site [www.sigvaris.com](http://www.sigvaris.com) ou flashez ce code.

## LES TRUCS EN +

**PENSEZ-Y !** Massez vos jambes de bas en haut, afin de bien répartir le textile et favoriser le retour veineux. Bien en place, votre produit est plus efficace !

**Doff n'Donner Rolly**, une solution unique d'aide à l'enfilage et au retrait des produits. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Retrouvez la présentation du produit Doff n'Donner Rolly en vidéo sur notre site [www.sigvaris.com](http://www.sigvaris.com)



## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, d'insuffisance cardiaque décompensée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.

En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé.

En cas de lésion, consultez rapidement votre médecin.

Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Privilégiez un port avec chaussons ou chaussures : la présence d'un fil anti-frottement dans la pointe et le talon peut favoriser des glissades lors d'un port sans chaussures.

## INDICATIONS

- **Bas de compression médicale entre 15,1 et 20 mmHg (entre 20,1 et 27 hPa, classe II)**
- Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte chirurgical (en association avec un traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications) ou médical (hors accident vasculaire cérébral) chez les patients en décubitus prolongé.
- Varices de plus de 3 mm (C2).
- Après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne).
- Prévention de la thrombose veineuse en cas d'intervention chirurgicale à risque thromboembolique veineux (la compression est utile en association au traitement anticoagulant, ou seule lorsque ce traitement est contre-indiqué).
- Prévention de la thrombose veineuse dans les situations à risque (infections avec fièvre prolongée, cancers à risque de thrombose, insuffisances cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

## CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

Les chaussettes de compression médicale Sigvaris Spécialiste Pieds Sensibles de classe de compression 2 sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Lisez attentivement la notice d'utilisation.  
Demandez conseil à votre professionnel de santé.

\*Bas de compression médicale Sigvaris et Dynaven, fabriqués en France.



UKRP : SIGVARIS BRITAIN LTD,  
1 Imperial Court,  
Magellan Close,  
Andover SP10 5NT

SIGVARIS  
GROUP

© Copyright février 2025 by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert France.

Sigvaris, SIGVARIS GROUP and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

SIGVARIS - ZI Sud d'Andrézieux - rue B. Thimonnier  
42170 St-Just St-Rambert - France



Produit fabriqué sous Système de Management de la Qualité certifié AFAQ ISO 13485