


# OPSITE<sup>®</sup> FLEXIFIX

Film adhésif transparent en rouleau perméable à la vapeur d'eau

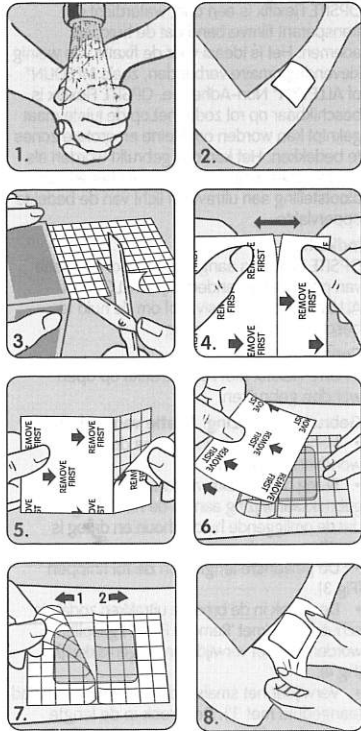

## Description

OPSITE Flexifix est un film fin, transparent, imperméable à l'eau et qui laisse la peau respirer. C'est le moyen idéal pour fixer des pansements primaires peu adhérents tels que MELOLIN<sup>®</sup> ou ALLEVYN<sup>®</sup> Non-Adhesive. OPSITE Flexifix est disponible en rouleau à couper à la taille appropriée pour couvrir de petites ou de grandes zones. Il peut également être utilisé en protection de la peau. OPSITE Flexifix minimise l'exposition de la zone recouverte aux rayons ultraviolets.

## Indications

OPSITE Flexifix est indiqué pour la fixation de pansements primaires tels que MELOLIN ou ALLEVYN Non-Adhesive, ou pour la protection de la peau contre les frottements.

## Contre-indication

Ne pas utiliser OPSITE Flexifix directement sur les plaies ouvertes.

## Mode d'emploi: fixation de pansements primaires

- Se laver les mains avant et après les soins (Fig 1).
- Appliquer le pansement primaire sur la peau selon les instructions du fabricant. S'assurer que la peau environnante est bien propre et sèche (Fig. 2).
- Couper la longueur désirée du rouleau d'OPSITE Flexifix (Fig 3).
- A l'une des extrémités, étirer le film OPSITE Flexifix en largeur à partir de la fente dans le papier protecteur imprimé « Remove First 1 » afin d'en faciliter son retrait (Fig 4).
- Retirer la plus petite partie du papier protecteur marqué 1. Plier la bande en longueur peut faciliter cette opération (Fig 5).
- Appliquer la partie adhésive sur le patient puis retirer la seconde partie du papier protecteur et appuyer légèrement sur les bords (Fig 6).
- Retirer la grille verte marquée « 3 » en soulevant un coin à partir du centre à l'endroit où le papier protecteur a été scindé. Répéter l'opération pour retirer l'autre partie (Fig. 7). Appuyer à nouveau légèrement sur les bords du film.
- Pour les pansements plus grands répéter l'application jusqu'à ce que le pansement soit entièrement fixé.

## Mode d'emploi: protection de la peau

- Se laver les mains avant et après l'application du film (Fig 1).
- Couper la longueur désirée du rouleau d'OPSITE Flexifix (Fig 3).
- A l'une des extrémités, étirer le film OPSITE Flexifix en largeur à partir de la fente dans le papier protecteur imprimé « Remove First 1 » afin d'en faciliter son retrait (Fig 4).
- Retirer la plus petite partie du papier protecteur marqué 1. Plier la bande en longueur peut faciliter cette opération (Fig 5).
- Appliquer la partie adhésive sur le patient puis retirer la seconde partie du papier protecteur et appuyer légèrement sur les bords (Fig 6).
- Retirer la grille verte marquée « 3 » en soulevant un coin à partir du centre à l'endroit où le papier protecteur a été scindé. Répéter l'opération pour retirer l'autre partie (Fig. 7). Appuyer à nouveau légèrement sur les bords du film.

## Retrait du film

- Pour retirer OPSITE Flexifix, soulever un coin du film tout en soutenant la peau. Étirer délicatement le film parallèlement à la peau (Fig. 8). Jeter de manière hygiénique après usage. Retirer en même temps que le pansement primaire ou au maximum après un délai de 7 jours.

## Précautions d'emploi

Comme tous les produits adhésifs, appliquer et enlever OPSITE Flexifix avec précaution sur les peaux sensibles ou fragiles. Des changements fréquents du pansement, en particulier chez les personnes à la peau fragile ou souffrant d'une affection dermatologique, peuvent entraîner des rougeurs ou des lésions de la peau. En présence de rougeurs ou de sensibilité, arrêter l'utilisation et consulter un professionnel de santé.

Si lors de l'utilisation du dispositif, vous pensez qu'un incident grave est survenu, veuillez le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

OPSITE FLEXIFIX est disponible dans les dimensions suivantes:  
5cm x 1m 10cm x 1m 15cm x 1m



Consulter le mode d'emploi  
Gebrauchsanweisung konsultieren  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Mise en garde  
Vorsicht  
Let op



Conservé dans un endroit sec (< 25 °C/77 °F)  
Trocken lagern (unter 25 °C)  
Bewaren op een droge plaats (minder dan 25 °C/77° F)



Conservé à l'abri de la lumière du soleil  
Vor Sonnenlicht schützen  
Beschermen tegen zonlicht



Dispositif médical  
Medizinprodukt  
Medisch hulpmiddel



Référence catalogue  
Katalognummer  
Catalogusnummer



Code de lot  
Chargencode  
Batchcode



Fabricant  
Hersteller  
Fabrikant



Date de fabrication  
Herstellungsdatum  
Fabricagedatum



Date de péremption  
Verfallsdatum  
Uiterste gebruiksdatum



Représentant autorisé  
Bevollmächtigter  
Gemachtigde



Point vert  
Grüner Punkt  
Greenpoint



Marquage CE  
CE-Kennzeichen  
CE-markering

