



Spengler

GÉNÉRAL


Description :

L'otoscope est un appareil médical classique en ORL. Cet otoscope de diagnostic classique SMARTLIGHT utilise la technologie de l'éclairage direct. Il est utilisé pour examiner la membrane tympanique et le canal auriculaire externe afin de diagnostiquer des pathologies de l'oreille externe et de l'oreille moyenne.

Spécifications techniques :

- Technologie XHL Xénon/Halogène améliorée.
- Fenêtre d'observation avec grossissement 3X.
- Ampoule #108 Xénon/Halogène (ampoule LED en accessoire).

COMMENT UTILISER CET APPAREIL ?

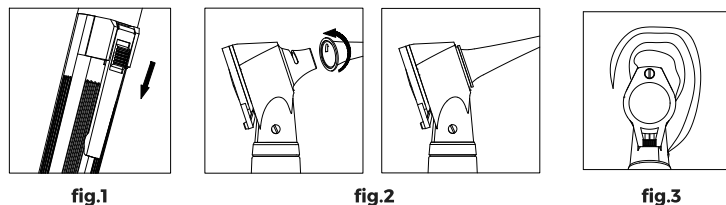


- Mettez l'appareil en marche (ou arrêtez-le) en poussant le bouton vers le bas (ou vers le haut) tel qu'illustré sur la **figure 1** ;
- Choisissez un embout adapté au canal auriculaire du patient, poussez-le sur la tête puis vissez l'embout dans le sens des aiguilles d'une montre, comme sur la **figure 2**. La taille de l'embout est généralement de 4 mm pour les adultes et de 2,4 mm pour les enfants ;
- Insérez l'otoscope sur lequel l'embout est monté dans le canal auriculaire du patient (**figure 3**), puis examinez par la fenêtre d'observation qui grossit 3X :

ATTENTION :

N'utilisez l'otoscope pour examiner l'oreille que lorsqu'un embout est fixé. Il est recommandé d'utiliser cet otoscope par intermittence : 1 minute de fonctionnement, 5 minutes d'arrêt.

ENTRETIEN

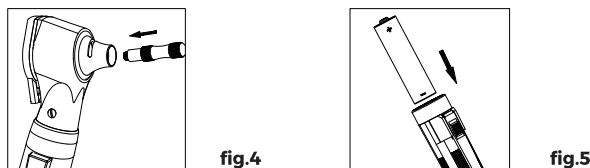

Remplacement des pièces :

1. Remplacement de l'ampoule (fig. 4)

Couper l'alimentation, puis utiliser un tournevis adapté, visser l'ancienne ampoule dans le support métallique et la remplacer par une nouvelle.

ATTENTION :

- **Utilisez l'ampoule spécifique (modèle : # 108) pour cet appareil.**
- **Lorsque l'ampoule grille, sa température reste élevée pendant environ 5 minutes. Il est donc recommandé d'attendre quelques minutes avant d'entreprendre le changement pour éviter les brûlures.**

2. Remplacement des piles (fig. 5)

- Séparez la tête de la poignée en la dévissant ;
- Retirez les piles AA usagées et remplacez-les par les nouvelles. Assurez-vous que l'anode des piles (+) est dans la direction de la tête de l'appareil ;
- Revissez la tête sur la poignée.

FR OTOSCOPE SMARTLIGHT FR



MODE D'EMPLOI

Mode d'emploi de l'otoscope destiné aux médecins. Cet otoscope est un appareil à alimentation interne. Veuillez lire attentivement cette brochure avant l'utilisation et la conserver à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

Symboles :



Fabricant



Représentant agréé au sein de la Communauté européenne.



Symbole pour le marquage des équipements électriques et électroniques selon la directive 2002/96/CE. L'appareil, les accessoires et l'emballage font l'objet d'une collecte sélective après l'utilisation. Veuillez respecter les arrêtés locaux ou les réglementations locales concernant l'élimination.



Partie appliquée de type B



Attention : consulter les documents joints

PRÉCAUTIONS

Il est important de toujours respecter les mesures de sécurité de base ainsi que les avertissements et les mises en garde de ce mode d'emploi afin d'assurer une utilisation appropriée du produit.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :

- N'utilisez pas l'appareil dans une atmosphère de gaz inflammable.
- Protégez cet appareil de l'eau et de l'humidité, ne le faites pas tomber et ne lui faites pas subir des chocs, ne l'exposez pas aux rayons du soleil, à des températures trop élevées ni à des flammes.
- Ne touchez pas la lentille directement avec les mains ou un objet dur.
- Utilisez le type d'ampoule spécifié dans ce mode d'emploi.
- Conservez le dispositif hors de la portée des bébés et des enfants laissés sans surveillance.
- Ne démontez pas l'appareil ou les composants, ne tentez pas non plus de les réparer.

ATTENTION :

- Les piles alcalines AA sont recommandées.
- Remplacez toutes les piles en même temps et n'utilisez pas de piles alcalines manganèse lithium, elles entraîneraient une réduction de la durée de vie de l'ampoule.
- Ne laissez pas les piles usagées dans la poignée.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- L'élimination des piles doit être conforme aux réglementations locales en vigueur.

Nettoyage et désinfection :

- Nettoyez la surface de l'appareil, tout en évitant la loupe (fenêtre d'observation) située dans la tête, au moins une fois par semaine, avec de l'alcool à 75 %. L'utilisation d'un détergent corrosif ou d'un produit de polissage est proscrite.
- Désinfectez les embouts de l'otoscope avec une vapeur saturée pendant 20 minutes à 134 °C (pour des spéculums auriculaires réutilisables).

ATTENTION :

N'immergez pas l'appareil, ne l'autoclavez pas, et empêchez toute introduction d'eau à l'intérieur de celui-ci !

CONTRÔLES DE SÉCURITÉ PÉRIODIQUES

Contrôle et entretien préventifs à réaliser, y compris la fréquence de l'entretien. Les contrôles de sécurité suivants doivent être réalisés au minimum chaque année par un individu qualifié qui possède la formation, les connaissances et l'expérience pratique requises pour la réalisation de ces tests.

- Vérifiez que l'appareil et les accessoires ne présentent aucune dégradation mécanique ou fonctionnelle.
- Assurez-vous de la lisibilité des étiquettes de sécurité pertinentes.
- Vérifiez que l'appareil fonctionne correctement, selon la description proposée dans le mode d'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Eclairage	Eclairage direct	
Luminance	24 Lumens	
Température de couleur	3050K ±5%	
Grossissement	3 x	
Tailles des embouts	2,4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm	
Ampoule	Modèle spécifié : #108 2,5 v, 0,75 A, 3050 K, 25 h	
Piles	2 piles alcalines AA	
Température de fonctionnement	Température	10 °C - 35 °C
	Humidité	30 % - 75 %
	Pression de l'air	700 hPa -1060 hPa
Stockage & Transport	Température	-20 °C - 70 °C
	Humidité	10 % - 90 % (sans condensation)
	Pression de l'air	500 hPa -1060 hPa
Garantie	2 ans (à compter de la date d'achat)	
Normes	DDM 93/42/CEE , Classe I IEC 60601:2012, IEC 60601-1-2:2014	

CLASSIFICATION ÉLECTRIQUE

Classification de l'appareil conformément aux normes de protection contre les décharges électriques : appareil à alimentation interne. Degré de protection contre les décharges électriques : TYPE B. Appareil non adapté pour une utilisation en présence d'un mélange inflammable : oui. Mode de fonctionnement : fonctionnement intermittent.

Distribué par SPENGLER SAS - 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix en Provence - FRANCE

HONSUN (NANTONG) CO., LTD.
No.8, Tongxing Road, Economic&Technical Development Area,
Nantong City, Jiangsu, P.R.China

SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY



Le fabricant se réserve le droit d'apporter au produit, sans notification préalable, toute modification technique susceptible de l'améliorer. Il se réserve également le droit de modifier ce mode d'emploi sans préavis.