



Stéthoscopes Notice d'utilisation

Le stéthoscope Holtex est un instrument d'auscultation médicale non invasive pour écouter les battements du cœur et les bruits pulmonaires, une fois le pavillon posé sur une peau saine, autour de la région thoracique externe.

Grâce à sa fonction d'amplification du son, il peut causer des dommages aux oreilles de l'utilisateur s'il est utilisé autrement que pour sa destination initiale de diagnostic médical. Ce dispositif est destiné à être utilisé uniquement par un professionnel de la santé.

Ne pas laisser sans surveillance un stéthoscope à portée des enfants.

Usage général : Les embouts auriculaires du stéthoscope sont anatomiquement réglables pour un meilleur ajustement, le confort et la transmission du son.

Un stéthoscope existe en pavillon à simple tête ou à pavillon double tête. Le pavillon à double tête dispose d'un côté, une membrane pour détecter les sons à haute fréquence, et un côté, avec une cloche pour détecter les sons de basse fréquence.

Selon la nécessité d'auscultation, il suffit de tourner la tige de valve acoustique pour sélectionner la partie appropriée du pavillon. Tenez le pavillon fermement contre l'emplacement d'auscultation souhaité sur région thoracique externe du patient. Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont solidement fixées et correctement connectés.

Nettoyage: Le stéthoscope doit être nettoyé soigneusement avant chaque utilisation. Utilisez un chiffon de coton propre, imbibé d'une solution isopropylique pour nettoyer toutes les parties sales.

Évitez l'exposition prolongée d'un tube acoustique à une chaleur excessive, au froid, solvants, humidité et huiles / lipides sécrétés par la peau humaine.

Fabriqué en Chine / Made in China



HONSUN (NANTONG) Co., Ltd
No.8 Tongxing Road - Economic and Technological -
Development Area - 226009 Nantong City P.R.CHINA



Shanghai international holding corp. GMBH (Europe)
Elffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Importé et distribué par/Imported and distributed by :
Holtex - 30 rue Jean de Guirmand,
13290 Aix en Provence - France - info@holtex.fr - www.holtex.fr

STÉTHOSCOPE IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, ROUGE, PAVILLON DOUBLE

RØf. DH7073_R

 Holtex



STÉTHOSCOPE IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, ROUGE, PAVILLON DOUBLE



RØf. DH7073_R

- Stéthoscope à pavillon double métallique adulte (Ø : 47/30 mm)
 - Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
 - Lyre en Aluminium incorporée à la tubulure
 - Existe en Noir, Bleu ou Rouge
 - Également disponible en pavillon simple pour adulte
- Livré avec 1 paire d'embouts

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661041000090

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 9018908400

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,350

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

31/03/2022 01:22 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la RØf. DH7073_R

STÉTHOSCOPE IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, NOIR, PAVILLON DOUBLE

RØf. DH7073_N

 Holtex



STÉTHOSCOPE IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, NOIR, PAVILLON DOUBLE



RØf. DH7073_N

- Stéthoscope à pavillon double métallique adulte (Ø : 47/30 mm)
 - Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
 - Lyre en Aluminium incorporée à la tubulure
 - Existe en Noir, Bleu ou Rouge
 - Également disponible en pavillon simple pour adulte
- Livré avec 1 paire d'embouts

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical : | Oui | Classe I | |
| Marquage : | CE | Code barres : | 3661041000083 |
| Garantie (mois) : | 12 | Code douanier : | 9018908400 |
| Stérile : | Non | | |
| MESURES | Unité nue | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | | Largeur conditionnement (cm) : | |
| Longueur unitaire (cm) : | | Longueur conditionnement (cm) : | |
| Hauteur unitaire (cm) : | | Hauteur conditionnement (cm) : | |
| Poids unitaire (kg) : | | Poids conditionnement (kg) : | 0,350 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | (N/A) | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | (N/A) | Humidité maxi : | (N/A) |

31/03/2022 01:22 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la RØf. DH7073_N

Informations et caractéristiques données titre indicatif et pouvant être sujettes modification.

IDEAL+ DOUBLE HEAD ADULT, BLUE

RØf. DH7073_B



IDEAL+ DOUBLE HEAD ADULT, BLUE



RØf. DH7073_B

| FEATURES | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------|
| Medical device | Yes | Classe I | |
| Marquage | CE | Barcode | 3661041000076 |
| Guarantee (month): | 12 | Customs Code | 9018908400 |
| Sterile | No | | |
| INFORMATIONS | Main unit | Packaged unit | |
| Width (cm) : | | Width packaging (cm): | 12,0 |
| Length (cm) : | | Length packaging (cm) : | 25,0 |
| Height (cm) : | | Height packaging (cm) : | 4,0 |
| Weight (kg) : | | Weight packaging (kg) : | 0,160 |
| SPECIFIC STORAGE CONDITION | | | |
| Temperature min | (N/A) | Temperature max | (N/A) |
| Humidity min | (N/A) | Humidity max | (N/A) |

02/12/2022 12:29 - This article is available on our website : www.gsh-med.fr with the following reference DH7073_B

All characteristics are given for information only and may be changed