

Fonctionnalités clés


- Utilisation prévue : L'autopiqueur est destiné à être utilisé par une seule personne, la lancette piquant la peau pour prélever un échantillon de sang.
- Dispositif de sécurité : lorsque le capuchon de réglage de la profondeur est ouvert, la gâchette est automatiquement relâchée pour éviter tout risque de piqûre accidentelle. La lancette jetable usagée s'éjecte d'une seule main en poussant le piston avec votre pouce (voir la figure de l'étape 9).
- Lorsque le capuchon est fermé, la fonction d'éjection de la lancette est verrouillée afin que la lancette ne puisse pas être retirée au moment de commencer le prélèvement.
- La stabilité de la structure de cet autopiqueur et sa conception avancée permettent de limiter au maximum les vibrations, la lancette assurant ainsi une piqûre précise et indolore. Cela réduit considérablement le stress des patients et leur permet de respecter la fréquence des autotests recommandée par leurs médecins.
- Un design élégant, fin et ergonomique, très pratique et intuitif, pour une prise en main facilitée dès la première utilisation.
- Indication claire de la profondeur de piqûre (exprimée par des numéros) : facile à lire et à régler.

Attention


- Veillez à ne pas vous piquer avec la lancette lorsque le capuchon de réglage de la profondeur est ouvert et la lancette est chargée.
- L'autopiqueur est destiné à être utilisé par une seule personne. Pour éviter toute contamination, n'utilisez pas l'autopiqueur sur plusieurs personnes.
- Pour des raisons de sécurité et afin d'éviter toute contamination croisée, jetez toujours les lancettes usagées dans un récipient approprié résistant à la perforation ou destiné aux déchets contaminés.
- Sauf instruction contraire du mode d'emploi, ne démontez en aucun cas l'autopiqueur.
- L'autopiqueur contient de petites pièces qui peuvent entraîner un risque d'étouffement chez les enfants. Veuillez le ranger correctement et le tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Lorsque le capuchon est fermé et l'autopiqueur est chargé, le dispositif de sécurité verrouille le capuchon. Pressez le bouton déclencheur avant d'ouvrir le capuchon.

Mode d'emploi


Lavez-vous les mains au savon et à l'eau chaude et séchez-les soigneusement. Le fait de réchauffer vos mains facilitera le prélèvement. Suivez les étapes ci-dessous. Chaque numéro d'étape fait référence à l'illustration numérotée correspondante.

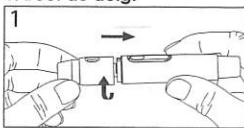1. Bout du doigt


1. Tenez le capuchon de réglage de la profondeur d'une main et le corps de l'autopiqueur de l'autre, puis retirez le capuchon en le tournant.

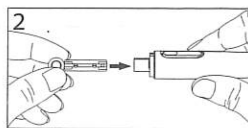


2. Insérez une lancette neuve fermement dans le porte-lancette.

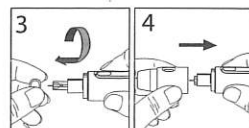


3. Tournez et retirez la protection de la pointe de la lancette jetable puis mettez-la de côté.

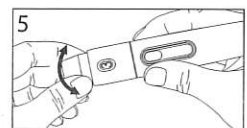


4. Remettez en place le capuchon de réglage de la profondeur.

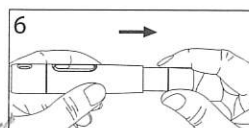


5. Régler la profondeur de piqûre en faisant tourner la partie supérieure du capuchon jusqu'à ce que le numéro correspondant à la profondeur souhaitée s'affiche dans la fenêtre. Les réglages sont basés sur le type de peau : « 1 et 2 » pour une peau souple ou fine, « 3 et 4 » pour une peau moyenne, « 5 et 6 » pour une peau épaisse ou calleuse.

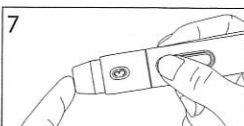


6. Tenez le corps de l'autopiqueur d'une main et tirez le piston de l'autre main. L'autopiqueur est alors chargé. Relâchez le piston ; il reprendra sa position initiale.

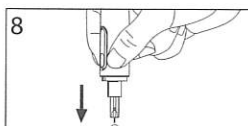


7. Placez l'autopiqueur contre la peau du bout du doigt puis appuyez sur le bouton déclencheur. Les meilleurs emplacements de prélèvement se trouvent sur le majeur ou l'annulaire.

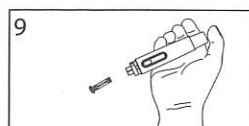

8. Retirez le capuchon de réglage de la profondeur. Insérez la pointe de la lancette dans la protection sans toucher la lancette jetable usagée.

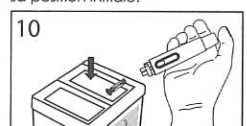


9. Tenez le corps de l'autopiqueur d'une main et poussez le piston avec le pouce pour éjecter la lancette jetable usagée.

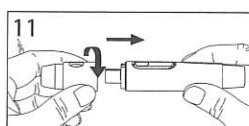

10. Jetez la lancette jetable dans un récipient approprié résistant à la perforation ou destiné aux déchets contaminés.

2. Paume ou avant-bras pour un emplacement de prélèvement alternatif (facultatif)

- (1) Choisissez le capuchon transparent et suivez les étapes 1 à 4.
- (2) Massez la zone de prélèvement sur la paume ou l'avant-bras pendant quelques secondes.
- (3) Immédiatement après avoir massé la zone de prélèvement, pressez et maintenez l'autopiqueur avec le capuchon transparent contre la peau.
- (4) Appuyez sur le bouton déclencheur.
- (5) Maintenez l'autopiqueur contre la paume ou l'avant-bras et augmentez progressivement la pression pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'échantillon de sang obtenu soit suffisant.
- (6) Suivez les étapes 8 à 10 pour jeter la lancette jetable usagée.

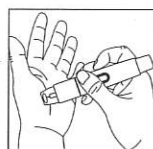**Nettoyage**

Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer l'extérieur de l'autopiqueur. Pour éviter toute formation de rouille sur le ressort interne, ne plongez pas l'autopiqueur dans l'eau et ne le nettoyez pas à l'eau. Avant d'utiliser l'autopiqueur, désinfectez le capuchon entrant en contact direct avec la peau afin d'éviter toute infection bactérienne ou virale ou toute infection croisée répétée.

Garantie

Votre autopiqueur est garanti contre tout défaut pendant cinq ans à compter de la date d'achat. Tout défaut matériel ou de fabrication fera l'objet d'une réparation ou d'un remplacement par un nouvel appareil à titre gracieux. Toute utilisation inappropriée, tout démontage non autorisé ou tout dommage causé à l'autopiqueur invalidera la garantie. Cette garantie vous confère les droits prévus par la législation.

Importé et distribué par :
SPENGLER SAS - 30 rue Jean de Guirmand
 13290 Aix en Provence - FRANCE
 E-mail: contact@spengler.fr - www.spengler.fr

MEDIFUN CORPORATION
 No.8, Shuyi Rd., South Dist.,
 Taichung City, 40241, Taiwan (R.O.C.)
 +886-4-22601991

EC REP
 MDSS GmbH
 Schiffgroben 41
 30175 Hannover, Germany