


Sac à urine | non stérile | Mode d'emploi

Cher utilisateur, veuillez lire attentivement toutes les informations suivantes avant d'utiliser ce produit.


Utilisation prévue :

Le sac à urine est utilisé pour drainer et recueillir l'urine accumulée par le patient.

Collecteur d'urine de lit

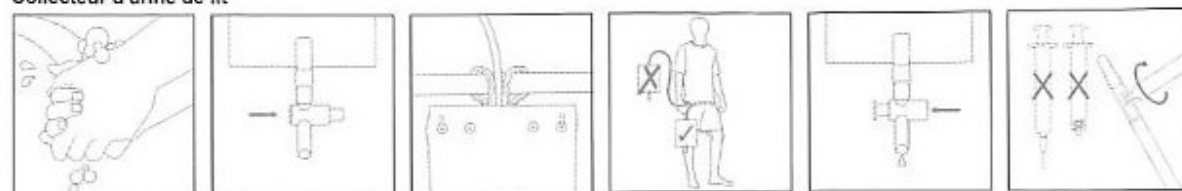

Collecteur d'urine de jambe

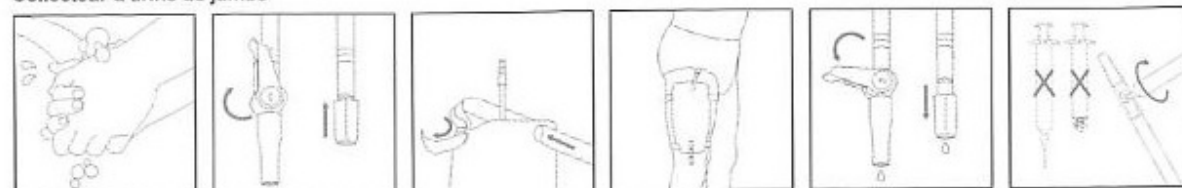

Contre-indication :

Nous n'avons pas connaissance de contre-indications absolues.

Des restrictions d'utilisation peuvent résulter du tableau clinique du patient. Les systèmes de poches à urine ne doivent pas être utilisés chez les patients présentant une macrohématurie. Nos poches à urine et leurs tubes ne doivent pas entrer en contact avec des zones de la peau présentant des modifications pathologiques.

Application/Exécution/Hygiène :

Avant toute manipulation des poches à urine (raccordement ou changement de la poche à urine), veuillez procéder à une désinfection hygiénique des mains (lavage et désinfection des mains). Veuillez porter des gants jetables.

- Désinfectez vos mains avant et après l'utilisation.
- Assurez-vous que le robinet de vidange est fermé.
- Fixez la poche à urine à l'aide d'un cintre supplémentaire à la hauteur voulue, de sorte que l'urine puisse s'écouler librement. La poche à urine doit toujours être placée sous le niveau de la vessie.
- Pour vider le sac à urine : tenez le sac à urine sur un WC, ouvrez la sortie et lorsque le sac est vide, refermez la sortie.
- Certains sacs à urine ne sont pas équipés d'une sortie. Dans ce cas, le collecteur d'urine plein doit être remplacé. Jetez le contenu du sac à urine plein dans les toilettes.
- Certaines poches à urine sont équipées d'un port de prélèvement d'urine sur le connecteur.
- Le port de prélèvement d'urine sur le connecteur permet de prélever des échantillons d'urine à l'aide d'une seringue avec un connecteur luer sans aiguille.
- Utilisez le collier coulissant pour fermer le tube.
- Désinfectez le port. Poussez le connecteur luer à travers le centre de la bonde en silicone et aspirez l'urine. Ouvrez à nouveau le tube pour que l'urine puisse s'écouler librement.

Élimination :

Le sac vidé doit être éliminé avec les déchets ménagers, conformément aux réglementations nationales.

Durée de vie utile :

Toutes les poches à urine mentionnées sont destinées à un usage unique. Si une poche a été retirée de son emballage d'origine et connectée à une sonde ou à une gaine urinaire, elle ne doit pas être reconnectée à la sonde (si les éléments ont été séparés). Les systèmes fermés de dérivation urinaire ne doivent pas être changés systématiquement à intervalles fixes, mais doivent être changés si nécessaire après avoir été évalués par le médecin ou le personnel infirmier, selon des critères individuels.

Avertissements :

Veuillez noter que les poches à urine reliées à une sonde vésicale à demeure ne doivent pas être tirées de quelque manière que ce soit afin d'éviter de déséquilibrer la position de la sonde et de nuire à sa capacité de drainage (RISQUE DE BLESSURE) !

Si la poche ou le dispositif médical est défectueux et/ou si aucune urine ne pénètre dans la poche, jetez-la immédiatement et utilisez une nouvelle poche. Si des patients atteints de pathologies nécessitant une dérivation urinaire sont équipés de nos poches à urine, des soins/surveillance appropriés doivent être assurés. Il en va de même pour les jeunes enfants.

Ne pas réutiliser, destiné à un usage unique pour le patient. La réutilisation de ce dispositif à usage unique peut affecter la sécurité, les performances et l'efficacité, exposant les patients et le personnel à des risques inutiles.

Exclusion de la responsabilité :

En général, la garantie s'applique uniquement si le raccordement des produits médicaux approuvés de CONOD au produit que vous avez en main est effectué correctement et conformément au mode d'emploi. Si vous préférez les connecter à des produits d'autres fabricants, c'est possible, mais CONOD n'assume aucune responsabilité et toute demande de garantie devient nulle. CONOD n'assume aucune responsabilité pour les blessures ou autres dommages résultant de l'utilisation de ce produit en violation des recommandations actuelles de CONOD.

Remarque :

Toutes les informations ont été publiées au mieux de nos connaissances au moment de l'impression. Sous réserve de modifications techniques.

Fabricant	Date limite d'utilisation	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Ne pas réutiliser	Contient ou présence de phtalates
Date de fabrication	[LOT] Code d'lot	Tenir à l'écart de la lumière du soleil	Consulter le mode d'emploi	Pas en latex de caoutchouc naturel
Importateur	Numéro de catalogue	Garder au sec	Mise en garde	MD Dispositif médical
Distributeur	Représentant autorisé dans la communauté européenne	Représentant autorisé au Royaume-Uni	Représentant autorisé en Suisse	