



MODE D'EMPLOI

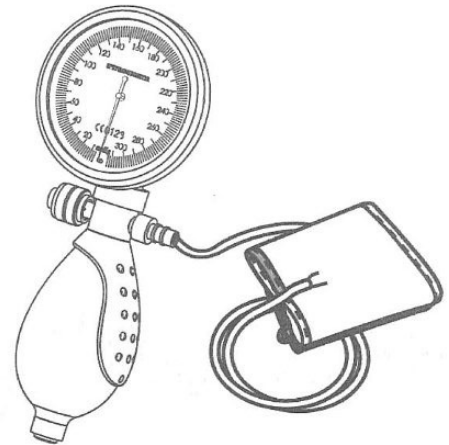

CE 0123

COMED SAS
PARC DES FORGES
8 RUE LOUISE MICHEL 67200
STRASBOURG FRANCE

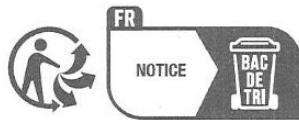

HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.
Address: No.8, Tongxing Road, Economic&Technical
Development Area, Nantong City, Jiangsu, P.R.China

EC REP

SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE)
Address: Eifflstrasse 80, 20537 Hamburg GERMANY
Tel: 86-21-6305 6696
Fax: 86-21-6303 6162

Merci de consulter notre site Internet pour de plus amples informations et service
www.asian-medical.com

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DU MODE GAUCHER & DROITIER

VOUS UTILISEZ UN TENSIOMÈTRE MANOPOIRE UNIQUE CONÇU POUR UNE UTILISATION PRATIQUE POUR GAUCHERS ET DROITIERS. POUR UTILISER CORRECTEMENT CET INSTRUMENT, VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES POUR BASCULER ENTRE LE MODE GAUCHER ET DROITIER.

1. LE RÉGLAGE USINE PAR DÉFAUT EST LE MODE DROITIER (fig. 1)
Fig. 1 :

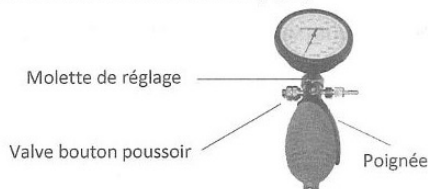


Fig.1

2. POUR RÉGLER LE MODE GAUCHER :

ÉTAPE 1
DESSERRER COMPLÈTEMENT LA MOLETTE DE RÉGLAGE EN LA TOURNANT DANS LE SENS ANTI HORAIRE (fig. 2-1)

ÉTAPE 2
TOURNER LA POIGNÉE AVEC LA VALVE CONNECTÉE DANS LE SENS ANTI HORAIRE À 180 DEGRÉS (fig. 2-2);

ÉTAPE 3
TOURNER LA MOLETTE DE RÉGLAGE DANS LE SENS HORAIRE POUR RESSERRER LA MOLETTE (fig. 2-3)

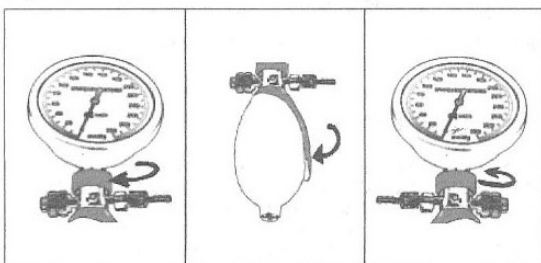


Fig 2-1

Fig 2-2

Fig 2-3

3. RÉGLAGE SUR LE MODE DROITIER LORSQUE LE MODE EST SUR GAUCHER

ÉTAPE 1
DESSERRER COMPLÈTEMENT LA MOLETTE DE RÉGLAGE EN LA TOURNANT DANS LE SENS ANTI HORAIRE (fig. 3-1);

ÉTAPE 2
TOURNER LA POIGNÉE AVEC LA VALVE CONNECTÉE DANS LE SENS HORAIRE À 180 DEGRÉS (fig. 3-2);

ÉTAPE 3
TOURNER LA MOLETTE DE RÉGLAGE DANS LE SENS HORAIRE POUR SERRER LA MOLETTE (fig. 3-3)

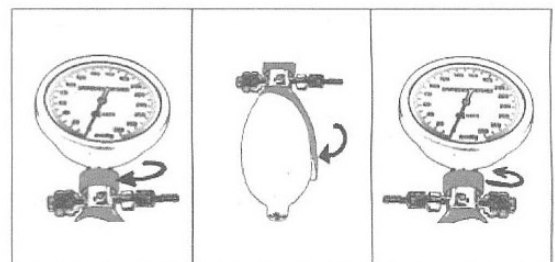


Fig.2-1

Fig.2-2

Fig.2-3

REMARQUE :

1. VOUS DEVEZ UTILISER L'INSTRUMENT CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS CI-DESSUS POUR ÉVITER LES FUITES D'AIR.
2. SI LA MOLETTE DE RÉGLAGE EST TROP SERRÉE, VOUS POUVEZ LA DESSERRER AVEC LA POIGNÉE.

INSTRUCTIONS POUR LA VALVE BOUTON POUSOIR

À LA DIFFÉRENCE DE LA MANIÈRE TRADITIONNELLE DE DÉGONFLAGE, NOUS POUVONS AUSSI FOURNIR À L'UTILISATEUR UNE VALVE BOUTON PUSOIR SPÉCIALE (Fig. 1), QUI PERMET À L'UTILISATEUR DE DÉGONFLER LE TENSIOMÈTRE MANOPOIRE PROGRESSIVEMENT EN POUSSANT LE BOUTON UNE FOIS PUIS EN LE RELÂÇANT. APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON JUSQU'AU DÉGONFLAGE COMPLET. CETTE NOUVELLE MÉTHODE PERMET DE CONTRÔLER FACILEMENT LE DÉGONFLAGE.