



**THUASNE**

**BIFLEX 16**

**BIFLEX 17**

**BIFLEX 16+**

**BIFLEX 17+**

**BIFLEX 16+ PRATIC**

**BIFLEX 17+ PRATIC**

**MD**

<b>fr</b>	Dispositif médical
<b>en</b>	Medical device
<b>de</b>	Medizinprodukt
<b>nl</b>	Medisch hulpmiddel
<b>it</b>	Dispositivo medico
<b>es</b>	Producto sanitario
<b>pt</b>	Dispositivo médico
<b>da</b>	Medicinsk udstyr
<b>fi</b>	Lääkinnällinen laite
<b>sv</b>	Medicinteknisk produkt
<b>el</b>	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
<b>pl</b>	Wyrób medyczny
<b>lv</b>	Medicīniska ierīce
<b>sk</b>	Zdravotnícka pomôcka
<b>hu</b>	Orvostechnikai eszköz
<b>bg</b>	Медицинско изделие
<b>ro</b>	Dispozitiv medical
<b>ru</b>	Медицинское изделие
<b>hr</b>	Medicinski proizvod
<b>zh</b>	醫療器械
<b>ja</b>	医療機器
<b>ko</b>	의료 기기
<b>ar</b>	جهاز طبي




<b>fr</b>	Un seul patient - à usage multiple
<b>en</b>	Single Patient - multiple use
<b>de</b>	Einzelner Patient - mehrfach anwendbar
<b>nl</b>	Eén patiënt - meervoudig gebruik
<b>it</b>	Singolo paziente - uso multiplo
<b>es</b>	Un solo paciente - uso múltiple
<b>pt</b>	Paciente único - várias utilizações
<b>da</b>	Enkelt patient - flergangsbrug
<b>fi</b>	Potilaskohtainen - voidaan käyttää useita kertoja
<b>sv</b>	En patient - flera användningar
<b>el</b>	Πολλαπλή χρήση - σε έναν μόνο ασθενή
<b>pl</b>	Wielokrotne użycie u jednego pacjenta
<b>lv</b>	Viens pacients - vairākkārtēja lietošana
<b>sk</b>	Jeden pacient - viacnásobné použitie
<b>hu</b>	Egyetlen beteg esetében többször újrahasználható
<b>bg</b>	Един пациент - многократна употреба
<b>ro</b>	Un singur pacient - utilizare multiplă
<b>ru</b>	Многократное использование для одного пациента
<b>hr</b>	Jedan pacijent - višestruka uporaba
<b>zh</b>	一位患者 - 多次使用
<b>ja</b>	一患者用 - 複数回使用
<b>ko</b>	한 환자에 한 해 - 여러번 사용
<b>ar</b>	لمريض واحد - متكرر الاستعمال

**BIFLEX 16****BIFLEX 17**

<b>fr</b>	Comment différencier les bandes BIFLEX: 1 fil bleu = BIFLEX 16 - 2 fils bleus = BIFLEX 17
<b>en</b>	How to identify BIFLEX bandages: 1 blue thread = BIFLEX 16 - 2 blue threads = BIFLEX 17
<b>de</b>	Unterscheidungsmerkmale der verschiedenen BIFLEX-Binden: 1 blauer Faden = BIFLEX 16 - 2 blaue Fäden = BIFLEX 17
<b>nl</b>	Hoe herkent u de verschillende pleisters van BIFLEX: 1 blauwe draad = BIFLEX 16 - 2 blauwe draden = BIFLEX 17
<b>it</b>	Come distinguere le bende BIFLEX: 1 filo blu = BIFLEX 16 - 2 fili blu = BIFLEX 17
<b>es</b>	Cómo diferenciar las vendas BIFLEX: 1 hilo azul = BIFLEX 16 - 2 hilos azules = BIFLEX 17
<b>pt</b>	Como distinguir as ligaduras BIFLEX: 1 fio azul = BIFLEX 16 - 2 fios azuis = BIFLEX 17
<b>da</b>	Sådan kender man forskel på BIFLEX-bindene: 1 blå tråd = BIFLEX 16 - 2 blå tråde = BIFLEX 17
<b>fi</b>	Kuinka erottaa BIFLEX-siteet toisistaan: 1 sininen lanka = BIFLEX 16 - 2 sinistä lankaa = BIFLEX 17
<b>sv</b>	Hur du ser skillnad på BIFLEX-bandage: 1 blå tråd = BIFLEX 16 - 2 blå trådar = BIFLEX 17

<b>el</b>	Πώς να ξεχωρίσετε τους επιδέσμους BIFLEX: 1 μπλε νήμα = BIFLEX 16 - 2 μπλε νήματα = BIFLEX 17
<b>pl</b>	Jak odróżnić rodzaje bandaży BIFLEX: 1 pojedynczy niebieski ściąg = BIFLEX 16 - 2 podwójne niebieskie ściągi = BIFLEX 17
<b>lv</b>	Kā atšķirt saites BIFLEX: 1 zils diegs = BIFLEX 16 - 2 zili diegi = BIFLEX 17
<b>sk</b>	Ako rozlíšiť obvazy BIFLEX: 1 modré vlákno = BIFLEX 16 - 2 modré vlákna = BIFLEX 17
<b>hu</b>	Hogyan különböztethetők meg egymástól a BIFLEX fáslik: 1 kék csík = BIFLEX 16 - 2 kék csík = BIFLEX 17
<b>bg</b>	Как да различаваме бинтовете BIFLEX: 1 синя нишка = BIFLEX 16 - 2 сини нишки = BIFLEX 17
<b>ro</b>	Cum diferentiam benzile BIFLEX: 1 fir albastru = BIFLEX 16 - 2 fire albastre = BIFLEX 17
<b>ru</b>	Как различаются бинты BIFLEX: 1 голубая полоска = BIFLEX 16 - 2 голубые полоски = BIFLEX 17
<b>hr</b>	Kako razlikovati BIFLEX zavoje: 1 plava linija = BIFLEX 16 - 2 plave linije = BIFLEX 17
<b>zh</b>	如何区别BIFLEX医用绷带: 1条蓝线 = BIFLEX 16 - 2条蓝线 = BIFLEX 17
<b>ja</b>	BIFLEX (バイフレックス) 包帯の識別方法 青筋 1本 = BIFLEX 16 - 青筋 2本 = BIFLEX 17
<b>ko</b>	BIFLEX 붕대의 종류를 구별하는 방법: 1개의 파란색 선 = BIFLEX 16 - 2개의 파란색 선 = BIFLEX 17
<b>ar</b>	كيفية التفرقة بين أربطة BIFLEX: BIFLEX 17 = خيط واحد أزرق - BIFLEX 16 = خيطان أزرقان

1

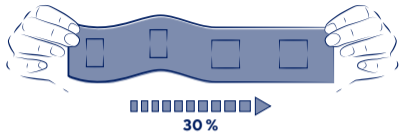

2



3



fr

**Description**

Bande élastique de compression à allongement long

Composition :

polyamide, viscose, polyester, élasthanne

**Propriétés / Mécanisme d'action**

Les bandes BIFLEX sont des bandes à allongement long indiquées dans le traitement des pathologies veineuses, lymphatiques et traumatiques. Elles sont bi-extensibles : allongement longitudinal > 100 %, retour élastique > 90 %, élasticité transversale > 40 %.

Destination :

BIFLEX est destinée à être posée sur les membres inférieurs ou supérieurs de patients adultes ou enfants répondant à l'une des indications médicales prévues.

**Indications**

Alternative aux bas de compression (15-36 mmHg) dans le traitement des varices

Œdème chronique

Œdème post-traumatique

Alternative aux bas de compression en suite de sclérothérapie ou de chirurgie des varices

Alternative aux bas de compression dans le traitement des troubles trophiques (dermatites/lipodermatosclérose)

Ulcère veineux de jambe (bandage multi-type, bandage élastique pour les patients à mobilité réduite)

Traitement symptomatique de la thrombose veineuse aiguë profonde ou superficielle

Alternative aux bas de compression / anti-thrombose

Prévention du syndrome post-thrombotique : alternative aux bas de compression pour les patients à risque

Traitement du lymphoedème

**Méthodes de pose**

Vérifier l'intégrité du dispositif avant utilisation.

1. Positionner l'extrémité de la bande à plat au niveau de la racine des orteils.

2. Faire un premier tour en passant sous le pied.
3. Le second tour doit se rapprocher de la cheville. Coiffer le talon.
4. Passer sous le pied et revenir sur la cheville.
5. Revenir sur le dessus du pied, et faire le tour de la cheville.
6. Remonter sur le mollet en décalant régulièrement les spires suivant prescription.
7. Fermer la bande à l'aide d'un sparadrap ou d'un système d'attaches prévu à cet effet

Les bandes peuvent être utilisées en association avec des bandes mousse ou Varico en cas de dystrophies ou de saillies osseuses.

#### Cas des bandes étalonnées :

L'étalonnage permet de contrôler la tension de la bande lors de la pose. La bande est correctement tendue quand chaque rectangle est transformé en carré (schéma 1).

L'étalonnage constitue également un guide pour le recouvrement :

- Recouvrement moitié du carré = force 1 (BIFLEX 16+) / force 3 (BIFLEX 17+) (schéma 2)
- Recouvrement carré complet = force 2 (BIFLEX 16+) / force 4 (BIFLEX 17+) (schéma 3)

#### Cas de BIFLEX + PRATIC :

Possède une boucle confectionnée à l'une de ses extrémités qui permet l'enfilage sur le pied, ainsi qu'un transfert marquant le sens d'enroulement de la bande.

Nota : lorsque la bande est retirée, la rouler en commençant par l'extrémité opposée à la boucle.

#### **Contre-indications**

AOMI (artériopathie oblitérante des membres inférieurs) avec un IPS < 0,6  
Plaies dermatologiques, abcès, dermites infectées  
Pontage extra-anatomique  
Insuffisance cardiaque non équilibrée  
Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle)  
Thrombose septique  
Allergie connue à l'un des composants  
Neuropathie périphérique sévère

#### **Précautions**

Suivre les informations du professionnel qui a prescrit ou délivré le produit.

Examiner la forme de la jambe ; en cas de saillies osseuses ou de dystrophies, utiliser des mousses de protection ou des coussins Varico pour uniformiser le membre.

En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de variation de volume du membre ou de sensations anormales, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

Respecter la méthode de pose et la durée indiquées par votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif peut être combiné avec d'autres bandes pour être utilisé jour et nuit. Veuillez-vous référer à votre médecin et ses consignes pour tout besoin éventuel de retrait du bandage la nuit.

Stocker à température ambiante, de préférence dans la boîte d'origine.

Ne pas appliquer le produit directement sur une plaie ouverte.

Veiller à bien couvrir toute lésion cutanée infectée ou ouverte avant d'utiliser la bande.

Pour certaines pathologies (ou situations) telles que la thrombose veineuse, les bandes doivent être utilisées en association avec un traitement anticoagulant ; veuillez vous référer à la prescription d'un professionnel de santé.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

#### **Effets secondaires indésirables**

Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées telles que des marques de pression, des rougeurs, des démangeaisons, des brûlures, voire des cloques.

#### **Maintenance / Entretien**

Autoclavage possible.

Conserver cette notice

Année d'apposition du marquage CE : 1997