




BIPLAST

- fr Bande adhésive de contention
- en Adhesive compression bandage
- de Haftender Kompressionsverband
- nl Zelfklevend steunverband
- it Fascia adesiva di contenimento
- es Venda adhesiva de contención
- pt Banda adesiva de contensão
- fi Liimaside
- sv Självhäftande stödband
- el Αυτοκόλλητη ταινία συγκράτησης
- pl Pas podtrzymujący samoprzylepny
- lv Lipoša balsta saite
- sk Adhezívny fixačný obväz
- hu Öntapadós rugalmas fásli
- bg Адхезивен бинт за задържане
- ro Bandă adezivă de compresie
- ru Бинт липкий фиксирующий
- ko 접착식 고정 붕대
- ar رباط صائغ لاصق

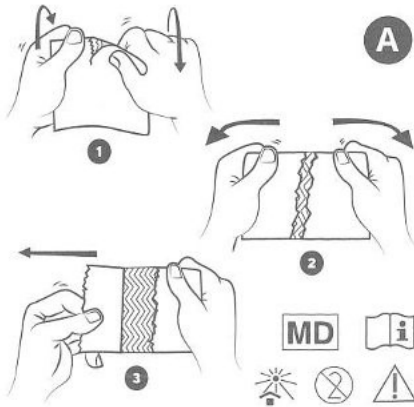

Mode d'emploi/Mise en place

- Retirer le film plastique suivant les pointillés.
- Définir la longueur de bande souhaitée.
- Retirer le papier protecteur (Schéma 1).
- Déchirer le papier à la longueur souhaitée 2.
- Tirer de chaque côté pour déchirer sur toute la longueur 3.
- Décoller le papier d'un côté, appliquer sur le membre, puis décoller de l'autre côté 4.

Stockage

Stocker le dispositif à température ambiante, dans son emballage d'origine.

Élimination

Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.
Année d'apposition du marquage CE : 1997.
Conserver cette notice.

fr

BANDE ADHÉSIVE DE CONTENTION

Description/Destination

Bande adhésive de contention à allongement court.
Le dispositif est disponible en différentes largeurs selon les besoins.

Le dispositif est destiné à être utilisé sur la partie du corps ou l'articulation concernée par la pathologie du patient, et uniquement pour le traitement des indications listées.

Composition

Coton, polyester, masse adhésive (élastomère synthétique et résine tackifiante), papier.

Propriétés/Mode d'action

Bande adhésive de contention.

Tissu élastique aéré.

Induction multi-directionnelle en chevrons.

Allongement court < 70%.

Papier protecteur intercalaire.

Le dispositif peut être utilisé pour la fixation de pansements et d'attelles.

Indications

Blessures des tissus mous ou de l'appareil musculosquelettique.

Strapping : maintien après traumatisme.

Fracture des petits os (doigt, pied, etc.).

Déformation osseuse congénitale ou acquise du pied.

Pathologies vasculaires ou lymphatiques nécessitant un bandage à allongement court ou multicomposant.

Contre-indications

Ne pas utiliser le produit en cas de diagnostic incertain.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Ne pas appliquer le produit directement sur une peau lésée ou plaie ouverte sans pansement adapté.

Ne pas utiliser en cas d'affections dermatologiques suintantes ou majeures du membre concerné.

Ne pas utiliser en cas de pontage extra-anatomique du membre concerné.

Ne pas utiliser en cas de neuropathie périphérique sévère du membre concerné.

Ne pas utiliser en cas de thrombose septique du membre concerné.

Si port sur les membres inférieurs :

- Ne pas utiliser en cas d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0,6.

- Ne pas utiliser en cas d'insuffisance cardiaque décompensée.

- Ne pas utiliser en cas de microangiopathie diabétique évoluée.

- Ne pas utiliser en cas de phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle) du membre concerné.

Si port sur les membres supérieurs :

- Ne pas utiliser en cas de pathologie du plexus brachial.

- Ne pas utiliser en cas de vascularite des extrémités.

Précautions

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.

Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

Se conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé.

En cas de sensibilité particulière de la peau, demander conseil à un professionnel de santé.

En cas de modification des performances du dispositif, le retirer et consulter un professionnel de santé.

En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de variation du volume du membre, de dégradation de l'état de la peau, d'infection, de sensations anormales ou de changement de couleur des extrémités, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

Ne pas utiliser le dispositif en cas d'application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels, patchs...).

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Effets secondaires indésirables

Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, brûlures, cloques...) voire des plaies de sévérités variables.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.