
	S	7,50 - 8,75 cm
	M	8,75 - 10 cm
	L	10 - 11,25 cm
	XL	11,25 - 12,50 cm

fr | Hauteur de cou

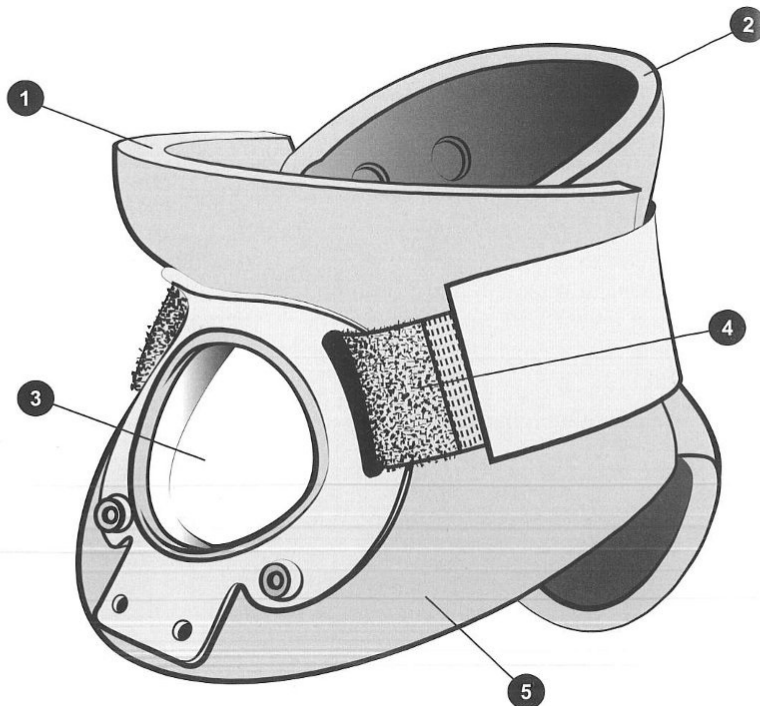

fr COLLIER CERVICAL RIGIDE

Description/Destination

2 coques moulées de forme anatomique, en mousse hypallergique :

1 coque antérieure avec appui mentonnier et sternal ①

Ouverture antérieure trachéale. ②

Réglage précis par auto-agrippant. ④

Radio-transparent. ⑤

Le dispositif est destiné uniquement au traitement des indications listées et à des patients dont les mensurations correspondent au tableau de tailles.

Composition

Polyamide - polyéthylène - polypropylène - polyester - acrylique.

Propriétés/Mode d'action

Immobilisation du rachis cervical.

Indications

Radiculopathie cervicale.

Spondylose cervicale.

Fractures cervicales stables.

Usage postopératoire.

Coup du lapin.

Contre-indications

Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Ne pas utiliser en cas de blessures traumatiques : entorse grave, fracture instable.

Ne pas utiliser en port prolongé sans surveillance médicale.

Ne pas utiliser le produit en cas de diagnostic incertain.

Précautions

Se conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation

préconisé par votre professionnel de santé.

En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de sensations anormales, consulter un professionnel de santé.

Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau de tailles.

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.

Il est recommandé qu'un professionnel de santé supervise la première

application.

Ce produit est destiné au traitement d'une pathologie donnée, sa

durée d'utilisation est limitée à ce traitement.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, ne pas réutiliser le

dispositif pour un autre patient.

Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

Ne pas utiliser le dispositif en cas d'application de certains produits sur

la peau (crèmes, pommades, huiles, gels, patchs...).

Il est recommandé de serrer de manière adéquate le dispositif afin

d'assurer un soutien sans compression excessive.

Les colliers rigides doivent être retirés dès que la colonne cervicale est

dégagée, même chez les patients intubés ou obnubilés (état proche

du coma).

Ne pas utiliser le dispositif lors de la conduite d'un véhicule.

Effets secondaires indésirables

Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs,

démangeaisons, brûlures, cloques...) voire des plaies de sévérités

variables.

Le port d'un collier cervical peut entraîner des faiblesses des muscles

du cou.

Le port d'un collier cervical peut augmenter la pression intracrânienne.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire

l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de

l'Etat Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Mode d'emploi/Mise en place

Appliquer la partie arrière du collier sur le cou du patient. ①

Appliquer la partie avant du collier avec le menton posé sur l'appui

prévu à cet effet.

Centrer le collier pour avoir un alignement neutre. ② ③

Fermer l'auto-agrippant : la partie avant chevauche la partie arrière. ④

Prendre garde à ne pas trop serrer la sangle. ⑤

Entretien

Voir étiquette produit. Fermer les auto-agrippants avant lavage.

Lavable à la main. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de détergents,

adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés...). Ne pas

utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser. Sécher loin d'une source

directe de chaleur (radiateur, soleil...). Sécher à plat.

Stockage

Stockage à température ambiante, de préférence dans l'emballage

d'origine.

Élimination

Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE : 2003

Conservé cette notice.



fr | Immobilisation

