



**SPORT**

## ÉPAULIÈRE SPORT

Instructions d'utilisation

### ÉPAULIÈRE SPORT

Niveau de maintien 1

#### Description/Destination

Ce dispositif est une orthèse permettant le maintien de l'épaule. Le dispositif est destiné uniquement au traitement des indications listées et à des patients dont les mensurations correspondent au tableau de tailles.

#### Composition

Polyester - polyamide - latex naturel - caoutchouc synthétique (SBR) - polyformaldéhyde - élasthanne.

#### Propriétés/Mode d'action

Tissu élastique recouvrant l'épaule.  
Sangle de maintien à fermeture réglable.  
Modèle bilatéral.  
Coutures plates pour plus de confort.  
Découpe anatomique pour accompagner le mouvement de l'épaule.

#### Indications

Traumatismes ou états inflammatoires de l'épaule et/ou du coude.  
Prévention de la subluxation ou re-luxation de l'épaule (instabilité articulaire).  
Luxation de l'épaule.

#### Contre-indications

Ne pas utiliser le produit en cas de diagnostic incertain.  
Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.  
Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.  
Ne pas utiliser en cas de fractures complexes ou chirurgicales de l'épaule, ou en cas de fractures des côtes.

Ne pas utiliser dans certaines situations postopératoires (fractures multiples, pose de broches, fractures ouvertes, etc.).

#### Précautions

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.  
Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.  
Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles.  
Consulter un professionnel de santé :

- en cas de doute avant utilisation,
  - en cas de diagnostic incertain.
- Consulter un professionnel de santé et arrêter l'utilisation du dispositif :
- en cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de sensations anormales,
  - en cas de modification des performances du dispositif.

Pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de performance, ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient.

Ne pas mettre le dispositif en contact direct avec un corps gras (pommade, crème...).

Une immobilisation prolongée peut parfois entraîner une perte de tonus musculaire.

Si le dispositif est porté pour de longues périodes, s'assurer que la circulation sanguine n'est pas entravée.

Il est recommandé de serrer de manière adéquate le dispositif afin d'assurer un maintien sans limitation de la circulation sanguine.

Ne pas utiliser le dispositif lors de la conduite d'un véhicule.

Contient du latex naturel.

#### Effets secondaires indésirables

Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, brûlures, cloques...) voire des plaies de sévérités variables.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

#### Mode d'emploi/Mise en place

Ouvrir la sangle auto-agrippante.  
Passer la sangle dans la boucle arrière et la fixer sur l'auto-agrippant ❶.  
Enfiler le bras dans l'épaulière ❷.  
Faire passer la sangle sous l'aisselle du bras opposé et venir la passer dans la boucle avant de l'épaulière ❸.  
Ajuster et fixer la sangle à l'aide des auto-agrippants ❹.

#### Entretien

Produit lavable selon les conditions présentes sur cette notice et l'étiquetage. Fermer les auto-agrippants avant lavage. Lavable en machine à 30 °C délicat. Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés...). Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser. Essorer par pression. Sécher à plat. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...).

#### Stockage

Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

#### Élimination

Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE : 2009.

Conserver cette notice


[www.thuasne.com](http://www.thuasne.com)

[www.thuasne.com/global-contact](http://www.thuasne.com/global-contact)



**UK Responsible Person (UKRP):**  
Thuasne UK Ltd  
Unit 4 Orchard Business Centre  
North Farm Road  
Tunbridge Wells TN2 3XF,  
United Kingdom

©Thuasne - 2049201 (2023-10)

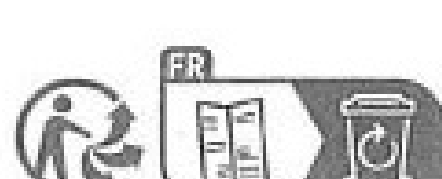

Thuasne SAS - SIREN/RCS Nanterre 542 091 186  
capital 1 950 000 euros  
120, rue Marius AUFAN 92300 Levallois-Perret (France)