



Tullegras[®] M.S POCKET

PLAIES ET BRÛLURES
1 PANSEMENT
VASELINÉ STÉRILE UNITAIRE
5 cm x 10 cm



RADIOSTÉRILISÉ.

Composition : Tissu de viscose à mailles serrées, imprégné de vaseline minérale.

Conservation : Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

À conserver à plat à une température inférieure à 25°C.

Mode d'emploi : usage externe.

1 - Nettoyer la plaie. Ouvrir le sachet protecteur. Extraire le pansement vaseliné.

2 - Oter la première pellicule de protection.

3 - Appliquer TULLEGRAS M.S. sur la lésion.

4 - Retirer la seconde pellicule de protection. Recouvrir de compresses stériles et maintenir le pansement au moyen d'un bandage souple et élastique.

Changer le pansement 2 ou 3 fois par semaine, si besoin.

Pansement à usage unique ; ne pas réutiliser en raison du risque d'inefficacité et/ou de contamination.

Fabricant : Mylan Medical SAS
40-44 rue Washington - F 75008 Paris

CE 0459

(2006) **STERILE** **R** 5039109



LOT 15TG0025
 2.239 0747 975
 2022-11
 2024-10
 5045690

et respecte la cicatrisation naissante.

3 " 7 0 0 3 4 3 " 9 0 1 0 3 9 "