



CREVASSES TALONS FENDILLES

Pansement liquide prêt à l'emploi pour le traitement des crevasses et fendillements des talons.

• Qu'est-ce qu'une crevasse ?

C'est une rupture plus ou moins profonde de la surface de la peau due à un dessèchement ou un épaissement cutané. Les origines en sont principalement l'exposition au chaud, au froid, aux produits agressifs du type détergents ou encore aux frottements.

• Comment agit URGO CREVASSES TALONS FENDILLES ?

Sa formule crée un environnement favorable à la cicatrisation.

Une fois appliqué, le film formé, transparent et souple :

- **PROTEGE** des agressions extérieures
- **COMBLE ET EVITE LA REOUVERTURE** de la crevasse
- **SOULAGE** la douleur
- **FAVORISE LA CICATRISATION**
- **RESISTE A L'EAU**

• Conseils d'utilisation

Doit être appliqué par un adulte pour les moins de 16 ans.

Etaler le produit à l'aide du pinceau de manière à combler et à recouvrir la crevasse sur toute sa longueur. Laisser sécher pendant quelques secondes. A renouveler 2 à 3 fois par jour jusqu'à guérison complète.

Bien refermer après utilisation.

Si besoin, le produit peut être retiré en ré-appliquant une goutte sur le film déjà formé, et en essuyant immédiatement avec une compresse sèche.

Après ouverture, il est conseillé d'utiliser ce produit dans les 6 mois.

• Composition

Huile de germe de blé, nitrocellulose, isopropanol, acétate d'éthyle, éthanol, hydroxypropylcellulose, huile de ricin.

• Contre-indications

Ne pas appliquer sur les plaies infectées, les mycoses, les brûlures, les plaies qui saignent.

Ne pas appliquer sur les muqueuses (lèvres en particulier).

En l'absence d'étude chez les femmes enceintes ou allaitantes, l'utilisation du produit n'est pas recommandée.

• Précautions d'emploi

Application cutanée exclusivement.

Le produit doit être appliqué par un adulte.

N'utiliser que sur les plaies localisées.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans.

Ne pas fumer lors de l'application, avant séchage complet du produit ou à proximité du flacon ouvert.

Peut piquer à l'application.

En cas de doute consulter votre pharmacien.

Ne pas avaler.

Eviter le contact avec les yeux.

Irritant pour les yeux.

Le produit peut être utilisé par des personnes diabétiques sous réserve de la consultation préalable d'un médecin.

• Conservation

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement. A conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Date d'apposition du marquage CE : 2017

Date de dernière révision : 02-2020



Facilement
inflammable

CE 0459