

UrgoTul



Interface lipido-colloïde non occlusive

Urgotul

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION	GROUPAGE	
		Nombre UCD/Boîte	Nombre UCD	Nombre boîtes
508537	Petit : 5 x 5 cm	10	300	30
508538	Standard : 10 x 10 cm	10	160	16
508513	Grand : 15 x 20 cm	10	140	14
508540	Large : 10 x 40 cm	10	100	10

Lire attentivement la notice

UrgoTul



DESCRIPTION

COMPOSITION : **Urgotul** est issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires Urgo.

Urgotul est une interface lipido-colloïde non adhésive, non occlusive, constituée d'une trame polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes (Carboxyméthylcellulose), d'huile de paraffine, de vaseline et de polymères.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

PROPRIETES

- Au contact des exsudats de la plaie, les particules hydrocolloïdes se gélifient et interagissent avec la composante vaselinée d'**Urgotul** pour former une interface lipido-colloïde de contact qui crée les conditions favorables au processus cicatriciel (cicatrisation en milieu humide).

Il en résulte des propriétés spécifiques :

- maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation,
- retrait atraumatique pour les tissus néoformés,
- caractère indolore du renouvellement de pansement pour le patient,
- respect de la peau péri-lésionnelle.

Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, **Urgotul** n'adhère ni à la plaie, ni à son pourtour : les renouvellements de pansements sont donc indolores pour le patient et atraumatiques pour la plaie.

- Souple et très conformable, **Urgotul** épouse toute localisation anatomique difficile.

INDICATIONS

- **Urgotul** est indiqué pour le traitement des plaies aiguës (brûlures, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires), des plaies du pied diabétique, des plaies chroniques (escarres, ulcères) au stade de bourgeonnement et d'épidermisation, et des plaies d'épidermolyse bulleuse congénitale.
- Souple et très conformable, **Urgotul** est tout particulièrement indiqué dans le recouvrement des plaies anfractueuses ou de localisations difficiles ainsi que pour le méchage des plaies creuses.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l'application d'**Urgotul**.
- Retirer les ailettes de protection d'**Urgotul**.
- Appliquer directement **Urgotul** sur la plaie.

Urgotul peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter la taille du pansement à la plaie.

- Recouvrir **Urgotul** d'un pansement secondaire : compresses stériles maintenues par une bande extensible ou un sparadrap multi-extensible ou un filet tubulaire.
- Les renouvellements d'**Urgotul** seront effectués tous les 2 à 4 jours en fonction de la plaie traitée et de son évolution.
- **Urgotul** peut être laissé en place jusqu'à 7 jours sous compression multicouches (type **UrgoK2**) dans l'ulcère de jambe d'origine veineuse, en cas de prescription associée et justifiée par l'évolution clinique de la plaie.
- Dans les cas des plaies d'épidermolyse bulleuse congénitale, le renouvellement se fera tous les 1 à 3 jours.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- **Urgotul** adhère aux gants chirurgicaux en latex. Aussi, est-il recommandé d'humidifier les gants avec du sérum physiologique pour faciliter, dans ce cas, la manipulation d'**Urgotul**.
- En présence de signes cliniques d'infection locale, l'instauration d'un traitement préalable avec une interface anti-bactérienne de type **Urgotul Ag** est préconisée.
- En cas de plaie profonde, anfractueuse ou fistuleuse, laisser une partie du pansement **Urgotul** visible et accessible à l'extérieur de la plaie.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Ne pas restériliser le pansement.
- Stocker **Urgotul** à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°C).

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed).
Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %).

UrgoTul Border



Pansement hydrocellulaire adhésif siliconé avec TLC micro-adhérente

Urgotul Border

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION	GROUPAGE	
			Nombre UCD/Boîte	Nombre UCD Nombre boîtes
550743	Petit : 8 x 8 cm	16	384	24
550745	Standard : 13 x 13 cm	16	128	8
550747	Grand : 15 x 20 cm	10	120	12
550749	Sacrum : 20 x 20 cm	10	40	4
551321	Petit : 6,5 x 10 cm	10	240	24
551324	Moyen : 8 x 15 cm	10	80	8
551325	Grand : 10 x 25 cm	10	20	2

Lire attentivement la notice

UrgoTul Border



DESCRIPTION

UrgoTul Border est un pansement hydrocellulaire adhésif siliconé avec une matrice micro-adhérente TLC (Technologie Lipido-Colloïde), technologie innovante développée par les Laboratoires Urgo.

COMPOSITION :

- Matrice TLC micro-adhérente
- Mousse hydrocellulaire polyuréthane fine associée à une couche de super-absorbant
- Support adhésif siliconé imperméable

METHODE DE STERILISATION : Stérilisé par oxyde d'éthylène

PROPRIETES

Matrice TLC micro-adhérente

- Maintien du milieu humide
- Résultat cicatriciel esthétique
- Absence de douleur entre 2 pansements
- Favorise la prolifération des fibroblastes

Mousse hydrocellulaire fine + couche de super-absorbant

- Gestion des exsudats, évite la macération
- Fin et très absorbant
- Compatible avec un système de compression veineuse

Support adhésif siliconé

- Retrait indolore et atraumatique
- Imperméable à l'eau
- Permet les échanges gazeux
- Très bonne tolérance
- Très souple pour s'adapter aux différentes plaies
- Repositionnable

MODE D'ACTION :

Au contact des exsudats de la plaie, la TLC forme un gel et crée un milieu humide favorable au processus de cicatrisation afin que s'exerce l'action des cellules clés de la réparation tissulaire (fibroblastes, kératinocytes, macrophages).

INDICATIONS

INDICATION : **UrgoTul Border** est indiqué dans le traitement des plaies peu à très exsudatives.

Plaies aiguës : Brûlures, Dermabrasions, Plaies traumatiques, Plaies post-opératoires

Plaies chroniques : Ulcères, Escarres, Plaies du pied diabétique.

Le format Sacrum est recommandé pour les plaies localisées au niveau de la région sacrée (escarre sacrée).

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser **UrgoTul Border** en cas de sensibilité connue au pansement ou à l'un de ses composants.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel.
- Si un antiseptique a préalablement été utilisé, rincer attentivement la plaie au sérum physiologique.
- Sécher la peau péri-lésionnelle pour permettre une bonne adhésivité.
- Retirer les ailettes de protection.
- Appliquer **UrgoTul Border** sur la plaie, côté mousse en contact avec la plaie. Pour la forme Sacrum, placer la pointe vers le bas de la région sacrée.
- Appliquer une bande de compression sur le pansement lorsque celle-ci est prescrite.
- Pour retirer **UrgoTul Border**, soulever un coin du pansement et le retirer délicatement.
- Renouvellement tous les 2 à 4 jours en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Incluant une couche de super-absorbant, la compresse centrale ne doit pas être découpée.
- Cependant, les bords adhésifs siliconés peuvent être découpés avec du matériel stérile afin de se conformer aux différents reliefs anatomiques.
- En présence de signes cliniques d'infection locale, le traitement peut, à l'appréciation du médecin, être relayé par un pansement antibactérien de la gamme **Urgo Ag** (type UrgoTul Ag Lite Border, UrgoCell Ag Border, ...).
- Pour assurer une bonne adhésivité, un retrait de l'excédent de pilosité peut être nécessaire.
- En cas d'utilisation concomitante avec une crème, une pommade, un onguent ou une émulsion, laisser sécher la peau avant application du pansement.
- Conditionnement individuel stérile à usage unique : la réutilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Ne pas re-stériliser le pansement.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed).
Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %).

URGO
MEDICAL
HEALING PEOPLE®

UrgoTul Absorb



Pansement absorbant lipido-colloïde micro-adhérent

Urgotul Absorb

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION	GROUPAGE	
		Nombre UCD/Boîte	Nombre UCD	Nombre boîtes
503897	Petit : 6 x 6 cm	16	128	8
503899	Standard : 13 x 12 cm	16	128	8
503901	Grand : 15 x 20 cm	10	40	4

Lire attentivement la notice

UrgoTul Absorb



DESCRIPTION

COMPOSITION : **Urgotul Absorb** est un pansement hydrocellulaire absorbant bénéficiant de la Technologie TLC, innovation des Laboratoires URGO.

Urgotul Absorb est constitué :

- d'une masse lipido-colloïde micro-adhérente au contact de la plaie facilitant la pose, le retrait atraumatique et le positionnement du pansement
- d'une compresse polyuréthane absorbante,
- d'un support non tissé en polyuréthane élastique.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

CICATRISATION :

- En présence des exsudats, les particules hydrocolloïdes issues de la TLC se gélifient et forment un film lipido-colloïde à l'interface plaie/pansement.

Il en résulte des propriétés spécifiques :

- maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation,
 - retrait atraumatique pour les tissus néoformés
 - caractère indolore du renouvellement de pansement pour le patient,
 - respect de la peau péri-lésionnelle.
- La compresse absorbante assure un drainage optimal des exsudats, protégeant la peau péri-lésionnelle de tout phénomène de macération.
 - Le support est souple, conformable et très confortable ; il permet une conformabilité du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.
 - Le pansement est micro-adhérent, facilite les soins infirmiers en termes de praticité et d'observance du traitement.

INDICATIONS

Urgotul Absorb est indiqué pour le traitement de toutes les plaies exsudatives chroniques (escarres, ulcères, plaies du pied diabétique) et aiguës (brûlures du 2^{ème} degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires), et pour le traitement local d'appoint de la plaie cancéreuse en association à son traitement spécifique. En raison de son caractère non-adhésif, **Urgotul Absorb** est recommandé pour le traitement des plaies lorsque la peau péri-lésionnelle est fragilisée.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel, puis rincer au sérum physiologique.
- Application du pansement :
 - retirer les ailettes de protection,
 - appliquer la face micro-adhérente du pansement **Urgotul Absorb** sur la plaie,
 - **Urgotul Absorb** peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter, si besoin, la taille du pansement à la plaie.
 - maintenir le pansement avec une bande de fixation de type **Nylexifix**®,
 - le pansement peut être posé sous contention, si elle est prescrite.
- Renouvellement du pansement : le pansement **Urgotul Absorb** se renouvelle tous les 2 à 4 jours, en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- La masse lipido-colloïde micro-adhérente d'**Urgotul Absorb** adhère aux gants chirurgicaux en latex, aussi est-il recommandé de manipuler le produit en évitant le contact avec la face enduite ou en utilisant des pinces stériles.
- En présence de signes cliniques d'infection locale, le traitement peut, à l'appréciation du médecin, être relayé par un pansement antibactérien de type **Urgocell Ag**.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Ne pas re-stériliser le pansement.
- Stocker le pansement **Urgotul Absorb** à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°). Protéger de la lumière.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed) .
Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %).

UrgoTul Absorb Talon



Pansement absorbant lipido-colloïde micro-adhérent

Urgotul Absorb Talon

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION	GROUPAGE	
			Nombre UCD/Boîte	Nombre UCD
503903	Standard : 12 x 19 cm	16	128	8

Lire attentivement la notice

UrgoTul Absorb Talon



DESCRIPTION

COMPOSITION : Urgotul Absorb Talon est un pansement absorbant bénéficiant de la Technologie TLC, innovation des Laboratoires URGO.

La Technologie TLC consiste à assembler une compresse polyuréthane avec une matrice lipido-colloïde micro-adhérente, qui facilite la pose, le retrait atraumatique et le positionnement du pansement par ses propriétés de micro-adhérence.

Urgotul Absorb Talon est donc constitué :

- d'une masse lipido-colloïde micro-adhérente au contact de la plaie déposée sur une compresse polyuréthane absorbante,
- d'un support non tissé en polyuréthane élastique.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

- En présence des exsudats, les particules hydrocolloïdes issues de la TLC se gélifient et forment un film lipido-colloïde à l'interface plaie/pansement.

Il en résulte des propriétés spécifiques : - maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation,

- gélification au contact de la plaie,
 - retrait atraumatique pour les tissus néoformés,
 - caractère indolore du renouvellement de pansement pour le patient,
 - respect de la peau péri-lésionnelle.
- La compresse absorbante assure un drainage optimal des exsudats, protégeant la peau péri-lésionnelle de tout phénomène de macération.
 - Le support est souple, conformable et très confortable ; il permet une conformabilité du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.
 - Le pansement est micro-adhérent, facilite les soins infirmiers en termes de praticité et d'observance du traitement.

INDICATIONS

Urgotul Absorb Talon est indiqué pour le traitement de toutes les plaies localisées au talon : plaies chroniques (escarres talonnières) et plaies aiguës de la partie postérieure du pied (brûlures du 2^{ème} degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires). En raison de son caractère non adhésif, **Urgotul Absorb Talon** est recommandé dans le traitement des plaies présentant une peau péri-lésionnelle fragilisée.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel, puis rincer au sérum physiologique.
- Application du pansement : - Le pansement a la forme d'une flèche. Retirer les ailettes de protection et positionner la flèche vers l'avant du pied.
 - Placer le talon au centre de la face micro-adhérente du pansement **Urgotul Absorb Talon** (partie rétrécie de la flèche).
 - Fixer la partie postérieure de la flèche au niveau du tendon d'achille. Enlever les ailettes latérales et appliquer soigneusement les parties latérales du pansement de part et d'autre du pied.
 - Maintenir le pansement en place avec une bande de fixation de type Nylex.
- Renouvellement du pansement : le pansement **Urgotul Absorb Talon** se renouvelle tous les 2 à 4 jours, en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- La masse lipido-colloïde micro-adhérente d'**Urgotul Absorb Talon** adhère aux gants chirurgicaux en latex, aussi est-il recommandé de manipuler le produit en évitant le contact avec la face enduite ou en utilisant des pinces stériles.
- En présence de signes cliniques d'infection locale, le traitement peut, à l'appréciation du médecin, être relayé par un pansement antibactérien de type **Urgocell Ag**.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Ne pas re-stériliser le pansement.
- Stocker le pansement **Urgotul Absorb Talon** à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°). Protéger de la lumière.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed).
Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %).

UrgoTul Absorb Border



Pansement absorbant lipido-colloïde micro-adhérent adhésif

Urgotul Absorb Border

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION <i>Nombre UCD/Boîte</i>	GROUPAGE	
			<i>Nombre UCD</i>	<i>Nombre boîtes</i>
508494	Standard : 13 x 13 cm	16	128	8
508501	Grand : 15 x 20 cm	10	40	4

Lire attentivement la notice

UrgoTul Absorb Border



DESCRIPTION

COMPOSITION : **Urgotul Absorb Border** est un pansement hydrocellulaire absorbant issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires URGO.

Urgotul Absorb Border est un pansement absorbant micro-adhérent adhésif semi-perméable constitué de 3 couches :

- au contact de la plaie, une masse lipido-colloïde microadhérente, facilitant la pose, le retrait atraumatique et le positionnement du pansement
- une compresse alvéolaire expansée de mousse de polyuréthane absorbante non sensibilisante disposée au centre du pansement
- un support protecteur en polyuréthane enduit en périphérie d'une masse adhésive à haute tolérance cutanée.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

- La compresse alvéolaire expansée d'**Urgotul Absorb Border** lui confère une forte capacité d'absorption et de rétention des exsudats.
- Au contact des exsudats, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et forment, grâce à la matrice, une interface lipido-colloïde qui crée les conditions favorables au processus cicatriciel (cicatrisation en milieu humide).
- Le support est souple et confortable ; il permet une bonne adaptation du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.
- Les renouvellements sont indolores et atraumatiques pour la plaie.
- L'utilisation sous bandage compressif est possible grâce à la rétention des exsudats dans le pansement.

INDICATIONS

- **Urgotul Absorb Border** est indiqué pour le traitement de toutes les plaies exsudatives chroniques (escarres, ulcères, plaies du pied diabétique), et aiguës (brûlures du 2^{ème} degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires).

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel, puis rincer au sérum physiologique
- Application du pansement : - Retirer les ailettes de protection.
 - Appliquer le pansement **Urgotul Absorb Border** sur la plaie, la compresse centrale au regard de celle-ci.
 - Appliquer une bande de contention lorsque celle-ci est prescrite.
- Renouvellement du pansement : - Le renouvellement du pansement **Urgotul Absorb Border**, se fera tous les 2 à 4 jours, à saturation du pansement et pourra être plus espacé en fonction de la plaie traitée et de son évolution.
 - Le pansement augmente de volume au cours du temps en raison de ses capacités d'absorption des exsudats.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- En présence de signes cliniques d'infection locale, le traitement peut, à l'appréciation du médecin, être relayé par un pansement antibactérien de type **Urgocell Ag**.
- Ne pas découper le pansement.
- Stocker le pansement **Urgotul Absorb Border** à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°C) et de la lumière.
- Ne pas restériliser le pansement.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed) .
Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %).

UrgoTul

Lite



Pansement absorbant fin lipido-colloïde micro-adhérent

Urgotul Lite

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION	GROUPAGE	
			Nombre UCD/Boîte	Nombre UCD
503460	Petit : 6,5 x 10 cm	16	384	24
503476	Standard : 13 x 12 cm	16	192	12
503478	Grand : 15 x 20 cm	10	80	8
503462	Long : 10 x 20 cm	16	96	6

Lire attentivement la notice

UrgoTul

Lite



DESCRIPTION

COMPOSITION : **Urgotul Lite** est un pansement hydrocellulaire absorbant fin bénéficiant de la Technologie TLC, innovation des Laboratoires URGO.

La Technologie TLC consiste à assembler une compresse polyuréthane avec une matrice lipido-colloïde micro-adhérente, qui facilite la pose, le retrait atraumatique et le positionnement du pansement, grâce à ses propriétés de micro-adhérence.

Urgotul Lite est donc constitué :

- d'une masse lipido-colloïde micro-adhérente au contact de la plaie,
- d'une compresse fine polyuréthane absorbante.
- d'un support non tissé en polyuréthane élastique.

PRÉSENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

CICATRISATION : En présence des exsudats, les particules hydrocolloïdes issues de la TLC se gélifient et forment un film lipido-colloïde à l'interface plaie/pansement.

Il en résulte des propriétés spécifiques : - maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation,

- retrait atraumatique pour les tissus néoformés,
- caractère indolore du renouvellement de pansement pour le patient,
- respect de la peau péri-lésionnelle.

- La compresse d'**Urgotul Lite** lui confère des qualités d'absorption et de rétention de faibles quantités d'exsudats.
- Le support est souple, conformable et très confortable et permet la conformabilité du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.
- Le pansement est micro-adhérent, facilite les soins infirmiers en termes de praticité et d'observance du traitement.

INDICATIONS

Urgotul Lite est indiqué pour le traitement de toutes les plaies modérément exsudatives, qu'elles soient chroniques (escarres, ulcères, plaies du pied diabétique) ou aiguës (brûlures du 2^{ème} degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires) et dans le traitement local d'appoint de la plaie cancéreuse en association avec son traitement spécifique.

En raison de son caractère non-adhésif, **Urgotul Lite** est recommandé pour le traitement des plaies dont la peau péri-lésionnelle est fragilisée.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- En cas d'utilisation d'un antiseptique au préalable, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique.
- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel, puis rincer au sérum physiologique.
- Application du pansement : - retirer les ailettes de protection,
 - appliquer la face micro-adhérente du pansement **Urgotul Lite** sur la plaie,
 - **Urgotul Lite** peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter, si besoin, la taille du pansement à la plaie.
 - maintenir le pansement avec une bande de fixation de type **Nyflexif**[®] ou un filet tubulaire,
 - le pansement peut être posé sous compression, si elle est prescrite.
- Renouvellement du pansement : le pansement **Urgotul Lite** se renouvelle tous les 2 à 4 jours.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- La masse lipido-colloïde micro-adhérente d'**Urgotul Lite** adhère aux gants chirurgicaux en latex, aussi est-il recommandé de manipuler le produit en évitant le contact avec la face enduite ou en utilisant des pinces stériles.
- En présence de signes cliniques d'infection locale, le traitement peut, à l'appréciation du médecin, être relayé par un pansement antibactérien de la gamme Urgo (type **Urgotul Ag Lite**).
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Ne pas restériliser le pansement.
- Stocker le pansement **Urgotul Lite** à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°). Protéger de la lumière.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed) .
Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %).

UrgoTul

— Lite Border



Pansement lipido-colloïde absorbant extra fin, prêt à poser

Urgotul Lite Border

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	DIMENSIONS <i>compresse</i>	PRÉSENTATION		GROUPAGE <i>Nombre boîtes</i>
			<i>Nombre UCD/Boîte</i>	<i>Nombre UCD</i>	
503629	Petit : 8 x 8 cm	4,5 x 4,5 cm	16	96	6
503736	Standard : 10 x 12 cm	5,7 x 8,2 cm	16	256	16
503753	Grand : 15 x 20 cm	8,5 x 14,7 cm	10	140	14
503631	Post-opératoire : 6,5 x 10 cm	3 x 6,2 cm	16	192	12
503738	Post-opératoire : 10 x 20 cm	5,7 x 14,7 cm	10	140	14

Lire attentivement la notice

UrgoTul

Lite Border



DESCRIPTION

COMPOSITION : **Urgotul Lite Border** est un pansement absorbant issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires Urgo.

Urgotul Lite Border est constitué de 3 couches :

- Une interface lipido-colloïde non adhérente (interface TLC) au contact de la plaie pour une cicatrisation en milieu humide,
- Une compresse fine disposée au centre du pansement pour absorber les exsudats et protéger la plaie,
- Un support protecteur adhésif semi-perméable en polyuréthane enduit en périphérie d'une masse adhésive de haute tolérance cutanée pour des soins simples et rapides.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES

- Au contact des exsudats de la plaie, les particules hydrocolloïdes se gélifient et interagissent avec la composante vaselinée d'**Urgotul Lite Border** pour former une interface lipido-colloïde de contact qui crée les conditions favorables au processus cicatriciel (Cicatrisation en milieu humide).
- La compresse fine d'**Urgotul Lite Border** disposée au centre du pansement absorbe les exsudats et protège la plaie.
- Le support protecteur adhésif semi-perméable en polyuréthane enduit en périphérie d'une masse adhésive de haute tolérance cutanée protège et simplifie les soins. Ainsi, **Urgotul Lite Border** permet une praticité des soins et un meilleur confort pour le patient.
- La souplesse et la finesse du pansement lui confèrent une grande conformabilité adaptée aux soins des plaies de petite à moyenne surface.
- La structure aérée de la trame, ainsi que la perméabilité aux gaz de la compresse évitent les phénomènes de macération.
- Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, l'interface d'**Urgotul Lite Border** n'adhère pas à la plaie : les renouvellements sont donc indolores pour le patient et atraumatiques pour la plaie.

INDICATIONS

- **Urgotul Lite Border** est indiqué pour le traitement des plaies aiguës (plaies traumatiques, dermabrasions, plaies post-opératoires, brûlures), chroniques (ulcères, escarres) au stade de bourgeonnement et d'épidermisation.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l'application d'**Urgotul Lite Border**.
- Bien sécher le pourtour de la plaie.
- Retirer une ailette de protection d'**Urgotul Lite Border**. Appliquer la bordure adhésive à 1 cm au moins du bord de la plaie.
- Retirer la seconde ailette et appliquer **Urgotul Lite Border**. Lisser doucement la bordure adhésive.
- **Urgotul Lite Border** peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter, si besoin, la taille du pansement à la plaie.
- **Urgotul Lite Border** ne doit pas être plié.
- **Urgotul Lite Border** sera renouvelé tous les 2 à 4 jours et pourra être laissé en place jusqu'à 5 jours, en fonction de la plaie traitée et de son évolution clinique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- En présence de signes cliniques d'infection locale, le traitement peut, à l'appréciation du médecin, être relayé par un pansement antibactérien de type **Urgotul Ag Lite Border**.
- Ne pas restériliser le pansement.
- Stocker le pansement **Urgotul Lite Border** à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°C).

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed).
Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %).