

# Urolis

| Références | Désignations       |
|------------|--------------------|
| 09/8000    | Urinal UROLIS      |
| 09/8003    | Adaptateur féminin |



## Atouts :

- L'Urolis s'utilise en toute sécurité en position assise ou allongée.
- Grâce à son système anti-déversement, le contenu de l'Urolis ne se déverse pas dans le lit.
- Un adaptateur féminin s'emboîtant directement sur le cône est disponible.
- L'utilisation et l'entretien de l'Urolis sont facilités par ses systèmes d'ouverture et de fermeture : tourner la bague et le cône se retire facilement.
- Bouchon de vidange avec joint incrusté.
- Graduations de niveau.
- Capuchon de sécurité anti-odeur.
- Poignée ergonomique.

## Description :

- Profondeur : 24 cm, Hauteur : 14 cm
- Longueur hors tout : 30 cm
- Largeur avant : 8,5 cm , largeur arrière : 14 cm
- Poids net Urolis : 330 g, adaptateur : 30 g
- Contenance : 1,5 litres

## Composition :

- Récipient : Polyéthylène Haute Densité.
- Capuchon : Polyéthylène Basse Densité.
- Cône : Polyéthylène Haute Densité, joint en élastomère, bille en acier inoxydable.
- Bouchon de vidange : Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre, joint élastomère.
- Adaptateur féminin : mélange d'élastomère et de polypropylène homopolymère.

## Stockage :



**Conditions d'élimination :** Le dispositif médical ne doit pas être jeté dans la nature et doit être éliminé en déchetterie

## Entretien :



- 1 Retirer le capuchon au niveau de la poignée



- 2 Retirer l'adaptateur féminin. Tourner la bague pour retirer l'embout facilement



- 3 Retirer le bouchon de vidange

- Eau et désinfectant habituel (type javel)
- Autoclave 130°C


## Précautions d'emploi

- Tenir hors de portée des enfants.
- WinnCare France ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

## Garantie :

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.

Tout incident grave avec ce dispositif médical doit faire l'objet d'une remontée au fabricant et à l'autorité compétente du pays où le patient est établi.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage 

**MD**



**WINNCARE FRANCE** - 4 Le Pas du Château - F- 85670 SAINT PAUL MONT PENIT  
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00  
[www.winncare.fr](http://www.winncare.fr) - [contact@winncare.fr](mailto:contact@winncare.fr)