

URibag® F



(GB) Recommendations for use

(DE) Gebrauchsanleitung

(FR) Conseils d'utilisation

(NL) Gebruiksaanwijzing


(ES) Consejos de utilizacion

(FR)


- Enlevez le bouchon et sortez la poche en latex de son étui.
- Avant la première utilisation, lavez l'URibag avec de l'eau chaude et un détergent doux, et répétez cette opération après chaque utilisation.
- Si vous avez utilisé l'URibag et ne pouvez pas le vider tout de suite, refermez le bouchon et videz l'URibag à un moment ou dans un lieu qui s'y prête mieux.
- Après avoir vidé et nettoyé l'URibag, vous pouvez remettre la poche en latex dans son étui et fermer le couvercle de l'étui.
- L'URibag a une capacité maximale de 1200 ml.
- Ne pas utiliser à nouveau l'URibag si celui présente des signes d'usure, si la poche fuit ou si le bouchon ne ferme pas bien.
- En cas de problème lié à la qualité du produit ou d'incident grave, prenez contact avec le fabricant.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Il est conseillé – pour des raisons d'hygiène – de réserver l'URibag uniquement à un usage personnel.
- En cas d'allergie au latex, il est préférable de ne pas utiliser l'URibag.
- Eviter pour autant que possible toute exposition de l'URibag aux ultraviolets (lumière du jour et soleil) et tout contact avec un produit huileux.
- La poche est en latex, un produit 100 % naturel, qui peut par conséquent présenter à terme des signes d'usure.

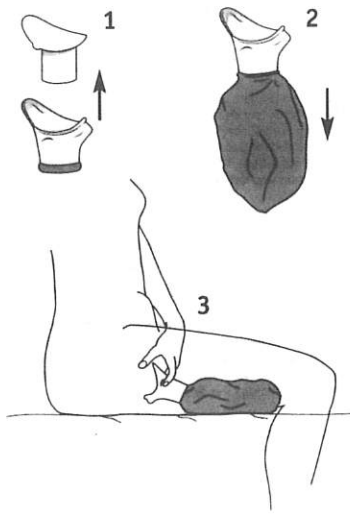

Put away - Weglegen - Serrer - Opbergen - Cerrar

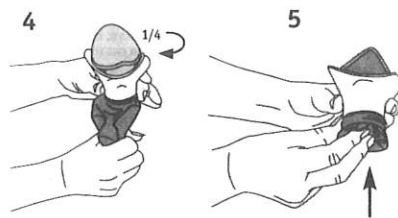

See also www.uribag.com - How it works!

