




# Velpeau®

## Genucast 0° Classic

## Genucast 20° Classic

Attelle de genou en position à 0°  
Knee splint at 0 degree of flexion

Attelle de genou en flexion à 20°  
Knee splint at 20 degree of flexion

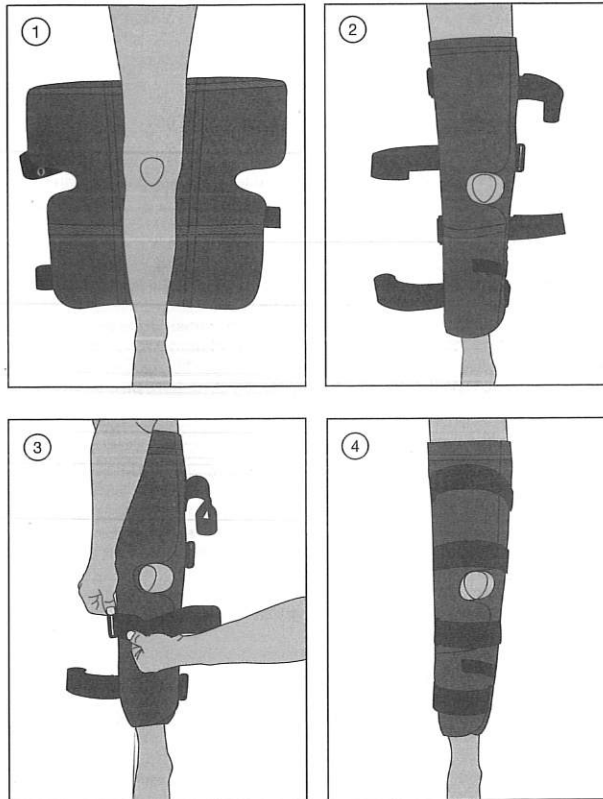

un seul patient – à usage multiple  
single patient – multiple use



Recyclable Packaging



Legal manufacturer / Fabricant légal:  
Promedics Orthopaedic Limited,  
Port Glasgow Industrial Estate, Gareloch Road,  
Port Glasgow, PA14 5XH, United Kingdom



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60,  
6827 AT, Arnhem,  
The Netherlands



Importer:  
Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG  
Westerwaldstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany  
Tel. +49 2634 99-0 · info@de.LRmed.com  
www.Lohmann-Rauscher.com · Made in China

Velpeau® is a registered trademark of Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG  
Velpeau® est une marque déposée de Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

**Cher client,**

**Nous vous remercions de votre confiance et de l'intérêt que vous portez aux produits L&R.**

**Veillez lire attentivement le mode d'emploi. Votre médecin traitant ou le personnel médical qui vous a remis ce produit pourra vous fournir de plus amples informations.**

**Description du produit et caractéristiques de performance :**

Velpeau® Genucast Classic est une orthèse d'immobilisation du genou. Des baleines en aluminium conformables contribuent à immobiliser l'articulation du genou.

**Composition du produit :**

polyester, polyuréthane, polyoxyméthylène, aluminium, polyamide, silice.

**Utilisation prévue :**

Orthèse pour l'immobilisation de l'articulation du genou

**Indications :**

- immobilisation temporaire de l'articulation du genou après des blessures/opérations

**Contre-indications :**

- maladies de peau et/ou blessures au niveau de la zone d'application (peau lésée, non intacte ou plaie ouverte)
- Avant de poser/de porter Velpeau® Genucast Classic, un avis médical est nécessaire dans les cas suivants :
- réactions allergiques à l'un ou plusieurs des composants

**Effets indésirables :**

Des irritations cutanées et allergies peuvent survenir dans de très rares cas.

**Conseils d'utilisation :**

1. La pose doit être réalisée allongée.
2. Il est recommandé de faire ajuster personnellement les baleines en aluminium latérales par un spécialiste afin de garantir un ajustement adapté.
3. Posez l'orthèse sous la jambe de sorte que la partie intérieure avec les bandes de silicone soit en contact avec la jambe. Veillez à ce que la partie plus large de l'orthèse soit positionnée sous la cuisse et que la partie plus étroite soit sous le mollet. (Ill. 1).
4. Fermez l'orthèse au-dessus de la jambe. Utilisez ici la bande de fixation provisoire. Les extrémités avant des orthèses se superposent. Veillez à ce que la patella soit au milieu dans l'ouverture prévue (Ill. 2).
5. Faites passer les sangles dans les boucles opposées (Ill. 3).
6. Pour que l'attelle ait une bonne assise, fixez d'abord les sangles directement au-dessus et au-dessous du genou. Fixez ensuite les sangles restantes (Ill. 4).
7. Les sangles sont correctement réglées quand l'orthèse repose fermement sur la jambe et ne serre pas. En cas de besoin, tirez plus fermement sur les sangles ou desserrez-les.

**Mise en garde et précautions d'emploi :**

- Velpeau® Genucast Classic doit être porté sur avis médical. Lors de la première utilisation, un professionnel de santé doit montrer au patient la bonne utilisation de Velpeau® Genucast Classic.
- Posez Velpeau® Genucast Classic à l'aide du mode d'emploi et des illustrations fournis. Veillez vérifier régulièrement le positionnement du Velpeau® Genucast Classic pendant l'utilisation et le corriger si nécessaire.
- C'est au professionnel de santé de déterminer la durée de port quotidienne du Velpeau® Genucast Classic en fonction de l'indication et de l'évolution de la guérison.
- En cas d'inconfort ou de problèmes, consultez un professionnel de santé.
- Si des œdèmes ou des sensations d'engourdissement surviennent dans la zone traitée, il convient de retirer Velpeau® Genucast Classic et de consulter un professionnel de santé qualifié.
- Velpeau® Genucast Classic doit être utilisé uniquement sur peau saine.
- Les plaies doivent être recouvertes d'un pansement adapté avant l'emploi.
- Velpeau® Genucast Classic est destiné au traitement d'un seul patient.
- La durée de vie du Velpeau® Genucast Classic peut être compromise par certains facteurs, par ex. objets à angles vifs ou détérioration de l'auto-agrippant. Pour éviter une détérioration prématurée, la fermeture auto-agrippante doit toujours être fermée, par exemple lorsque le produit n'est pas porté ou pendant le lavage.
- Velpeau® Genucast Classic ne doit pas être utilisé au-delà du dernier jour du mois indiqué sur l'emballage (date d'expiration).
- Consultez un professionnel de santé et remplacez éventuellement le produit s'il présente des signes d'usure trop importante nuisant à ses performances.

**Instructions d'entretien :**

Retirez toutes les baleines et nettoyez-les séparément avec un chiffon humide. Veillez à l'orientation des baleines afin de garantir qu'elles seront correctement réutilisées après lavage. Lavez l'orthèse en machine à 30 °C (lavage délicat) avec des couleurs identiques. Fermez les fermetures auto-agrippantes. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Laisser sécher Velpeau® Genucast Classic à l'air libre, loin d'une source de chaleur. Ne pas passer au sèche-linge. Ne pas repasser ni nettoyer à sec. Ne pas utiliser d'adoucissant. Nettoyez régulièrement la zone auto-agrippante pour qu'elle conserve son adhérence et assure ainsi l'efficacité du produit.

**Conditions de stockage et de transport :**

Velpeau® Genucast Classic doit être conservé à l'abri des rayons du soleil et de l'humidité (de préférence dans son emballage d'origine).

**Élimination :**

En Europe, un code de déchet du Chapitre 18 01 de la Directive du catalogue européen des déchets (catalogue européen des déchets – CED, AVV en Allemagne) peut être affecté aux déchets de produits et un code de déchet du Chapitre 15 01 de cette même directive peut être affecté aux déchets d'emballage. Les emballages étiquetés comme recyclables doivent être déposés dans les systèmes de recyclage nationaux correspondants.

**Remarque générale :**

En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et les autorités sanitaires responsables.

Marquage CE initial : 2018