



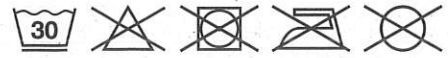


Velpeau®

Orthèse de Cheville

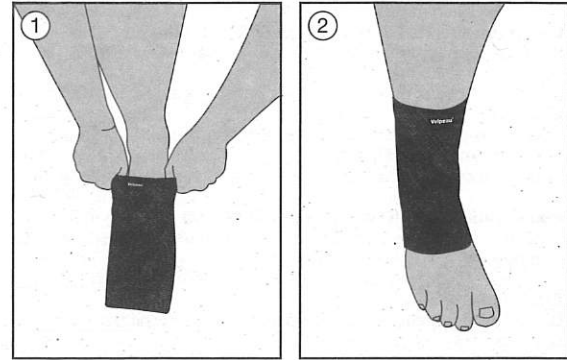

 Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany
www.Lohmann-Rauscher.com
www.velpeau.fr

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous portez à ce produit.

Veillez lire attentivement le mode d'emploi. Pour toute question, veuillez vous adresser à un médecin ou à un pharmacien.

Description du produit et caractéristiques de performance

L'Orthèse de Cheville Velpeau® est un bandage tricoté présentant une action compressive.

L'orthèse peut être portée sur la cheville droite ou gauche.

Composition du produit

Polyester recyclé, élasthane

Utilisation prévue (Pourquoi le produit est utilisé ?)

Bandage pour la compression et la stabilisation de la cheville

Indications (Pour quels problèmes/pathologies le produit est utilisé ?)

- douleurs chroniques ou aiguës dans l'articulation de la cheville
- entorses bénignes de la cheville
- début d'arthrose ou d'arthrite avec et sans épanchement articulaire

Contre-indications (Quand le produit ne doit pas être utilisé ?)

- allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit

Effets indésirables

Des irritations cutanées et/ou allergies peuvent survenir dans de très rares cas.

Mise en garde et mesures de précaution

- L'Orthèse de Cheville Velpeau® doit être utilisée uniquement sur une peau intacte. Les plaies doivent être recouvertes d'un pansement adapté avant la pose.
- En cas de maladies de peau et/ou blessures au niveau de la zone d'application (peau lésée, non intacte ou plaie ouverte), consultez un médecin avant de poser le produit.
- Si des œdèmes ou des sensations d'engourdissement surviennent dans la zone traitée, il convient de retirer le produit et de consulter un professionnel de santé qualifié.
- En cas de troubles de la circulation sanguine et/ou de troubles sensoriels (par ex. diabète mellitus), de maladies artérielles (artériopathie oblitérante), de maladies veineuses (inflammation veineuse, thrombose veineuse), de troubles du système lymphatique, consultez un médecin avant de poser le produit.

- L'Orthèse de Cheville Velpeau® doit être enlevée lors de longues périodes de repos pour éviter les effets congestifs indésirables. Ne pas porter l'orthèse pendant le sommeil.
- Le produit ne doit être utilisé que conformément aux indications mentionnées ci-dessus et uniquement en cas de symptômes légers et initiaux.
- En cas de persistance des douleurs ou de problèmes après une période d'utilisation de deux semaines, il est recommandé de consulter un personnel médical spécialisé.
- Le produit ne doit pas être utilisé au-delà du dernier jour du mois indiqué sur l'emballage (date de péremption).
- En cas de traces d'usure excessives pouvant nuire à la performance du produit (ex. : résistance à la traction, compression médicale), consultez le personnel médical spécialisé et remplacez éventuellement le produit.

Conseils d'utilisation

Application

Saisissez le bandage par son bord supérieur (extrémité de la marque du produit) et enfilez-le comme une chaussette sur votre pied (ill. 1). Assurez-vous que le bandage est correctement positionné (ill. 2).

Instructions d'entretien

Lavez le bandage en machine à 30°C (lavage délicat) avec des couleurs identiques. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Laissez sécher l'Orthèse de Cheville Velpeau® à l'air libre loin d'une source de chaleur. Ne pas passer au sèche-linge. Ne pas repasser, ni nettoyer à sec. Utilisez si possible un filet à linge.

Conditions de conservation et de transport

L'Orthèse de Cheville Velpeau® doit être conservée à l'abri des rayons du soleil et de l'humidité (de préférence dans son emballage d'origine).

Élimination

En Europe, un code de déchet du Chapitre 18 01 de la Directive du catalogue européen des déchets (catalogue européen des déchets – CED, AVV en Allemagne) peut être affecté aux déchets de produits et un code de déchet du Chapitre 15 01 de cette même directive peut être affecté aux déchets d'emballage. Les emballages recyclables doivent être déposés dans les systèmes de recyclage nationaux correspondants.

Remarque générale

En cas d'incident grave, veuillez contacter ou demander à votre médecin ou à votre pharmacien de contacter le fabricant et/ou l'autorité sanitaire compétente.