



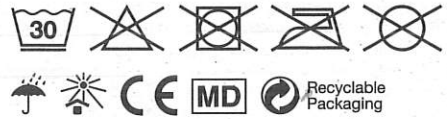

# Velpeau®

## Orthèse de Poignet

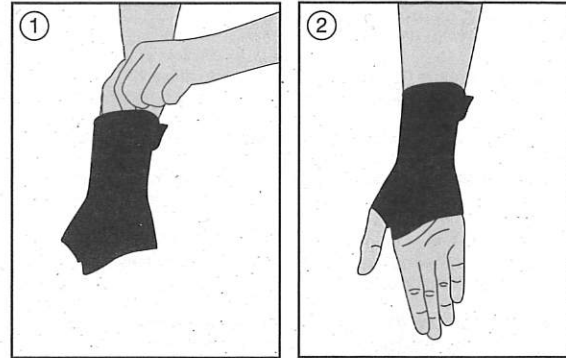

 Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG  
Westerwaldstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany  
[www.Lohmann-Rauscher.com](http://www.Lohmann-Rauscher.com)  
[www.velpeau.fr](http://www.velpeau.fr)

Cher client,

**Nous vous remercions de la confiance que vous portez à ce produit.**

**Veillez lire attentivement le mode d'emploi. Pour toute question, veuillez vous adresser à un médecin ou à un pharmacien.**

**Description du produit et caractéristiques de performance**  
L'Orthèse de Poignet Velpeau® est un bandage tricoté présentant une action compressive.  
L'orthèse peut être portée au poignet gauche ou droit.

**Composition du produit**  
Polyester recyclé, élasthanne

**Utilisation prévue (Pourquoi le produit est utilisé ?)**  
Bandage pour la compression et la stabilisation du poignet

**Indications (Pour quels problèmes/pathologies le produit est utilisé ?)**

- douleurs chroniques ou aiguës dans la région du poignet
- tendinite ou tendovaginite dans la région de l'avant-bras ou de la main
- entorses bénignes du poignet
- début d'arthrose ou d'arthrite avec et sans épanchement articulaire
- surcharge fonctionnelle dans la région du poignet

**Contre-indications (Quand le produit ne doit pas être utilisé ?)**  
• allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit

**Effets indésirables**  
Des irritations cutanées et/ou allergies peuvent survenir dans de très rares cas.

**Mise en garde et mesures de précaution**

- L'Orthèse de Poignet Velpeau® doit être utilisée uniquement sur une peau intacte. Les plaies doivent être recouvertes d'un pansement adapté avant la pose.
- En cas de maladies de peau et/ou blessures au niveau de la zone d'application (peau lésée, non intacte ou plaie ouverte), consultez un médecin avant de poser le produit.
- Si des œdèmes ou des sensations d'engourdissement surviennent dans la zone traitée, il convient de retirer le produit et de consulter un professionnel de santé qualifié.

- En cas de troubles de la circulation sanguine et/ou de troubles sensoriels (par ex. diabète mellitus), de maladies artérielles (artériopathie oblitérante), de maladies veineuses (inflammation veineuse, thrombose veineuse), de troubles du système lymphatique, consultez un médecin avant de poser le produit.
- L'Orthèse de Poignet Velpeau® doit être enlevée lors de longues périodes de repos pour éviter les effets congestifs indésirables. Ne pas porter l'orthèse pendant le sommeil.
- Le produit ne doit être utilisé que conformément aux indications mentionnées ci-dessus et uniquement en cas de symptômes légers et initiaux.
- En cas de persistance des douleurs ou de problèmes après une période d'utilisation de deux semaines, il est recommandé de consulter un personnel médical spécialisé.
- Le produit ne doit pas être utilisé au-delà du dernier jour du mois indiqué sur l'emballage (date de péremption).
- En cas de traces d'usure excessives pouvant nuire à la performance du produit (ex. : résistance à la traction, compression médicale), consultez le personnel médical spécialisé et remplacez éventuellement le produit.

#### Conseils d'utilisation

##### Application

Saisissez le bandage par son bord supérieur et passez-le sur votre main de manière à ce que le pouce se trouve dans l'orifice prévu à cet effet (ill. 1). Assurez-vous que le bandage est correctement positionné (ill. 2).

##### Instructions d'entretien

Lavez le bandage en machine à 30°C (lavage délicat) avec des couleurs identiques. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Laissez sécher l'Orthèse de Poignet Velpeau® à l'air libre loin d'une source de chaleur. Ne pas passer au sèche-linge. Ne pas repasser, ni nettoyer à sec. Utilisez si possible un filet à linge.

##### Conditions de conservation et de transport

L'Orthèse de Poignet Velpeau® doit être conservée à l'abri des rayons du soleil et de l'humidité (de préférence dans son emballage d'origine).

##### Élimination

En Europe, un code de déchet du Chapitre 18 01 de la Directive du catalogue européen des déchets (catalogue européen des déchets – CED, AVV en Allemagne) peut être affecté aux déchets de produits et un code de déchet du Chapitre 15 01 de cette même directive peut être affecté aux déchets d'emballage. Les emballages recyclables doivent être déposés dans les systèmes de recyclage nationaux correspondants.

##### Remarque générale

En cas d'incident grave, veuillez contacter ou demander à votre médecin ou à votre pharmacien de contacter le fabricant et/ou l'autorité sanitaire compétente.