



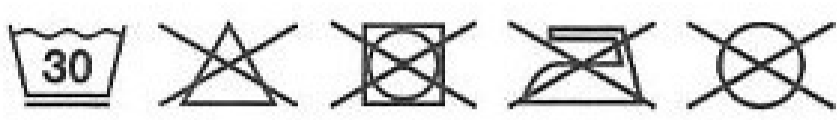

# Velpeau® Rhizo Classic

Orthèse de pouce

Thumb orthosis

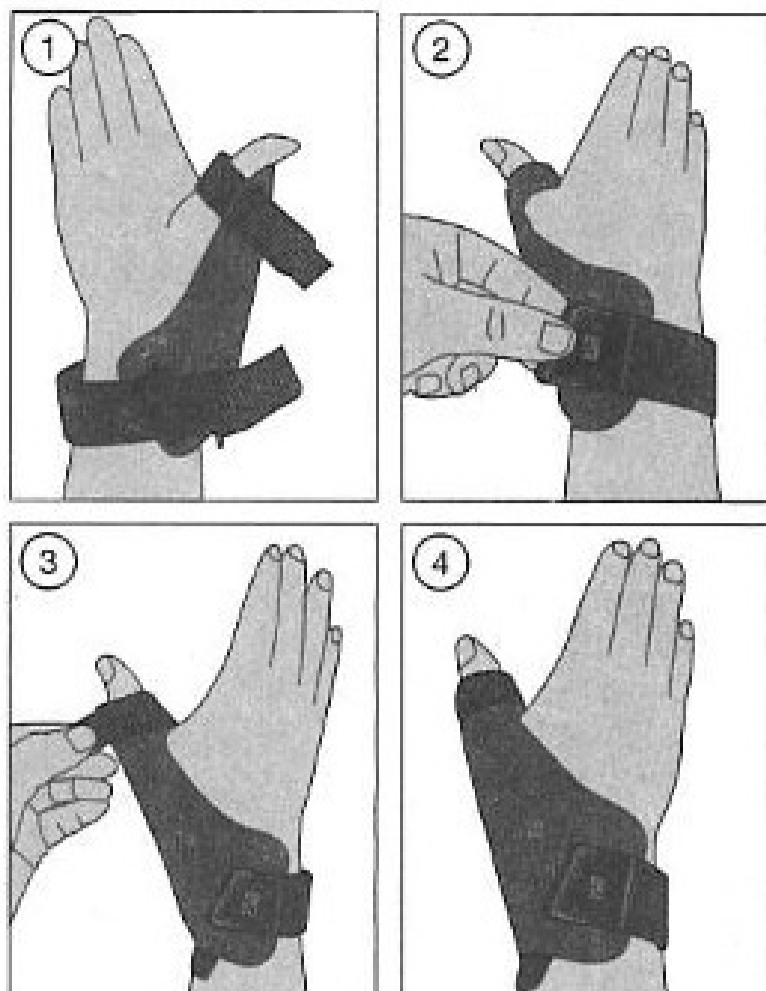

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG  
Westerwaldstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany  
www.Lohmann-Rauscher.com

4041412/2020-10

## fr Mode d'emploi

Cher client,

**Nous vous remercions de votre confiance et de l'intérêt que vous portez aux produits L&R.**

**Veillez lire attentivement le mode d'emploi. Votre médecin traitant ou le personnel médical qui vous a remis ce produit pourra vous fournir de plus amples informations.**

### Description du produit et caractéristiques de performance :

Velpeau® Rhizo Classic est une orthèse de pouce. Une baleine anatomiquement préformée et deux sangles de stabilisation immobilisent l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce en réduisant la mobilité. La baleine peut être adaptée individuellement par un spécialiste en cas de besoin. L'orthèse peut être portée sur le pouce droit ou gauche.

### Composition du produit :

Polyamide, polyester, polyuréthane, coton, polyacétal, aluminium

### Utilisation prévue :

Orthèse pour l'immobilisation du pouce

### Indications :

- immobilisation en cas d'états post-traumatiques et post-opératoires de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce
- immobilisation en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur)
- immobilisation en cas d'instabilité chronique des articulations du pouce
- immobilisation en cas d'altérations dégénératives dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce (arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, rhizarthrose)

### Contre-indications :

Allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit

### Effets indésirables :

Des irritations cutanées et/ou allergies peuvent survenir dans de très rares cas.

### Mise en garde et précautions d'emploi :

- Velpeau® Rhizo Classic doit être porté sur avis médical. Lors de la première utilisation, un professionnel de santé doit montrer au patient la bonne utilisation du produit.
- C'est au professionnel de santé de déterminer la durée de port quotidienne de Velpeau® Rhizo Classic en fonction de l'indication et de l'évolution de la guérison.
- Velpeau® Rhizo Classic doit être utilisé uniquement sur peau saine. Les plaies doivent être recouvertes d'un pansement adapté avant l'emploi.
- En cas de maladies de la peau et/ou de blessures au niveau de la zone d'application (peau lésée, non intacte ou plaie ouverte), veuillez consulter votre médecin traitant / demander un avis médical avant de poser le produit.
- En cas de spécificités morphologiques individuelles du poignet ou du pouce à traiter qui limiteraient une pose et une application correctes de l'orthèse, veuillez consulter votre médecin traitant / demander un avis médical avant de poser le produit.
- Posez Velpeau® Rhizo Classic à l'aide du mode d'emploi et des illustrations fournis. Veuillez vérifier le positionnement de Velpeau® Rhizo Classic pendant l'utilisation et le corriger si nécessaire.
- En cas d'inconfort ou de problèmes, consultez un professionnel de santé.
- Si des oedèmes ou des sensations d'engourdissement surviennent dans la zone traitée, il convient de desserrer ou de retirer Velpeau® Rhizo Classic et de consulter un professionnel de santé qualifié.
- Velpeau® Rhizo Classic est destiné au traitement d'un seul patient.
- La durée de vie du Velpeau® Rhizo Classic peut être compromise par certains facteurs, par ex. objets à angles vifs ou détérioration de l'auto-agrippant. Pour éviter une détérioration prématurée, la fermeture auto-agrippante doit toujours être fermée, par exemple lorsque le produit n'est pas porté ou pendant le lavage.
- Velpeau® Rhizo Classic ne doit pas être utilisé au-delà du dernier jour du mois indiqué sur l'emballage (date d'expiration).
- Consultez un professionnel de santé et remplacez éventuellement le produit s'il présente des signes d'usure trop importante nuisant à ses performances.

### Conseils d'utilisation :

#### Application :

1. Ouvrez au maximum les deux fermetures auto-agrippantes. Veillez à ce que la sangle de poignet ne glisse pas et ne sorte pas de la boucle. Introduire la main et le pouce dans l'orthèse (Ill. 1).
2. Serrez la grande sangle autour du poignet, puis fixez-la à l'aide de la fermeture auto-agrippante sur l'orthèse (Ill. 2).
3. Serrez ensuite la petite sangle autour du pouce et fixez-la à l'aide de la fermeture auto-agrippante (Ill. 3).
4. Assurez-vous que l'orthèse et les sangles (Ill. 4) soient bien positionnées et corrigez si nécessaire la pression en réglant la force du serrage. Il est recommandé de faire adapter la baleine par un spécialiste pour que l'orthèse soit parfaitement ajustée.

#### Instructions d'entretien :

Lavage en machine à 30 °C (lavage délicat) avec des couleurs identiques. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Laisser sécher Velpeau® Rhizo Classic à l'air libre, loin d'une source de chaleur. Ne pas passer au sèche-linge. Ne pas repasser ni nettoyer à sec. Fermez les fermetures auto-agrippantes et nettoyez si possible un filet à linge. Nettoyez régulièrement la zone auto-agrippante pour qu'elle conserve son adhérence et assure ainsi l'efficacité du produit.

#### Conditions de stockage et de transport :

Velpeau® Rhizo Classic doit être conservé à l'abri des rayons du soleil et de l'humidité (de préférence dans son emballage d'origine).

#### Élimination :

En Europe, un code de déchet du Chapitre 18 01 de la Directive du catalogue européen des déchets (catalogue européen des déchets – CED, AVV en Allemagne) peut être affecté aux déchets de produits et un code de déchet du Chapitre 15 01 de cette même directive peut être affecté aux déchets d'emballage. Les emballages étiquetés comme recyclables doivent être déposés dans les systèmes de recyclage nationaux correspondants.

#### Remarque générale :

En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et les autorités sanitaires responsables.

Marquage CE initial : 2019

