



Nasaly Eau de Mer

JET TONIQUE

Dispositif médical

Nasaly Eau de Mer Jet Tonique – HYGIÈNE NASAL

Eau de Mer Isotonique et Aloe Vera

Nasaly Eau de Mer Jet Tonique est un spray nasal sans gaz propulseur à base d'eau de mer isotonique (0,9 % de chlorure de sodium).

Nasaly Eau de Mer Jet Tonique nettoie en profondeur les cavités nasales grâce à son action mécanique et aide à éliminer le mucus. Une bonne utilisation de **Nasaly Eau de Mer Jet Tonique** pour l'hygiène nasale des enfants et des adultes constitue une aide thérapeutique dans certaines indications telles que : la rhinopharyngite, la rhinite obstructive et la sinusite, le nez sec, l'enrouement dû à des muqueuses sèches, adjuvant dans le traitement ORL et pédiatrique. L'aloë vera maintient et prolonge l'hydratation des voies nasales, ce qui assure la perméabilité de la muqueuse nasale.

Nasaly Eau de Mer Jet Tonique maintient la spécificité des propriétés vitales de l'eau de mer. L'eau de mer provient de la Baie de Cancale en Bretagne, réputée pour la qualité de son eau. La Baie de Cancale bénéficie d'une amplitude de marée exceptionnelle (12 m) et est balayée par des courants dominants forts qui limitent la pollution des eaux. Cette combinaison unique garantit que l'eau se nettoie constamment et est donc toujours pure. Le prélèvement est effectué automatiquement lorsque la qualité de l'eau est optimale (après la période de marée haute). La zone de prélèvement est classée en classe A et fait l'objet de contrôles sanitaires continus (contamination microbiologique, chimique, phytoplancton, pH...).

Composition :

Eau purifiée, eau de mer (chlorure de sodium 0,9 %), aloë vera et hydroxyde de sodium.

Mode d'emploi :

Pour usage nasal uniquement.

1. Retirer le capuchon protecteur.
2. Introduire doucement l'applicateur nasal dans une narine et appuyer sur la pompe pour appliquer le produit.
3. Laisser s'écouler l'excès de solution pour extraire le mucus, puis se moucher.
4. Répéter le processus avec l'autre narine.
5. Nettoyer l'embout avec de l'eau et bien sécher.
6. Reboucher le flacon avec le capuchon protecteur jusqu'à la prochaine utilisation. Appliquer 2-6 pulvérisations par jour dans chaque narine, aussi souvent que nécessaire.

Contre-indications et effets indésirables :

- Ne pas utiliser ce dispositif médical en cas d'allergie connue ou suspectée à l'un des composants.
- Aucun effet indésirable n'a été décrit aux doses thérapeutiques recommandées, mais si vous ressentez des effets secondaires, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Tout événement indésirable grave lié à ce produit doit être déclaré au fabricant, au distributeur et à l'autorité sanitaire nationale de votre pays.
- Aux doses indiquées, aucune interaction n'est connue. Cependant, il est recommandé de consulter votre médecin habituel si vous prenez un traitement.

Avertissements et précautions :

- Pour des raisons d'hygiène et pour éviter la transmission d'agents pathogènes, ce produit ne doit pas être utilisé par plus d'une personne.
- Garder hors de portée des enfants.

Conservation et date d'expiration :

- Ne pas utiliser le produit après la date d'expiration indiquée sur la boîte et le flacon.
- Conserver dans un endroit sec et frais. Conserver en dessous de 30°C et à l'abri du soleil ou d'autres sources de chaleur.
- Déposer le flacon et le capuchon protecteur dans les conteneurs correspondants.
- Il est recommandé de ne pas jeter la boîte ou la notice pendant l'utilisation du produit.

Présentation :

Flacon pulvérisateur pressurisé de 120 ml avec applicateur nasal.



Sans conservateur
Sans alcool
Bouteille utilisable dans toutes les positions

Date d'émission : 17/07/2024
Version : 3

Partager votre expérience avec le produit nous aidera à nous améliorer :



 **STE PHARMACEUTICALS, S.L.U.**
Av. Universitat Autònoma,
13 Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
BARCELONE - ESPAGNE
+34 666 570 401

Distribué par :
Laboratoire Vicks
163-165, Quai Aulagnier
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
FRANCE
0800 941 452

