



POUR UNE LUBRIFICATION DURABLE DES YEUX

Mode d'emploi

VISMED® GEL MULTI

Hyaluronate de sodium obtenu par fermentation 0,3 %. Hydrogel transparent d'hyaluronate de sodium naturel hautement purifié. Sans protéine animale. Stérile, sans conservateur.

Composition :

1 ml de solution au pH neutre contient 3,0 mg d'hyaluronate de sodium, du chlorure de sodium, du chlorure de potassium, du phosphate disodique, du citrate de sodium, du chlorure de magnésium, du chlorure de calcium et de l'eau purifiée. La solution est hypotonique.

Indications :

Sensations modérées et sévères de sécheresse oculaire.

Contre-indications :

Hypersensibilité individuelle à l'un des composants du produit.

Précautions :

Ne pas toucher l'embout du flacon ouvert et ne pas toucher la surface de l'œil avec l'embout. Replacer le capuchon de protection de VISMED® GEL MULTI après usage. VISMED® GEL MULTI peut être utilisé jusqu'à 6 mois après la première utilisation. Toute solution non utilisée dans les 6 mois suivant l'ouverture doit être jetée. Dans le cas contraire, la stérilité n'est plus garantie et ceci peut être associé à un risque d'infection. Ne pas utiliser VISMED® GEL MULTI si l'emballage est endommagé. Si les troubles persistent pendant l'utilisation de VISMED® GEL MULTI, consulter un médecin.

Interactions :

Ne pas utiliser VISMED® GEL MULTI en même temps que d'autres médicaments ou produits ophtalmiques, car cela pourrait en modifier les effets. Attendre au moins 15 minutes avant d'instiller d'autres produits ophtalmiques.

Effets indésirables :

Dans de très rares cas (moins de 1 cas pour 10 000 patients), des troubles transitoires peuvent survenir, tels qu'une irritation de la conjonctive, une

sensation de corps étranger, une douleur, une rougeur ou une sensation de brûlure dans l'œil ou une vision momentanément trouble.

Déclaration des effets indésirables :

Tout incident grave survenant en lien avec le dispositif doit être déclaré au fabricant TRB CHEMEDICA AG et à l'autorité compétente locale de l'utilisateur.

Posologie et administration :

Enlever la bague d'invulnérabilité avant la première administration. Retirer le capuchon de protection. Incliner la tête vers l'arrière et positionner l'embout du flacon au-dessus de l'œil à traiter. Tirer la paupière inférieure vers le bas avec l'index d'une main. Presser le flacon et une goutte de VISMED® GEL MULTI sera libérée (voir illustrations).

Sauf recommandation contraire, instiller 1 ou 2 gouttes de VISMED® GEL MULTI dans l'œil aussi souvent que nécessaire. Après quelques clignements des paupières, la solution se répartit sur la surface oculaire en formant un film transparent et durable. **VISMED® GEL MULTI peut également être utilisé pendant le port de lentilles de contact (rigides ou souples).**

Caractéristiques et mode d'action :

VISMED® GEL MULTI contient du hyaluronate de sodium, un polymère naturel également présent dans les structures de l'œil humain. Les caractéristiques physiques particulières du hyaluronate de sodium confèrent à VISMED® GEL MULTI ses propriétés viscoélastiques et de rétention d'eau. VISMED® GEL MULTI forme ainsi un film protecteur stable à la surface de l'œil qui n'est que lentement éliminé par le battement des paupières. VISMED® GEL MULTI allie ainsi un soulagement durable à un confort maximal. VISMED® GEL MULTI est bien toléré grâce à sa composition unique.

Conservation et élimination :

Conserver à une température inférieure à 30 °C dans un endroit sec, à l'abri de la lumière ! Ne pas congeler ! Ne pas utiliser VISMED® GEL MULTI après la date d'expiration indiquée sur le flacon et le carton d'emballage. Conserver hors de portée des enfants ! Jeter 6 mois après ouverture, sans dépasser la date de péremption, conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.

Présentation : 15 ml de solution en flacon multidoses.

VISMED® GEL MULTI est un dispositif médical destiné à être utilisé par les patients.

Date de la dernière révision : 2025-01

Date d'apposition du marquage CE: 12.07.2012

Mode d'emploi au verso.



Distributeur :

HORUS PHARMA

22, Allée Carnille MUFFAT,

INEDI 5, 06200 Nice – France

Tél. : 04 93 19 54 03, www.horus-pharma.fr



TRB CHEMEDICA AG

Otto-Lilienthal-Ring 26


85622 Feldkirchen (Munich)

Allemagne


Tél. +49 (0)89 46 14 83-0




VISMED® MULTI GEL

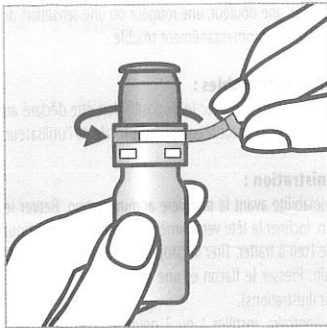


1
Enlever la bague d'inviolabilité.

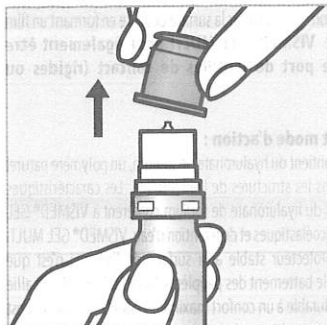

2
Retirer le capuchon de protection.

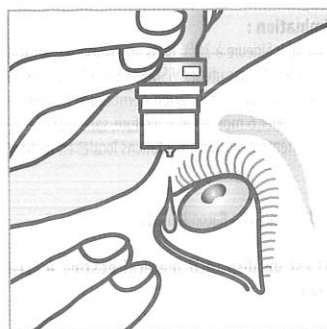

3
Instiller une ou deux gouttes dans l'œil.

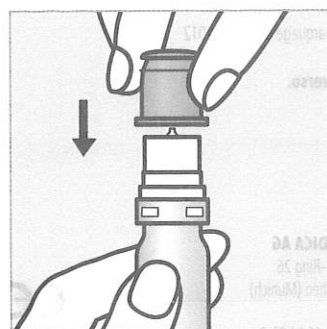

4
Remettre le capuchon de protection en place après administration.

LOT Numéro de lot

 Date de péremption

 Fabricant

MD Dispositif médical

UDI Numéro d'identification unique du dispositif

 Consulter le mode d'emploi

STERILE A Stérilisé par procédé aseptique

 30°C Limite de température

 Conserver à l'abri de la lumière

 Date de fabrication

120282/1
C/VGM031-08/24
NOT42601V02
S/01.25