

# **VISUXL<sup>®</sup>** Collyre pour le soulagement et la récupération optimale de la sécheresse oculaire

Sans conservateurs

## **Mode d'emploi**

### **Quand utiliser VISUXL<sup>®</sup>?**

VISUXL<sup>®</sup> est une solution ophtalmique lubrifiante et antioxydante, sans conservateur, et composée de Coenzyme Q10, Vitamine E TPGS et de sel de sodium d'acide hyaluronique réticulé. L'acide hyaluronique réticulé est une forme d'acide hyaluronique plus stable et plus efficace que la forme non stabilisée et confère à VISUXL<sup>®</sup> de meilleures propriétés viscoélastiques, mucomimétiques et hydratantes ainsi que d'une efficacité prolongée dans le temps.

La combinaison d'acide hyaluronique réticulé et de composés antioxydants/ anti radicaux libres permet un traitement efficace dans les cas de:

- sécheresse oculaire ;
- altérations de la continuité des surfaces cornéennes et conjonctivales après une chirurgie réfractive, un traumatisme causé par un corps étranger ou une chirurgie ;
- altérations de la surface oculaire liées à une maladie métabolique (diabète) ;
- stress environnementaux (pollution atmosphérique, eau chlorée, microclimats altérés, fumée, climatisation) ;
- exposition intense et prolongée aux radiations UV et ionisantes ;
- utilisation prolongée d'ordinateurs, écrans, ou télévision.

**Mode d'utilisation:** Instiller 1 à 2 gouttes de VISUXL<sup>®</sup> dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de chaque oeil 2 fois par jour ou selon les instructions de votre ophtalmologue.

### **Quelles autres indications faut-il respecter lors de l'application du produit?**

En cas de traitement concomitant, instiller VISUXL<sup>®</sup> au moins 5 minutes après l'administration d'autres médicaments.

### **Avertissements**

- Ne pas utiliser ce produit si vous présentez une allergie ou une hypersensibilité à l'un des constituants ;
- Si vous présentez un quelconque effet indésirable, arrêtez l'utilisation et prenez contact avec votre ophtalmologue ;
- Le produit peut être instillé pendant le port de lentilles de contact : il n'en affecte pas les caractéristiques et peut aussi être utilisé comme solution d'hydratation des lentilles de contact souples ;
- Instiller le produit au moins 5 minutes après l'utilisation d'autres médicaments ;
- Le produit conserve sa stérilité jusqu'à 180 jours après la première ouverture du flacon ;
- La date de péremption fait référence au produit dans son emballage intact et stocké convenablement ;
- Ne pas utiliser ce produit après la date de péremption présente sur l'emballage ;
- Lavez vos mains avant de procéder à l'instillation du produit ;
- Ne pas toucher l'oeil avec l'embout du flacon ;
- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé ;
- Conservez le produit à l'abri de la lumière et de la chaleur, et garder hors de la portée des enfants.
- Conservez le produit à la température ambiante (15-25 °C).
- Mode et voie d'administration : voie ophtalmique, ne pas avaler.

**Composition:** 100 ml de VISUXL<sup>®</sup> contiennent :

- Coenzyme Q10 100 mg ;
- Vitamine E TPGS (D- $\alpha$ -tocophérylpolyéthylèneglycol 1000 succinate) 500 mg ;
- Sel de sodium d'acide hyaluronique réticulé 100 mg ;
- Solution tampon isotonique q.s.p. 100 ml.

**Présentation:** Flacon de 5 ml sans conservateur dans système 3K./ Flacon de 10 ml sans conservateur dans système 3K.