

# Pansement liquide imperméable pour couvrir les blessures superficielles.

## Mode d'emploi du pansement spray WUNDmed

Agiter avant utilisation. Nettoyer et sécher avec soin la plaie avant application. Vaporiser sur la plaie à une distance de 5 à 10 cm jusqu'à la recouvrir entièrement d'un film protecteur. Laisser sécher. Répéter l'application si besoin. Utiliser uniquement comme indiqué. Attention ! A utiliser uniquement sur les blessures superficielles. Ne pas utiliser sur des plaies infectées, profondes ou étendues. Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. Si nécessaire, le film adhésif peut être retiré à l'aide d'eau et de savon.

Ne jeter les aérosols dans la collecte de déchets que lorsqu'ils sont vides. Respecter les réglementations locales.

## Précautions d'emploi

Aérosol extrêmement inflammable. Conteneur sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation grave des yeux. Peut engendrer de la somnolence et des vertiges. Un contact répété peut être à l'origine d'une peau sèche ou craquelée. Si consultation d'un médecin, conserver l'emballage ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement les instructions et les respecter. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres sources de chaleur. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers des flammes nues ou d'autres sources de chaleur. Ne pas percer ni brûler, même après utilisation. A protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F. Peut provoquer une sensation de brûlure temporaire lors de la pulvérisation.

## Ingrédients :

Butane, Acétate d'éthyle, Acétone, Propane, Isobutane, Huile de graines de Ricin, Copolymère d'acrylates.