

Propriétés des pansements de protection WUNDmed :

Ces pansements de protection WUNDmed sans glycérine sont des pansements hydrocolloïdes sans gélatine. Mis au contact des liquides de la plaie, ils vont former un gel. Il permet aussi de protéger la plaie et d'éviter les frottements et ainsi de soulager les douleurs grâce à la partie en mousse de polyéthylène (PE) présente au dos du pansement.

Utilisation des pansements de protection WUNDmed :

Les pansements de protection WUNDmed sont indiqués pour protéger les types de plaies suivants : ampoules, cors, callosités, oignon, acné modérée, coupures et éraflures suintantes, cloques et brûlures légères.

Contre-indications :

Ne jamais utiliser chez les patients présentant une sensibilité connue au produit ou à l'un de ses composants, en particulier la carboxyméthylcellulose et les polyisobutènes.

Précautions d'emploi :

1. Ne pas utiliser sur des plaies infectées.
2. En cas de diabète ou de problèmes de circulation, consulter son médecin ou son podologue avant d'utiliser ces pansements.
3. En l'absence de guérison ou si la peau autour de la plaie devient rouge et enflée, consulter son médecin ou son pharmacien.
4. A usage unique. Réutiliser un pansement expose à un risque de contamination croisée et diminue l'efficacité du produit.
5. Ne pas utiliser en combinaison avec des crèmes, car cela peut nuire à l'adhérence du pansement à la plaie compromettre le succès du traitement.
6. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
7. Ne pas utiliser sur des plaies saignantes ou sur des brûlures au troisième degré.

Mode d'emploi :

1. Laver la zone affectée avec de l'eau et du savon et la sécher avec soin, car les huiles et l'humidité peuvent réduire l'adhérence du pansement.
2. En cas d'ampoule percée, appliquer un antiseptique doux.
3. Retirer la grande languette du film protecteur. Positionner le pansement au centre de la zone affectée.
4. Retirer la petite languette du film protecteur. Presser le pansement sur la peau environnante.
5. Ne pas retirer le pansement avant qu'il ne commence à se détacher de lui-même.
6. Répéter l'application jusqu'à la fin du processus de guérison.

Retrait du pansement :

1. Soulever avec délicatesse les bords du pansement tout en pressant la peau vers le bas.
2. Continuer à soulever les bords jusqu'à ce qu'ils se détachent de la peau.
3. Appuyer sur la peau pour détacher le pansement.
4. Solution alternative : étirer horizontalement et soulever le pansement facilite dans la plupart des cas le retrait.
5. Jeter le pansement de manière appropriée.

Fréquence de changement du pansement :

1. Le pansement doit adhérer à la plaie aussi longtemps que possible.
2. En cas d'exsudats, il doit être remplacé immédiatement.
3. Remplacer le pansement lorsque la capacité maximale d'absorption est atteinte.

Conserver dans un endroit frais et sec.